



| | | | |
|--|---|--|---|
| Project Type Instructions | Date: January 28 2021 Customer: Thermor Ltd Job Number: TH3987 Item Number: 59024 Designer: Alex Vranjesevic | Revision: A |  Contact: Graphic's Department graphics@thermor-ins.com |
| | UPC (For Reference Only)  | Reason For Project: New Item: New Branding: Design Update: X N/A. | |

BIOS living

Chaise d'aisance

59024



Mise en garde

- **Ne pas** assembler ni utiliser cet équipement sans avoir préalablement lu et compris ce manuel d'instructions. Le non-respect des mises en garde ci-dessous pourrait entraîner des blessures.
- **Ne pas** dépasser la capacité de poids maximale de 300 lb/136 kg. Dépasser la capacité de poids pourrait entraîner des blessures.
- Consulter un professionnel de la santé pour déterminer si cet appareil est adapté à l'utilisateur.

IMPORTANT : Veiller à ce que les 4 pattes soient toujours à la même hauteur avant utilisation.

Directives d'assemblage



Déplier le châssis de la chaise d'aisance.



Insérer la barre transversale avant dans les supports avant (situés sur les pattes avant du châssis de la chaise d'aisance). S'assurer que les deux goupilles métalliques S'ENCLENCHENT PARFAITEMENT dans les trous.



Ajuster les 4 pattes à la hauteur désirée en les faisant glisser VERS LE HAUT ou VERS LE BAS. Aligner les goupilles métalliques en vous assurant qu'elles s'enclenchent parfaitement dans les trous. Veiller à ce que les 4 pattes soient réglées à la même hauteur.



Emboîter le siège et le couvercle de toilettes à la barre de soutien arrière.



Fixer la barre en U en insérant les deux extrémités dans le châssis arrière de la chaise d'aisance. S'assurer que les goupilles métalliques S'ENCLENCHENT PARFAITEMENT dans les trous correspondants.



Utiliser la chaise d'aisance avec le seau au chevet d'un patient et le pare-éclaboussures avec la chaise d'aisance au-dessus de toilettes.

Pliage de la chaise d'aisance

- Ajuster les pattes au réglage le plus bas ou les enlever pour gagner de l'espace (optionnel).
- Enfoncer les goupilles métalliques et retirer la barre un U.
- Retirer le seau ou le pare-éclaboussures.
- Enfoncer les goupilles métalliques pour relâcher la barre transversale avant et la rabattre.
- Rabattre le siège et le couvercle de toilettes
- Plier la chaise d'aisance comme illustré.



Garantie d'un an

La chaise d'aisance est garantie 1 an contre tout défaut de fabrication et de matériaux. Si ce produit devient inutilisable en raison d'un défaut et nécessite une réparation, renvoyez-le avec tous les composants et la preuve d'achat à l'adresse indiquée ci-dessous. Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition/de transport. Cette garantie ne s'applique pas si le produit est sujet à une utilisation abusive, à la négligence, à une manipulation brutale ou à des dommages.

Expédiez le produit préaffranchi et assuré (au choix du propriétaire) à :

Thermor Ltd.
 Attn: Repair Department
 16975 Leslie Street
 Newmarket, ON L3Y 9A1

www.biosmedical.com
 Courriel : support@biosmedical.com

BIOS | Medical
 MANUFACTURED BY / FABRIQUÉ PAR
THERMOR LTD.
 16975 LESLIE STREET
 NEWMARKET, ON L3Y 9A1
 MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE
 WWW.BIOSMEDICAL.COM