

TU CAMBRIDGE MASK

Gracias por haber elegido Cambridge Mask. Estamos orgullosos de la alta calidad del producto que hacemos aquí, en Reino Unido. Nos encantaría conocer tu opinión. Si tienes alguna pregunta o sugerencia sobre cómo podemos mejorar nuestros productos o servicios, escríbenos a info@cambridgemask.com.

MASCARILLAS CON TU MARCA


¿Sabías que podemos personalizar mascarillas con tu marca?

En Cambridge Mask Co podemos poner la marca de tu empresa en mascarillas personalizadas. Ideal para empleados, clientes importantes o para clientes potenciales.

El pedido puede ser de un mínimo de 200 unidades. Para más información, visita www.cambridgemask.com.

ADVERTENCIA

Las mascarillas con clasificación «N» filtran materia particulada de PM2,5. La mascarilla se debe ajustar correctamente para que la filtración sea efectiva. Los bebés y los niños deben estar bajo supervisión cuando lleven mascarilla. La mascarilla no filtra químicos industriales o partículas con base de aceite como la pintura. No sobrepasar el tiempo máximo de uso recomendado que se especifica en las instrucciones de uso.

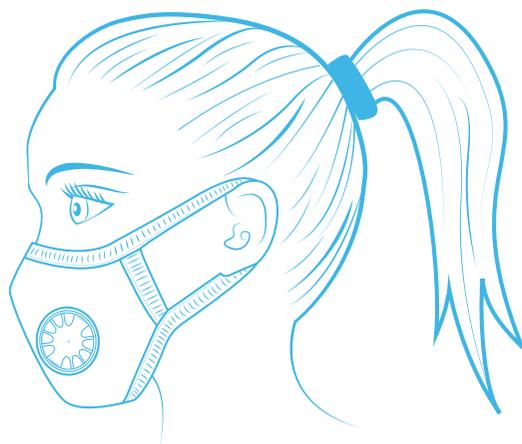

NORMAS DE USO

| Nivel de polución | Calidad del aire Estado (ICA) | Descripción | Cambiar después de |
|---|-------------------------------|---|-------------------------|
| Bueno | Menor de 50 | Horizonte claramente visible | Mascarilla no necesaria |
| Moderado/Poco saludable para grupos sensibles | 51-150 | No se puede ver la polución a simple vista, leve neblina en el horizonte | 340 horas |
| Poco saludable/Muy poco saludable | 151-300 | Neblina visible a 2-3 km | 220 horas |
| Peligroso para la salud | 301-500 | Nubes de polución, visibilidad de alrededor de 1 km | 180 horas |
| Por encima del índice | Over 500 | Visibilidad menor de 600 metros Nubes de polución similares a la niebla claramente visibles incluso bajo la luz del sol | 90 horas |

Nota: Los niveles de esta tabla están basados en la normativa de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. Algunos estratos se han unido para facilitar su uso.

TALLAS



XL
175x220mm
90kg



L
170x200mm
65-89kg



M
150x190mm
33-64kg



S
140x170mm
11-32kg




XS:
120x135mm
6-10kg

El tamaño de la mascarilla está basado en el peso de la persona que la utilice.

INFORMACIÓN SOBRE LA MASCARILLA

Esta mascarilla no desechable de media cara puede utilizarse durante mucho más tiempo que la mayoría de mascarillas industriales desechables. Sin embargo, una vez que los contaminantes «llenen» sus filtros, la mascarilla debe ser sustituida. La suciedad de la mascarilla se puede limpiar, pero las pequeñas partículas contaminantes se adhieren al filtro de forma permanente y no es posible limpiarlas. Sustituye la mascarilla cuando sientas que es más difícil de lo normal respirar con ella.

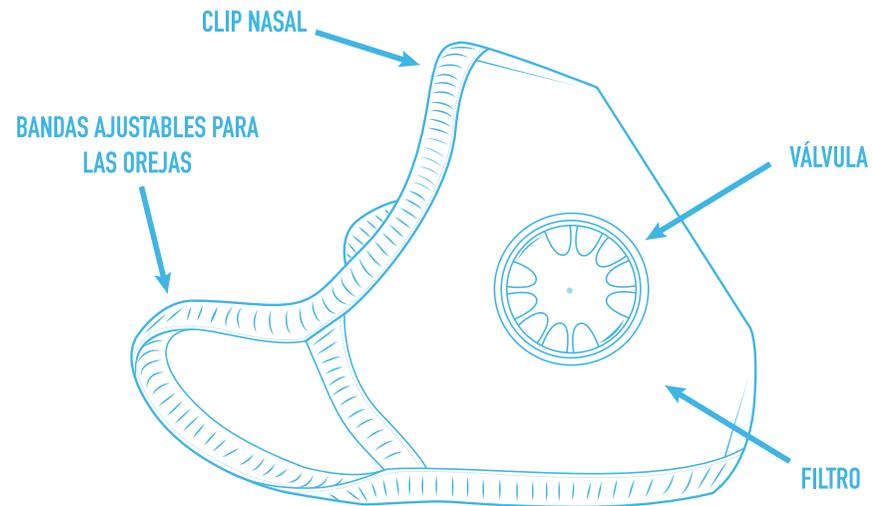


8

AJUSTE DE LA MASCARILLA


1 Hemos diseñado las bandas de ajuste de las orejas centrándonos en factores de comodidad y protección. Asegúrate de que esté apretada pero que sea cómoda. Tira de los bordes de la mascarilla para aplanar la zona de la nariz y así reducir el espacio entre la nariz y la mascarilla.



2 Cuando te pongas la mascarilla, asegúrate de presionar el clip nasal para que se ajuste perfectamente a la cara. Esto asegura que el aire fluya a través de la mascarilla y no alrededor de ella.

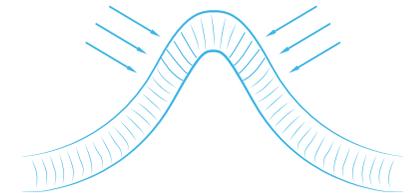

3 La mascarilla en su conjunto actúa de filtro y su válvula ayuda a reducir la humedad en climas húmedos y de altas temperaturas, o cuando se hace ejercicio o se practica ciclismo.

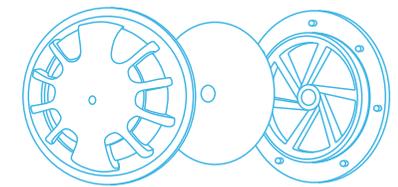

Frente de la Válvula
Membrana de silicona
Cubierta Posterior de la Válvula

9