

Ruuvikiinnitteisen liukupyörän asennus

Liukupyörä asennetaan AINA tuolin etujalan taakse

- Mittaa ja merkitse pystysuuntaisen reiän paikka, 15 mm jalan takareunasta mitattuna porattavan reiän keskelle. Tarkista reiän paikka liukupyörää sovittamalla ja varmista, että reikä tulee myös sivusuunnassa mitattuna jalan keskikohtaan.
- Mittaa ja merkitse vaakasuuntaisen kiristysruuvien paikka. Tarkista liukupyörää sovittamalla.
- Poraaja tuolin jalan alle tulevaa ruuvia varten pystysuuntainen suora n. 45 mm syvä reikä 3 mm poralla. Reiän ympärille tulisi jäädä ehjää puuta noin 15 mm.
- Poraaja vaakasuuntaista kiristysruuvia varten n. 25 mm syvä reikä 3 mm poralla
- Aseta liukupyörä paikoilleen ja kiristä pysty- ja vaakasuuntaiset ruuvit paikoilleen.
 - Uppokanta 45...50 mm / 4...5 mm
 - Uppokanta 25 mm / 4...5 mm

Ruuvikiinnitteisten liukupyörien jälkiasennuksessa huomioitavaa

- Liukupyörät rasittavat tuolin etujalkojen liitoksia ja voivat lyhentää tuolin käyttöikä.
- Normaalisti tuoleissa on vain yksi vaakasarja, joihin tuolin etujalat on kiinnitetty. Pyörien vähäininkin aeraus tai haritus aiheuttaa ylimääräistä rasitusta tuolin liitoksille ja voi johtaa liitosten pettämiseen. Tämän estämiseksi suosittelemme tuolin etujalkojen väliin ylimääräistä vaakatukea.
- Liukupyörien asentaminen voi rajoittaa tuolin suurinta sallittua kuormitettavuutta.
- Liukupyörien asentamista ei suositella tuoleihin joiden käsinojien etureuna on tuolin etujalkojen etupuolella (kaatumisvaara).

