

# Liukupyörän asennus

## Liukupyörä asennetaan AINA tuolin etujalan taakse

- Mittaa pystysuuntaisen reiän paikka, 14 mm jalan takareunasta mitattuna porattavan reiän keskelle. Tarkista, että reikä tulee myös sivusuunnassa mitattuna jalan keskikohtaan.
- Poraa tukitappia varten pystysuuntainen suora 75 mm syvä reikä 9 - 9,5 mm poralla. Poraa ensin vain noin 15 mm ja varmista pyörää sovittamalla reiän oikea paikka ja suunta. Virheellisesti porattu reikä rasittaa liukupyörän liitoksia ja voi aiheuttaa liukupyörän rikkoontumisen.
- Aseta pyörä paikoilleen ja merkitse kiristysruuvia varten porattavan reiän paikka. Irrota tukipyörä ja poraa kiristysruuvin reikä 5 - 6 mm poralla.
- Puhdista poraukset puruista, aseta liukupyörä paikoilleen ja kiristä kiristysruuvi.

## Liukupyörrien jälkiasennuksessa huomioitavaa

- Liukupyörät rasittavat tuolin etujalkojen liitoksia ja voivat lyhentää tuolin käyttöikä.
- Normaalisti tuoleissa on vain yksi vaakasarja, joihin tuolin etujalat on kiinnitetty. Pyörrien vähäinenkin auraus tai haritus aiheuttaa ylimääräistä rasitusta liitoksille ja voi johtaa liitosten pettämiseen. Tämän estämiseksi on suositeltavaa asentaa tuolin etujalkojen väliin ylimääräinen vaakatuki esimerkiksi puusta tai putkesta.
- Liukupyörän tukitapin ympärille tulee jäädä vähintään n. 10 mm ehjää puuta.
- Liukupyörrien asentamista ei suositella tuoleihin joiden käsinojien etureuna on tuolin etujalkojen etupuolella.

