

INSTI®

Autotest de dépistage du VIH Mode d'emploi

LIRE AVANT L'UTILISATION

Ce test comprend :



Étape 2 : Test




1. Agitez et versez tout le contenu. Attendez jusqu'à ce que le liquide disparaisse.

2. Agitez et versez tout le contenu. Attendez jusqu'à ce que le liquide disparaisse.
CONSEIL : Il se peut que vous deviez tapoter doucement le flacon 2 pour en extraire tout le liquide.

3. Agitez et versez tout le contenu. Attendez jusqu'à ce que le liquide disparaisse.

Préparation

Vidéo de formation disponible sur : www.insti.com

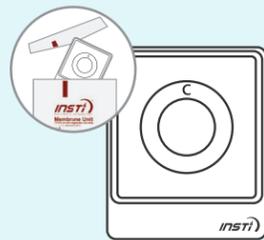

1. Ouvrez le sachet du dispositif de test.
IMPORTANT : Lavez-vous et séchez-vous les mains.



2. Posez le dispositif de test sur une surface plane.



3. Retirez le capuchon du flacon 1. Posez-le sur une surface plane.
AVERTISSEMENT : Le flacon 1 contient un liquide. Manipulez-le avec soin.

Étape 1 : Prélèvement du sang


En cas de difficulté pour prélever du sang, veuillez vous reporter aux Questions fréquemment posées au dos.




1. Tournez et tirez l'extrémité de la lancette. Jetez l'extrémité.




2. Frottez-vous le doigt et les mains pour augmenter le débit sanguin.

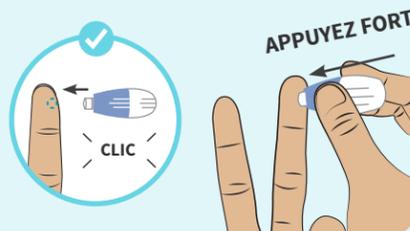


3. Placez la lancette sur le côté du bout du doigt.

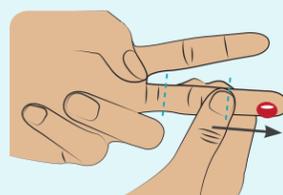

4. Frottez-vous le doigt pour obtenir une **GROSSE** goutte de sang.

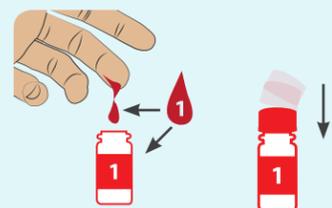

5. Laissez **TOMBER** 1 goutte dans le flacon 1. Refermez le capuchon du flacon 1.

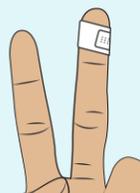

6. Appliquez le pansement adhésif.


Étape 3 : Lisez les résultats

Lisez les résultats immédiatement et dans un délai maximum d'**UNE (1) HEURE**.



Négatif

Votre résultat de test est négatif.

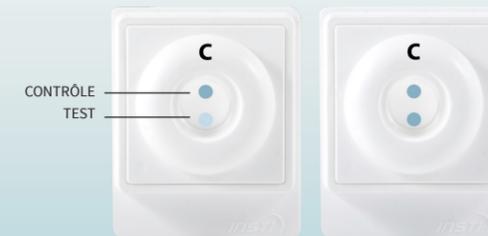

Positif

Deux points signifient que votre résultat de test est positif. Vous êtes probablement séropositif/séropositive. Les résultats positifs **DOIVENT** être confirmés par un médecin.



Non valide

Votre test n'a pas fonctionné correctement. Le point de contrôle doit apparaître pour indiquer que le test a été correctement effectué.

CONSEIL : Un point peut être plus clair que l'autre. Dans de rares cas, un anneau pâle peut apparaître au niveau du point de test ; ceci constitue un résultat positif.

Résultat négatif

Comme avec de nombreux tests, de faux résultats sont possibles. Pour réduire le risque de faux résultats, assurez-vous de suivre les instructions et utilisez le test correctement. Si vous obtenez un résultat négatif, mais que vous avez effectué une activité à risque d'infection par le VIH au cours des 3 derniers mois, il se peut que vous soyez dans ce qu'on appelle la « fenêtre sérologique » et il est recommandé que vous répétiez le test ultérieurement.

Résultat positif

Consultez un médecin dès que possible et informez ce dernier que vous avez effectué un autotest de dépistage du VIH. Tous les résultats positifs doivent être confirmés par une analyse en laboratoire.

Qu'arrive-t-il après un résultat positif ?

La séropositivité ne signifie pas que vous avez le SIDA. Avec un diagnostic et un traitement précoces, il est peu probable que vous développiez le SIDA.

Mise au rebut

Éliminez en respectant les réglementations locales. Remettez tous les éléments dans l'emballage extérieur. Jetez-les dans une poubelle.



