


durex[®] PASSFORM-MASSBAND


RICHTIG ABMESSEN - FÜR NOCH GENUSSVOLLEREN SEX

Drucke diese Seite richtig aus, indem du bei den Druckeinstellungen eine **100 % Skalierung** auswählst (in Farbe oder schwarz-weiß). Um sicherzugehen, dass der Ausdruck auch die richtige Größe hat, kannst du einen Personalausweis oder eine Bankkarte auf das Feld auf der rechten Seite legen. Wenn es genau passt, kannst du loslegen!

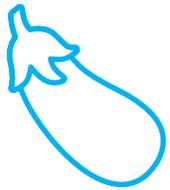

1 HAND ANLEGEN

Schneide das Maßband entlang der gestrichelten Linie aus. Im breiteren Teil des ausgeschnittenen Maßbands findest du noch eine weitere Schnittlinie für einen Schlitz. Dann entspann' dich, mach es dir bequem und stell sicher, dass dein Penis erigiert ist.

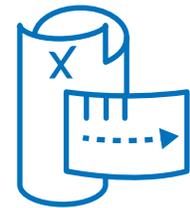

2 ABMESSEN


Lege die schmale Seite des ausgedruckten Passform-Maßbands um die breiteste Stelle deiner Erektion und ziehe dieses Ende dann durch den zuvor ausgeschnittenen Schlitz*. Das **X** markiert die passende Größe. Details findest du in dem Diagramm auf dem Ausdruck.

*Bitte achte auf scharfe Kanten, an denen du dich schneiden könntest.



3 ERHALTE DEINE RICHTIGE PASSFORM

Notiere dir deine Passform: **SCHMAL**, **REGULÄR** oder **GROSS**

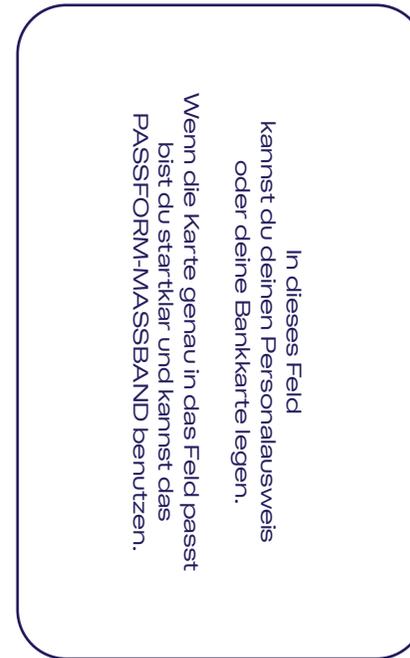

Finde die passenden Kondome für deine Passform. Scanne dafür einfach den QR-Code




SCHMAL



REGULÄR



GROSS

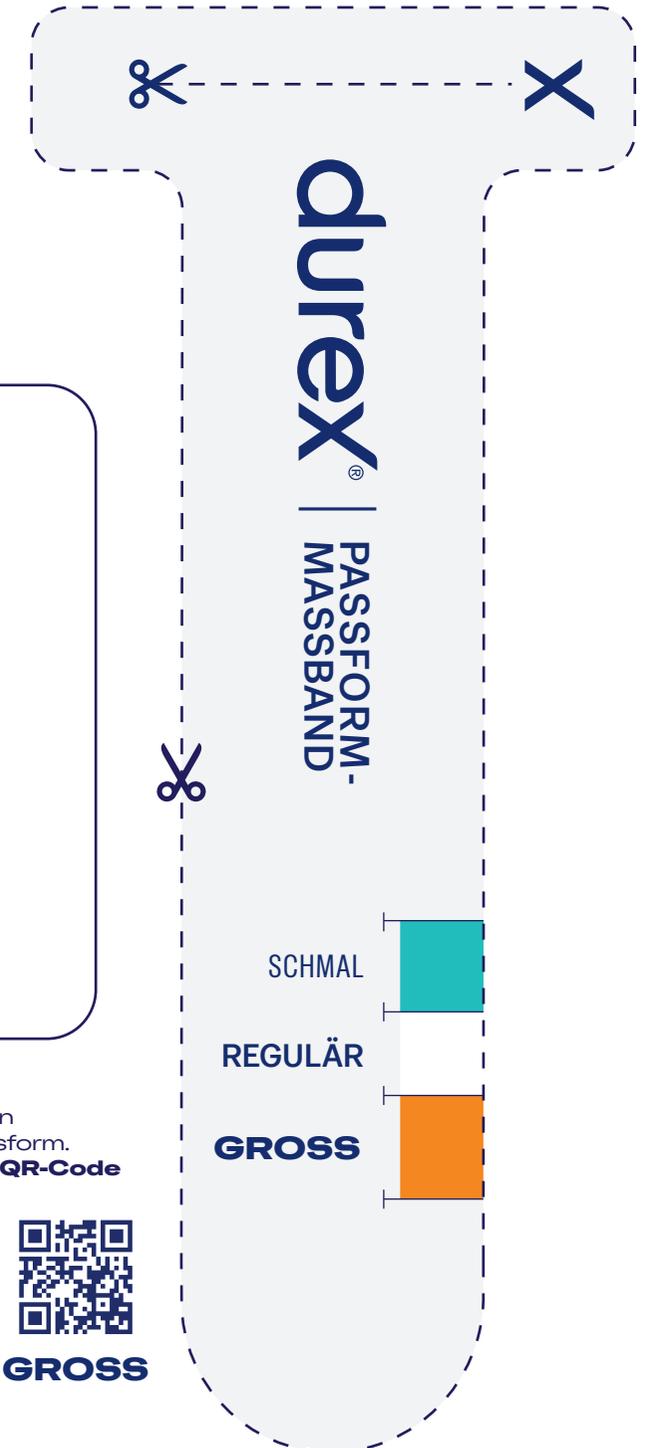

Denk daran: das ist nur eine Empfehlung. Wenn die empfohlene Passform nicht mit der übereinstimmt, die du normalerweise kaufst oder sie sich nicht bequem oder sicher anfühlt, dann solltest du sie nicht verwenden.