

Motif Luna® Guía Rápida

1. Botones y Funciones

Pantalla LCD

- A Modo de masaje
- B Modo de expresión
- C Ciclos
- D Nivel de vacío
- E Temporizador

Botones de control


- F Botón de modo
- G Botón de aumentodisminución de ciclos
- H Luz de noche LCD
- I Botón de aumento/disminución de niveles
- J Botón de encendido



2. Preparación de la bomba Luna


Montaje de la bomba Luna

1. Lávese las manos antes de tocar los componentes del extractor de leche.
2. Inserte la membrana en la base del montaje del diafragma (el componente que se conecta a la brida mamaria). Asegúrese de que encaje firmemente y que el borde de la membrana encaje alrededor del borde de la base del diafragma.
3. Conecte la tapa del diafragma (el componente que se conecta al tubo) sobre la base del diafragma en el borde de la tapa del diafragma.
4. Conecte la válvula en la parte inferior de la brida mamaria.
5. Conecte el montaje del diafragma a la parte superior de la brida mamaria. Utilice un movimiento giratorio para sujetar y quitar este conjunto para evitar dañarlo.
6. Enrosque el biberón en la parte inferior de la brida mamaria.
7. Conecte el tubo al montaje del diafragma y conecte el otro extremo del tubo a la bomba Luna. (Para bombeo simple, coloque la tapa en uno de los puertos de flujo de aire).
8. Conecte el adaptador de corriente a la bomba Luna.
9. Conecte el adaptador de corriente al tomacorriente.

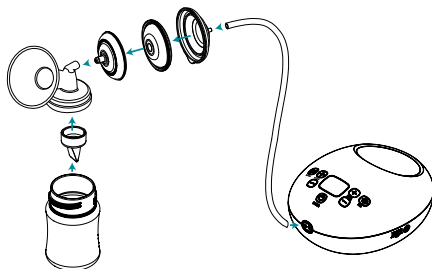


3. Usando la bomba Luna

CÓMO USAR LA BOMBA DOBLE

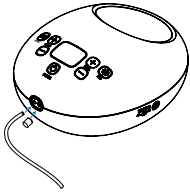

Bombeo simple

Para volver al modo de bombeo simple, asegúrese de cubrir el puerto de flujo de aire con el tapón.

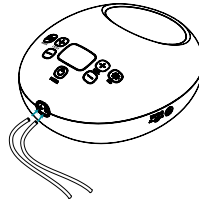

Bombeo doble

Para usar la bomba Luna en el modo de bombeo doble, retire el tapón del puerto de flujo de aire y conecte el tubo del kit de recolección adicional.

CÓMO ENCENDER Y APAGAR LA BOMBA LUNA

1. **Presione el botón de encendido.** El dispositivo se encenderá, indicado por la iluminación de la pantalla. La bomba Luna comenzará en modo de masaje para ayudar a impulsar una bajada de leche más rápida.
2. **Presione el botón Mode** para cambiar al modo expresión una vez que su leche empieza a fluir. El modo masaje también tiene una función en la que finalizará automáticamente y cambiará al modo expresión sin tener que presionar el botón para cambiar de modo manualmente.
3. **Ajuste la succión a su nivel de comodidad.**
4. **Cuando desee finalizar con la expresión,** Primero presione el botón de Encendido y luego quite la pezonera y el kit de recolección de leche de su seno.

4. Advertencias y precauciones.



ADVERTENCIA: Situación potencialmente peligrosa que podría provocar lesiones graves.



PRECAUCIÓN: Situación posiblemente peligrosa que podría resultar en lesiones corporales leves.



Fabricado para:
Motif Medical®, LLC
8 The Green, Suite 5601
Dover, DE 19901

Teléfono: (844) 272-8390
Correo electrónico: info@motifmedical.com
Sitio: www.motifmedical.com

motif
MEDICAL