



Contre-Indications

NE PAS UTILISER le Système de Rétablissement Air Relax si vous présentez l'un des symptômes suivants :

- Inflammation, Infection, douleurs d'origine inconnue, saignements Internes ou Externes origin, des plaies, Lésions, Tumeurs , des Fractures des Os, ou Luxation, sur ou à proximité du lieu d'application
- Oedème Pulmonaire Aigu
- Une Thrombophlébite Aigue
- Des Infections Aigues
- Thrombose Véneuse Profonde
- Des Épisodes d'Embolisme Pulmonaire
- Une Insuffisance Cardiaque Congestive Aigue
- Ou tout état où il existe des effets indésirables Véneux & Lymphatiques accrus

Veillez **consulte votre médecin traitant avant toute utilisation du Air Relax Recovery System** si vous présentez l'un des états suivants :

- Vous avez un stimulateur cardiaque
- Vous avez un implant, sur ou proche de l'endroit d'application.
- Vous vous sentez faible
- Vous êtes enceinte
- Vous souffrez de Diabète (de Type I & II)

Veillez **immédiatement arrêtez toute utilisation & consulter un médecin et consulter votre médecin** si vous développez les symptômes suivants:

- Vous vous sentez faible, étourdi, ou que vous vous évanouissez
- Si vous présentez des signes de compression d'un nerfs périphérique tels que des : picotements, douleurs, engourdissements et faiblesses musculaires.

Commencez à utiliser le Système Air Relax, à partir de la pression la plus faible et augmentez progressivement, jusqu'à ce que vous atteignez le niveau de pression auquel vous vous sentez confortable. Ce produit est destiné uniquement à un usage personnel à domicile et ne doit pas être utilisé comme dispositif médical.