



Controindicazioni

NON UTILIZZARE il sistema Air Relax Recovery se si verifica una delle seguenti condizioni:

- Infiammazione, infezione, dolore di origine sconosciuta, emorragia interna o esterna, ferite, lesioni, tumori, tumori, fratture ossee o dislocazione nel sito di applicazione o nelle sue vicinanze.
- Edema polmonare acuto
- Tromboflebite Acuta
- Infezioni acute
- Trombosi venosa profonda
- Episodi di embolia polmonare
- Insufficienza cardiaca congestizia acuta e congestizia
- qualsiasi condizione in cui un aumento del ritorno venoso e linfatico non è auspicabile.
- Sei incinta

Si **prega di consultare il proprio medico prima di utilizzare il sistema Air Relax Recovery** se si verifica una delle seguenti condizioni:

- Hai un pacemaker cardiaco
- Avete un impianto nel sito di applicazione o in prossimità del sito di applicazione
- Ti senti debole
- Si soffre di diabete (tipi I e II)

Si **prega di interrompere immediatamente l'uso e consultare il proprio medico** se si sviluppa uno qualsiasi dei seguenti sintomi:

- Ti senti debole, con testa leggera o debole
- Si manifestano segni di compressione dei nervi periferici come dolore, formicolio, intorpidimento e debolezza muscolare.

Iniziare a utilizzare il sistema Air Relax System dalla pressione più bassa, e aumentare gradualmente fino a raggiungere una pressione con cui ci si sente a proprio agio. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso personale domestico e non è destinato all'uso come dispositivo medico.