



Kontraindikation

Air Relax Recovery System **BITTE NICHT VERWENDEN**, wenn Sie an einer der folgenden Erkrankungen leiden:

Entzündung, Infektion, Schmerzen durch unbekannte Ursache, Innerliche oder Äußerliche Blutung, Wunden, Verletzungen, Tumore, Knochenbrüche oder Verrenkungen an oder in der Nähe der Gebrauchsstelle

- Akutes Lungenödem
- Akute Thrombophlebitis
- Akute Infektionen
- Tiefe Venenthrombose
- Anfälle von Lungenembolie
- Akute kongestive Herzinsuffizienz
- Oder eine Krankheit, bei der verstärkter venöser oder lymphatischer Rückfluss unerwünscht ist.

Bitte **informieren Sie Ihren Arzt vor der Nutzung vom Air Relax Recovery System**, wenn folgendes zutrifft:

- Sie haben einen Herzschrittmacher
- Sie haben ein Implantat an oder in der Nähe der Gebrauchsstelle
- Sie fühlen sich schwach
- Sie sind schwanger
- Sie leiden an Diabetes (Typ I oder II)

Bitte **stellen Sie die Nutzung ein & informieren Sie Ihren Arzt**, wenn eines der folgenden Symptome auftritt:

- Sie fühlen sich schwach, schwindelig oder kraftlos
- Sie zeigen Anzeichen von peripherem Nervendruck, wie zum Beispiel Schmerz, Kribbeln, Taubheit, Muskelschwäche

Beginnen Sie das Air Relax System auf unterster Stufe zu nutzen, und steigern Sie diese schrittweise, bis Sie eine Druckstufe erreicht haben, die angenehm für Sie ist.