

## Equine LTS I-Serie Recovery

Equine LTS I-Serie Recovery, er specielt udviklet til seneskader. I-Serie Recovery LTS har udelukkende Infrarød, 810nm & 850nm for at sikre en mere intens behandling. Behandlingstiden er fastsat for en konstant gennemstrømning af energi til det skadede område, med en hurtigere ophealing til følge.

Behandlingstid: 10-15 minutter direkte på det skadede område, 2 – 3 gange pr dag. Kan benyttes forebyggende 10 minutter før og efter træning.

### Vigtig information – læs nedestående før du bruger Equine LTS

**Equine LTS er et behandlingsredskab, der udelukkende bruges, når hesten er bundet op og under konstant opsyn. Behandlingstiden er 10-15 minutter. Equine LTS er IKKE en staldgamache og må IKKE benyttes som sådan. Benyttes Equine LTS i boksen eller er hesten uden opsyn under behandling med LTS, bortfalder garantien. Bliv altid ved hesten under behandling med Equine LTS, så du kan sikre dig, at den forbliver i ro.**

- Sørg altid for at Equine LTS I-Serie Recovery pålægges et tørt og rent område. Tør evt. med rent håndklæde først.
- Læg Equine LTS I-Serie Recovery på det skadede område og tænd. Lad virke 10-15 minutter, mens du bliver ved hesten. Sluk for batteriet og tag LTS af. Gentag behandlingen dagligt. Ved vedligeholdelse lad virke 10 minutter.
- Max behandlingstid pr. område er 15 min, kan evt. gentages 2-3 gange dagligt. Behandlingstid i alt max. 30 minutter, hvorefter skal LTS afkøles. Herefter kan behandling genoptages.
- Ved benskader foldes Equine LTS **forsigtigt** omkring det skadede ben. Når hesten har vænnet sig til behandlingen, kan LTS evt fastsættes på benet, men hesten skal være cool nok til at kunne, stå stille og forholde sig i ro. Garantien bortfalder i givet fald.
- Fixér **ALDRIG** LTS stramt omkring ben, knæ, koder, has etc. LTS virker selvom den ikke sidder helt indtil leddet. Kobbertrådene i LTS knækker, hvis LTS fx fixeres for stramt. Må ikke fixeres både under og over et led. Fold **ALDRIG** LTS på tværs af lysene. Garantien bortfalder i givet fald.
- Lad **IKKE** hesten stå uden opsyn eller i boks uden opsyn under behandling. Garantien bortfalder ved brug uden opsyn.
- Brug ikke andre strømforsyninger end den medfølgende, da garantien i så fald bortfalder. Det vil sige, hvis der medfølger et batteri, er det denne som skal bruges som strøm forsyning og **IKKE** opladeren til batteriet, siden denne ikke er beregnet til at strømforsyne LTS.
- Kik **IKKE** direkte ind i LED lys.
- Led lys kan forsigtigt renses med en vatpind med husholdningssprit, mens den er slukket.
- Kom **IKKE** Equine LTS i vaskemaskine eller på anden måde i kontakt med vand, da det elektriske system ødelægges og garantien bortfalder.
- Som opbevaring, brug kun den medfølgende pose. LTS **MÅ KUN FOLDES LANGS LYSENE** ved opbevaring. Hvis den foldes på den anden led bortfalder garantien.
- Man må **IKKE** stå, ligge eller stille noget tungt oven på LTS. LTS skal altid ligges ovenpå det pågældende område.
- Man må **IKKE** vride LTS. Indeni selve LTS er der et elektrisk system som består af ledninger, meget tyndt kobberpapir som kan knække hvis man vrider eller folder LTS den forkerte vej. Garantien bortfalder i givet fald.
- Garantien dækker produktionsfejl. Knæk af strenge under brug er ikke en produktionsfejl og er derfor ikke dækket af garantien.
- Angående reklamationer, kontakt [customerservice@equinelts.com](mailto:customerservice@equinelts.com).



### **Det aftagelige genopladelige batteri**

Før brug, skal batteriet oplades. Der findes en tænd/sluk knap i toppen af batteriet, denne SKAL være tændt når batteriet er i brug og UNDER opladningen.

Batteriet må ikke opbevares koldt, når batteriet kommer under 5 grader C aflades det. Husk at genoplade batteriet efter brug. Sluk for batteriet, når det ikke er i brug.

Brug kun den medfølgende strømforsyning til batteriet, ellers bortfalder garantien.

LTS må IKKE være tilsluttet batteriet, mens det oplades. Oplader til batteriet er KUN beregnet til opladning og ikke som strømforsyning direkte til LTS. Opladeren kan overophede.

Garantien bortfalder ved forkert brug af oplader til Batteri.

### **Dette er VIGTIG information vedrørende opladning af batteri**

1. Sæt opladeren i en stikkontakt
2. Tænd for stikkontakten
3. Lyser opladeren grønt?
4. Hvis opladeren lyser grønt, kobles batteriet til opladeren.
5. Tænd for batteriet
6. Lyser opladeren rød?
7. Hvis ja? Så oplader batteriet. Den er først færdigopladt når opladeren lyser grønt igen.
8. Husk at slukke for batteriet, når det frakobles opladeren.
9. Batteriet er kulde-følsomt, præcis som fx en mobiltelefon og vil aflade når det er koldt. Derfor skal batteriet opbevares ved ca 15-20 grader, altså hjemme, i et varmt lokale i stalden eller i lommen.