

DOS

VERSUS

DONTS

TIL DIN EQUINE LTS

Brug KUN mens hesten er under opsyn

Equine LTS er et behandlingsredskab, der udelukkende bruges, når hesten er bundet op og under konstant opsyn

Fold IKKE

Fold ALDRIG LTS på tværs af lysene

Brug kun på et tørt og rent område

Sørg altid for at Equine LTS pålægges et tørt og rent område

Fixér ALDRIG stramt omkring ben

Fixér ALDRIG LTS stramt omkring ben, knæ, koder, has etc

Vær forsigtig med din LTS

Læg Equine LTS på det skadede område og tænd. Lad virke 3-5 minutter, mens du bliver ved hesten. Sluk for batteriet og tag LTS af

Brug ALDRIG en anden oplader

Brug ikke andre strømforsyninger end den medfølgende

Behandlingstid er 3-5 min

Max behandlingstid pr. område er 3-5 min, kan evt. gentages 2-3 gange dagligt. Behandlingstid i alt max. 30 minutter hvorefter LTS skal afkøles

Kik IKKE i lyset

Kik IKKE direkte ind i LED lys.

Rengøring

Led lys kan forsigtigt renses med en vatpind med husholdningssprit, mens den er slukket

Kom IKKE i vaskemaskinen

Kom IKKE Equine LTS i vaskemaskine eller på anden måde i kontakt med vand