

doigt de la paume de la main vers l'extrémité du doigt jusqu'à la formation d'une gouttelette de sang.

9. Avant de commencer à prélever le sang, utilisez le tampon pour retirer la première goutte de sang. Attendez qu'une nouvelle goutte de sang importante se forme. Vous pouvez faciliter cette procédure en restant debout et en maintenant votre main sous le niveau du cœur.

10. Maintenez vos doigts diagonalement au bord du tube de prélèvement maintenu à la verticale afin que le sang puisse s'écouler à l'intérieur. Continuez de masser votre doigt pour que le sang continue de couler. Cela peut durer plusieurs minutes.

11. Arrêtez de collecter l'échantillon uniquement lorsque le volume de sang atteint la marque indiquant 300 µl. Attention, le laboratoire ne pourra pas analyser l'échantillon. Tapotez doucement plusieurs fois sur le tube, afin que le sang s'écoule dans le fond.

12. Après avoir prélevé l'échantillon de sang, pressez le tampon contre l'endroit du saignement. Lorsque le saignement diminue, appliquez le pansement sur la plaie.

13. Fermez le tube en pressant fermement le capuchon dans l'ouverture jusqu'à ce qu'il se clipse. Secouez bien le tube.

14. Retirez l'étiquette carrée portant le code de la carte d'identification du test et collez-la sur le tube de prélèvement sanguin rempli - PAS sur le tube de transport.

15. Glissez le tube de prélèvement rempli dans le tube de transport plus large sans retirer la feutrine absorbante. Fermez correctement le tube de transport.

16. Placez le tube de transport contenant le tube de prélèvement dans l'enveloppe de retour. Gardez la carte d'identification du test - vous en aurez besoin pour activer votre test.

17. Pour créer votre compte rendu de résultat, connectez-vous à l'application My cerascreen (Android, iOS) ou sur le site my.cerascreen.com. Indiquez votre numéro d'identification à six chiffres figurant sur votre carte d'identification du test sous la mention « activer le test » et suivez les instructions.

18. Éliminez les parties usagées du coffret de test dans le sac plastique transparent avec les déchets ménagers.

Εξέταση δυσανεξίας στην ισταμίνη

Η εξέταση για δυσανεξία στην ισταμίνη της cerascreen® είναι ένα κατ σημαντικό προϊόν που προστατεύεται για την εξέταση για υποσιασμένη δυσανεξία στην ισταμίνη. Η εξέταση χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό της συγκέντρωσης στο ανθρώπινο τριχοειδού αίμα της σεβαλίσας της διαιμήνης (DAO), του ονόματος στο άριστο του θραύστη και της εργαστήριο μετρητάς στην ισταμίνη. Το δείγμα αναλύεται in vitro στο εξειδικευμένο διαγνωστικό εργαστήριο των συνεργατών της cerascreen®.

ΣΤΟ KIT ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΕΙΧΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΓΓΗΣ

A 1 τραυματόλιπο €, 1 βαμβακόφραο στελέχος €, 1 μαντράκι αλκοόλικο €, B 1 σωλήνα μεταφόρας, C 1 μικρογραμμάρια 300 µl σωλήνες αναλογίας αίματος €, D 2 βελόνες € 0050, E 1 φάκελος επιστροφής, F 1 κάρτα ID εξέτασης με αυτοκόλλητο

Πληροφορίες για την εξέταση

Διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες χρήσης πριν ξεκινήσετε και λογοτείσθε τα βήματα που παρατίθενται.

Προειδοποίησης

- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το κατά πάσατε από κάποια ασθένεια που μεταδίδεται με το αίμα, όπως η παπιτάνη ή ο HIV.
- Φυλάσσετε αυτό το κιτ μακριά από παιδιά.
- Το κιτ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενήλικες άνω των 18 ετών.
- Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, χρησιμοποιήστε το κιτ μόνο από την αιτία που αναλύεται στην ισταμίνη. Χρησιμοποιήστε το κιτ μόνο από την αιτία που αναλύεται στην ισταμίνη.
- Εάν πάσχετε από κάποια συγκεκρινή ή επικτήτη δυσταραχή της πλήρης του αίματος ή είστε λαμβάνετε αντιριθμική φαρμακευτική αγωγή, χρησιμοποιήστε το κιτ μόνο από μισθωτεύτε τον ιατρό σας.
- Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, προηγουμένως είδετε το κιτ εξέτασης της διαιμήνης από τη λήψη αίματος, λάβετε το δέμα μόνο πάντα και κάποιο άλλο άτομο ή επικοινωνήστε με τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Σημαντικές πληροφορίες

Το δείγμα θα πρέπει να λαμβάνεται μεταξύ Κυριακής και Τρίτης (το αργότερο) και να παπούεται εντός της ίδιας ημέρας. Δέρτε υπόψη τον τύπο δύνης αρρενί.

Μπορούμε να κάνουμε ανάληση του δείγματος σας μόνο εάν ενεργοποιήσεται την εξέταση αυτή με το ID εξέτασης της κάρτας ID εξέτασης που διαθέτεται! Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το υπόκειμα στην σελίδα 17.

Δυστυχώς, δεν είναι δυνατή η ανάληση δευτεράμενων αίματος όγκου κάτω των 300 µl.

Σημειώστε όπως η πάντα η αισθαντικό και πλήρες αποτέλεσμα μπορεί να παρασχεθεί μόνον εάν κάνετε μικτή διατροφή (για περίπου 1 έως 2 έβδομες) πριν λάβετε το δέμα. Θα πρέπει να καταναλώνετε προϊόντα που περιέχουν ισταμίνη, επίσης, πάντα με φέρμαρια (π.χ. αντιτούμπα) μπορούν να πρεπάσουν το αποτέλεσμα της εξέτασης. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν διαθέσιμες στην ερωταπάνελη του ιωτού πάντα.

Μη λαμβάνετε δέιγμα αίματος αμέσως μετά από έντονη φυσική δραστηριότητα.

Εάν ανησυχείτε οποιαδήποτε ερώτηση, στείλτε μας ένα e-mail (help@cerascreen.com) ή πιο εύκολα τη σελίδα βοήθειας στον ιστότοπό μας: help.cerascreen.com.

Οδηγίες χρήσης

1. Τοποθετήστε όλο το περιεχόμενο του κιτ εξέτασης επάνω σε μια καθαρή επιφάνεια. Πριν ξεκινήστε, επιλέξτε το σημείο δειγματοληψίας. Συμβούλιο: Ο μέσος και ο παράμετρος του αριστερού χειρός είναι συνήθως η καλύτερη λόση. Ανοίξτε το σωλήνα δειγματοληψίας και ποτοσθέτηστο το επάνω σε μια επιπλέοντα. Προσέξτε τη μέση πέτρα.

2. Πλύντε τα χέρια σας με ασπόνδυλο και ζεστό νερό. Κρατήστε τα χέρια που επιλέγετε από ζεστό νερό στο λαβύρινθο του αίματος 15 εώς 30 δευτερόλεπτα για να διεγέρετε την κυκλοφορία του αίματος. Στεγνώστε προεστικά τα χέρια σας με μια καθαρή πετσέτα.

3. Πειριστρέψτε κυκλικά το χέρι που επιλέξτε 5 έως 10 φορές, τελικά την τεντυώμενο εάν είναι συντόνη, με μεγάλες κινήσεις για να διεγέρετε την κυκλοφορία του αίματος.

4. Αφαιρέστε το μαντράκι αλκοόλικο από τη συσκευασία του και χρησιμοποιήστε το για να απολύτωσετε το άριο του δάκτυλου που προμπτεύεται. Περιένετε μέχρι να στεγνύσετε ξανά το δάκτυλο (15 δευτερόλεπτα).

5. Πάρτε τη βελόνα. (1) Πειριστρέψτε το προστατευτικό κάλυμμα μία φόρα ύψη από τον άκρον του. (2) Αφαιρέστε προσεκτικά το προστατευτικό κάλυμμα. Προσοχή: Μην χρησιμοποιήστε τη βελόνα εάν το προστατευτικό κάλυμμα είναι χαλαρό ή λείπει.

6. Τοποθετήστε τη γέρια σας επάνω σε μια σταθερή επιφάνεια. Τοποθετήστε τη βελόνα διαγνώσιας στο άριο του δάκτυλου σας, όπως φαίνεται στην εικόνα. Πίστε σταθερά τη βελόνα επάνω στο δάκτυλο μέχρι να απολύτωσετε. Προσοχή: Η βελόνα μπορεί να απολύτωσετε μόνο μία φόρα!

7. Πλέστε με τον αντίκειμα της πάστας στην κεράτη κάτω από το σημείο δειγματοληψίας και προβοτέρηστε τη βελόνη στην επιφάνεια της γέριας. Από την πλάτη της γέριας προσεκτικά απορρίψτε την πλάτη της γέριας μέχρι να στεγνύσετε ξανά το δάκτυλο.

8. Λατρεύτε τα χέρια σας επάνω σε μια σταθερή επιφάνεια. Τοποθετήστε τη γέρια σας στην επιφάνεια της γέριας μέχρι να στεγνύσετε ξανά το δάκτυλο.

9. Λατρεύτε τη γέρια σας με μια σταθερή επιφάνεια. Τοποθετήστε τη γέρια σας στην επιφάνεια της γέριας μέχρι να στεγνύσετε ξανά το δάκτυλο.

10. Λατρεύτε τη γέρια σας με μια σταθερή επιφάνεια. Τοποθετήστε τη γέρια σας στην επιφάνεια της γέριας μέχρι να στεγνύσετε ξανά το δάκτυλο.

11. Λατρεύτε τη γέρια σας με μια σταθερή επιφάνεια. Τοποθετήστε τη γέρια σας στην επιφάνεια της γέριας μέχρι να στεγνύσετε ξανά το δάκτυλο.

12. Λατρεύτε τη γέρια σας με μια σταθερή επιφάνεια. Τοποθετήστε τη γέρια σας στην επιφάνεια της γέριας μέχρι να στεγνύσετε ξανά το δάκτυλο.

13. Λατρεύτε τη γέρια σας με μια σταθερή επιφάνεια. Τοποθετήστε τη γέρια σας στην επιφάνεια της γέριας μέχρι να στεγνύσετε ξανά το δάκτυλο.

14. Λατρεύτε τη γέρια σας με μια σταθερή επιφάνεια. Τοποθετήστε τη γέρια σας στην επιφάνεια της γέριας μέχρι να στεγνύσετε ξανά το δάκτυλο.

15. Λατρεύτε τη γέρια σας με μια σταθερή επιφάνεια. Τοποθετήστε τη γέρια σας στην επιφάνεια της γέριας μέχρι να στεγνύσετε ξανά το δάκτυλο.

16. Λατρεύτε τη γέρια σας με μια σταθερή επιφάνεια. Τοποθετήστε τη γέρια σας στην επιφάνεια της γέριας μέχρι να στεγνύσετε ξανά το δάκτυλο.

17. Λατρεύτε τη γέρια σας με μια σταθερή επιφάνεια. Τοποθετήστε τη γέρια σας στην επιφάνεια της γέριας μέχρι να στεγνύσετε ξανά το δάκτυλο.

18. Λατρεύτε τη γέρια σας με μια σταθερή επιφάνεια. Τοποθετήστε τη γέρια σας στην επιφάνεια της γέριας μέχρι να στεγνύσετε ξανά το δάκτυλο.

19. Λατρεύτε τη γέρια σας με μια σταθερή επιφάνεια. Τοποθετήστε τη γέρια σας στην επιφάνεια της γέριας μέχρι να στεγνύσετε ξανά το δάκτυλο.

20. Λατρεύτε τη γέρια σας με μια σταθερή επιφάνεια. Τοποθετήστε τη γέρια σας στην επιφάνεια της γέριας μέχρι να στεγνύσετε ξανά το δάκτυλο.

21. Λατρεύτε τη γέρια σας με μια σταθερή επιφάνεια. Τοποθετήστε τη γέρια σας στην επιφάνεια της γέριας μέχρι να στεγνύσετε ξανά το δάκτυλο.

22. Λατρεύτε τη γέρια σας με μια σταθερή επιφάνεια. Τοποθετήστε τη γέρια σας στην επιφάνεια της γέριας μέχρι να στεγνύσετε ξανά το δάκτυλο.

23. Λατρεύτε τη γέρια σας με μια σταθερή επιφάνεια