

pogo[®]

Automatic



Press Once. GO!™

Encienda el medidor y, luego, presione una vez. Go! Simplemente presione aquí para hacer una sencilla prueba de One-Step™.

Para uso de un solo paciente

POGO Automatic[®]
Sistema de control de glucosa en sangre
Manual del propietario

Estimado propietario del sistema POGO Automatic®:

Gracias por elegir el sistema de monitorización automática de glucosa en sangre (ABGMS) POGO. Este manual le ayudará a aprender a utilizar el medidor automático de glucosa en sangre POGO y el cartucho de prueba automática POGO.

Dado que POGO Automatic es una forma completamente nueva de utilizar un medidor de glucosa en sangre, lea toda la información proporcionada y consulte este manual o su *Guía de inicio rápido automático de POGO* cuando tenga preguntas.

En Intuity Medical, Inc. (IMI), entendemos que el manejo de la diabetes puede ser todo un desafío, requiere de tiempo y puede ser una incomodidad. Esperamos que usar el sistema POGO Automatic ayude a manejar su diabetes de manera más fácil y conveniente.

Características de POGO Automatic®:

- **Pruebas automatizadas One-Step™** con solo presionar un botón
- Rápida cuenta regresiva de 4 segundos para los resultados
- Preciso, no requiere codificación
- Muestra de sangre pequeña, solo .25 microlitros
- Cargue los resultados del medidor automático POGO en su teléfono inteligente a través de Bluetooth o en la web a través de USB. Vea y comparta los resultados con el sitio web de Patterns o la aplicación Patterns® para POGO Automatic (iOS y Android). Visite www.patternsforpogo.com para obtener más información.
- Pantalla a color

Si necesita asistencia, llame al Servicio de Atención al Cliente de Intuity Medical de lunes a viernes, de 9 am a 9 pm, hora del este (ET), al 1-855-IMI-POGO (464-7646) o envíenos un correo electrónico a support@presspogohelp.com. Esperamos que disfrute usando su sistema POGO Automatic.

Instrucciones de seguridad importantes



IMPORTANTE: El sistema automático POGO es único y diferente de otros medidores. Antes de comenzar las pruebas de su glucosa en sangre, lea todas las instrucciones en este Manual del propietario.

Indicaciones de uso

El sistema de control de glucosa en sangre POGO Automatic®

está destinado para su uso en la medición cuantitativa de glucosa (azúcar) en muestras recientes de sangre capilar entera extraídas de la punta de los dedos. El sistema de control de glucosa en sangre POGO Automatic está diseñado para su uso por una sola persona y no debe compartirse.

El sistema de control de glucosa en sangre POGO Automatic®

está destinado para que las personas con diabetes se realicen pruebas a sí mismas fuera del cuerpo (uso de diagnóstico *in vitro*) en casa como una ayuda para supervisar la efectividad del control de diabetes. El sistema de control de glucosa en sangre POGO Automatic no debe utilizarse para diagnóstico o despistaje de diabetes ni en neonatos. El Sistema de control de glucosa en sangre POGO Automatic está indicado para uso en adultos y adolescentes (13 años y más).

Los cartuchos de prueba POGO Automatic® están diseñados para su uso con el medidor POGO Automatic con el fin de medir cuantitativamente la glucosa (azúcar) en muestras recientes de sangre capilar entera extraídas de las punta de los dedos.

Advertencias importantes

- Solo un paciente debe usar el Sistema de control de glucosa en sangre POGO Automatic. No comparta el medidor o los suministros de prueba con nadie, incluso con otros miembros de la familia. ¡No debe usarse en múltiples pacientes!

- Cada lanceta está cubierta con una cantidad pequeña (<0.24 IU) de heparina que evita que la sangre recogida se coagule dentro de la célula de prueba hasta que sus resultados aparezcan. Antes de usar este dispositivo, informe a su médico si es alérgico a la heparina o si alguna vez lo han diagnosticado con trombocitopenia inducida por heparina, también conocida como HIT. HIT es una afección muy rara que causa coágulos en la sangre. Deje de usar el dispositivo y comuníquese con su médico si nota una hinchazón inexplicable en un brazo o pierna, dolor agudo y repentino en el pecho o falta de aire o tiene síntomas de derrame cerebral.
- Un resultado de glucosa en sangre que se lee como HI (alto) o LO (bajo) puede indicar un problema potencialmente grave de salud. Si su resultado es inusualmente alto o bajo, repita la prueba. Consulte inmediatamente a su profesional de atención de la salud para recibir asesoramiento sobre el tratamiento si los resultados siguen siendo altos o bajos.
- Mantenga el medidor y todos los materiales de la prueba fuera del alcance de los niños. El cartucho de prueba POGO Automatic, la plataforma, las baterías, la solución de control POGO Automatic y el embalaje exterior pueden presentar peligro de ahogamiento y pueden ocasionar daños si se consumen.
- No consuma la solución de control; no es para consumo humano. No aplique la solución de control en la piel o en los ojos, ya que puede causar irritación. El aplicador de la solución de control POGO Automatic implica un riesgo de ahogamiento.
- Cuando realice una prueba con la solución de control, si sus resultados siguen fallando, llame al Servicio de Atención al Cliente de Intuity Medical al **1-855-IMI-POGO (464-7646)**. **NO** utilice el medidor para analizar sus niveles de azúcar en la sangre hasta que obtenga un resultado correcto.
- Este dispositivo no está destinado para usar en atención de la salud o para entornos de uso asistido tales como hospitales, consultorios médicos o instalaciones de atención a largo plazo porque no ha sido aprobado por la FDA para ser usado en estos entornos, incluyendo para pruebas asistidas de rutina o como parte de procedimientos de control glicémico.

- El uso de este dispositivo en varios pacientes puede provocar la transmisión del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), virus de la hepatitis C (VHC), virus de la hepatitis B (VHB) u otros patógenos transmitidos por la sangre.



ADVERTENCIA: Todos los suministros para pruebas de POGO Automatic se consideran de riesgo biológico y pueden potencialmente transmitir enfermedades infecciosas, incluso luego de que los haya limpiado y desinfectado. Lave sus manos con agua y jabón inmediatamente luego de su uso.

Precauciones

- Asegúrese de revisar la sección de las Limitaciones del sistema para acceder a información sobre los factores que pueden afectar la precisión de sus resultados.
- Llame a su médico si está experimentando síntomas que sean inconsistentes con su resultado de glucosa. Consulte con su profesional de la salud antes de realizar cualquier cambio en su medicamento para la diabetes o régimen de salud.

Limitaciones del sistema

- **El sistema POGO Automatic® no está destinado para su uso en múltiples pacientes.** No se debe usar en más de un paciente en un entorno clínico tal como hospitales, atención a largo plazo, centro de vida asistida, clínicas o ferias de salud ya que podría transmitir una infección de un paciente a otro.
- El Sistema POGO Automatic no está destinado para mediciones cuantitativas de sangre arterial o venosa.
- El Sistema POGO Automatic no está destinado para uso en neonatos.
- El Sistema POGO Automatic no debe usarse para el diagnóstico o despistaje de la diabetes.

- El medidor POGO Automatic debe usarse únicamente con los cartuchos de prueba POGO Automatic y las soluciones de control POGO Automatic.
- Las células de prueba individuales y los cartuchos son para un solo uso. No intente reusarlos.
- Use sangre capilar entera y fresca solamente. No intente usar plasma o suero para obtener resultados de pruebas de glucosa de sangre precisos.
- No debe ser usado en pacientes que están deshidratados, que sean hipotensos, estén en shock, muy graves o en estado hiperosmolar.
- El rango de hematocritos para el sistema POGO Automatic es de entre un 20% y un 60%. Los niveles extremadamente altos de hematocritos superiores al 60% o los niveles muy bajos de hematocritos inferiores al 20% pueden causar resultados inexactos.
- El sistema POGO Automatic no se ha evaluado en altitudes superiores a los 10,000 pies.

Importancia de hacerse pruebas

El autocontrol de la glucosa en sangre (SMBG, por sus siglas en inglés) es esencial para controlar la diabetes. El control frecuente de la glucosa ha probado brindar beneficios de salud significativos para las personas con diabetes. El ensayo de control y complicaciones de la diabetes (DCCT, por sus siglas en inglés) demostró que un control estricto de la glucosa puede reducir el riesgo de complicaciones relacionadas con la diabetes, como ceguera, enfermedad renal, daño nervioso y problemas cardíacos y circulatorios hasta en un 76%.¹ La introducción temprana del control intensivo de la diabetes ofrece beneficios adicionales al reducir el riesgo de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular y muerte por enfermedad cardiovascular en un 57%.²

Mediante la combinación del SMBG, los medicamentos recetados y un régimen saludable de dieta y ejercicio tal como lo recomienda su médico, puede ayudar a reducir las complicaciones generales de la diabetes. Consulte a su profesional de atención de la salud para analizar el programa correcto para usted.

¿Necesita ayuda?

- Consulte la sección de este Manual del propietario para el tema para el que tiene preguntas. Use el Índice para localizar la información.
- Consulte la sección de resolución de problemas. Si aún no puede encontrar la respuesta a su pregunta, llame al número gratuito del Servicio de Atención al Cliente de Intuity Medical al **1-855-IMI-POGO (464-7646)**.

DOCUMENTOS IMPORTANTES DE SEGURIDAD PARA SU REFERENCIA

"FDA Public Health Notification: Use of Fingerstick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Bloodborne Pathogens: Initial Communication" (2010) <https://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/InVitroDiagnostics/ucm227935.htm>

"CDC Clinical Reminder: Use of Fingerstick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Bloodborne Pathogens" (2010) <http://www.cdc.gov/injectionsafety/Fingerstick-DevicesBGM.html>

Índice

○ Aprender sobre el sistema POGO Automatic®	
Componentes del sistema	10
Cómo funciona el sistema POGO Automatic	11
El medidor POGO Automatic	12
Cartucho de prueba POGO Automatic	13
Información importante sobre el cartucho de prueba POGO Automatic	14
Manipulación del cartucho, eliminación del cartucho	15
Pantalla del medidor y pantalla de resultados	16
Barra de estado, símbolos informativos y de prueba	17
○ Cómo comenzar	
Inserción del cartucho de prueba POGO Automatic	18
○ Prueba de glucosa en sangre	
Lavarse las manos	19
Encender el medidor	20
Preparar el dedo para la prueba, iniciar la prueba	21
Extracción automática de sangre	22
Consejos para la extracción automática de sangre	23
Función Agregar más sangre (<i>de ser necesario</i>)	24
Consejos para agregar más sangre con éxito	25
Resultados	26
Marcado antes o después de las comidas (<i>opcional</i>)	27
Cómo entender sus resultados	28
Niveles de glucosa en sangre	29
Resultados inesperados, sugerencias para la solución de problemas	30
¿Cómo se comparan los resultados de su medidor con los resultados de laboratorio?	31
○ Prueba de la Solución de Control	
Prueba de la Solución de Control	32
¿Cuándo debe realizar una prueba de la solución de control?	32
Realizar una prueba de la solución de control	33
Resultados esperados	34
Resultados no esperados	35

○ Memoria	
Recuperar y visualizar los resultados en la memoria	36
Promedios de 7, 14, 30 y 90 días	37
Revisar los promedios antes y después de las comidas	38
○ Sincronización de resultados	
Emparejar POGO Automatic con su teléfono mediante Bluetooth	39
○ Configuración de su medidor	
Cómo usar el menú de configuración	41
Configuración de hora/fecha	42
Configuración del medidor, volumen, brillo de la pantalla del medidor	43
Configuración de la perforación	44
Rango objetivo	45
Configuración del Bluetooth	46
○ Cuidado de su medidor POGO Automatic®	
Limpieza y desinfección: proceso de dos pasos	48
Limpieza y desinfección DIARIA de la plataforma de prueba	49
Medidor de limpieza DESPUÉS DE CADA CARTUCHO o DIARIAMENTE	50
Desinfección del interior del dosificador DESPUÉS DE CADA CARTUCHO o SEMANALMENTE, desinfección del interior	52
Desinfección del área del cartucho interior, desinfección de la puerta de la batería	53
Cuidado de las ópticas del medidor, volver a montar el medidor	54
Ciclo de vida de tres años del medidor y las piezas del medidor	55
Reemplazo de las baterías	56
Almacenamiento y manipulación	58
○ Solución de problemas	
Códigos de error y alertas	59
○ Especificaciones técnicas	
Estándares eléctricos y de seguridad	63
Obtención de la ID de FCC	64
Especificaciones del medidor, características de rendimiento	65
Símbolos comunes	66
Información sobre la garantía	67

Aprender sobre el sistema POGO Automatic®

Componentes del sistema

Los siguientes elementos se incluyen en su sistema POGO Automatic:

- Guía de inicio rápido de POGO Automatic
- Medidor POGO Automatic
- Dos (2) pilas AAA

Los cartuchos de prueba y las soluciones de control POGO Automatic se venden por separado



ADVERTENCIA: Mantenga el medidor y todos los materiales de la prueba fuera del alcance de los niños. El cartucho de prueba, la plataforma, las baterías, la solución de control y el embalaje externo pueden representar peligros de ahogamiento y pueden ocasionar daños si se tragan.

Medidor de glucosa en sangre POGO Automatic®

POGO Automatic es un medidor de glucosa en sangre autocodificado que automatiza la extracción de sangre y proporciona resultados de pruebas en un solo paso. POGO Automatic utiliza una pequeña muestra de sangre (solo .25 microlitros) y proporciona resultados rápidos y precisos después de una cuenta regresiva de 4 segundos.

Tabla de sangre (microlitros)



Cómo funciona el sistema POGO Automatic®

La tecnología de pruebas automáticas de POGO Automatic es única. Cada célula de prueba en el cartucho de 10 pruebas contiene una lanceta y una banda de prueba.


Cuando desee realizar la prueba, el medidor de POGO Automatic abrirá una nueva celda de prueba estéril y la preparará para la perforación.

Cuando presione el dedo hacia abajo, el dedo se perforará automáticamente después de la cuenta regresiva de 3-2-1 (para desactivar la cuenta regresiva, consulte Configuración de la perforación, página 44). La sangre del dedo perforado fluirá automáticamente a través de una lanceta hueca hasta la banda de prueba donde un lente pequeño ve y analiza rápidamente la sangre. El resultado se muestra después de una cuenta regresiva de cuatro segundos.

1

Perforar el dedo

Simplemente presione hacia abajo en el puerto de prueba para comenzar la recolección y perforación automática.

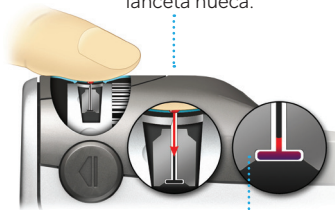

2 Extraer sangre

Su sangre viaja rápidamente hasta la almohadilla de prueba a través de la lanceta hueca.

3 Resultado de glucosa

La sangre llega al parche de prueba, que cambia de color con la glucosa

Después de la prueba, la aguja se retrae en el cartucho para evitar el contacto accidental.

El medidor POGO Automatic®

Puerto de datos (USB)

SISTEMA POGO
AUTOMATIC

Pantalla de
visualización

Botón de
encendido

Plataforma
de prueba
(Extraíble)

Puerto de
prueba/perforación



Memoria/Menú
Botón

Botones de
desplazamiento

Botón para abrir
la puerta del
cartucho



*No es el tamaño real

Puerta del cartucho

Piezas de reemplazo y materiales



Cartucho de prueba
POGO Automatic



Plataforma de prueba
POGO Automatic



Puerta de la batería
de POGO Automatic

Nota: La fecha de eliminación de 15 días es solo un ejemplo. Verifique la etiqueta en la parte superior del cartucho para obtener una fecha de caducidad de apertura precisa.

Comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente de Intuity Medical para averiguar dónde obtener suministros y piezas de repuesto.

Cartucho prueba POGO Automatic®

Todo lo que usted necesita para realizar la prueba está contenido dentro del Cartucho de prueba POGO Automatic. No necesita un dispositivo separado para realizar la perforación. Cada cartucho contiene 10 bandas de prueba y 10 lancetas.



Cartucho de 10 pruebas POGO Automatic

Use solamente cartuchos de prueba POGO Automatic con su medidor POGO Automatic.

Nota: La fecha de eliminación de 15 días es solo un ejemplo. Verifique la etiqueta en la parte superior del cartucho para obtener una fecha de caducidad de apertura precisa.

Cada célula de prueba está sellada ambientalmente y contiene una banda de prueba y una lanceta esterilizada.

- Los cartuchos de prueba son para uso de un solo paciente solamente.
- No comparta cartuchos, incluso si es con familiares.
- Las lancetas son para un solo uso de una persona y se autodesechan luego del uso.
- Las lancetas están recubiertas con silicona y heparina para ayudar a reducir el dolor y ayudar con la recolección de sangre. Este revestimiento hace contacto con la piel cada vez que se realiza la prueba.

ADVERTENCIA: Cada lanceta está recubierta con una cantidad pequeña (<0.24 IU) de heparina que evita que la sangre recogida se coagule dentro de la célula de prueba hasta que sus resultados aparezcan. Antes de usar este dispositivo, informe a su médico si es alérgico a la heparina o si alguna vez lo han diagnosticado con trombocitopenia inducida por heparina, también conocida como HIT. HIT es una afección muy rara que causa coágulos sanguíneos. Deje de usar el dispositivo y comuníquese con su médico si nota una hinchazón inexplicable en un brazo o pierna, dolor agudo y repentino en el pecho o falta de aire o tiene síntomas de derrame cerebral.

Información importante sobre el cartucho de prueba POGO Automatic®

Tenga en cuenta: El almacenamiento y manipulación correctos de los cartuchos de prueba son esenciales para obtener resultados precisos.

- Almacene los cartuchos de prueba en un lugar fresco y seco entre 40°F y 86°F y en un rango de humedad relativa de entre el 10% y el 90% (sin condensación).
- Asegúrese de que el medidor y el cartucho estén a temperatura ambiente antes de realizar la prueba (*consulte Especificaciones del medidor en la página 65*).
- Mantener fuera del calor y la luz solar directa. No refrigerar o congelar.
- No utilice el cartucho de prueba posterior a la fecha de vencimiento (⌚ Usar antes de:) impresa en la etiqueta del cartucho.
- No manipule el cartucho de prueba.
- Evite que caiga alimento, suciedad o agua sobre el cartucho.
- Después de retirarlo del papel de aluminio, marque inmediatamente la fecha de descarte en la caja de la parte superior del cartucho. No usar luego de la fecha de desecho. (*consulte el Ejemplo*).

Ejemplo: Fecha de descarte de 15 días

Abierto

Vence

16 de abril

1 de mayo



- Cuando inserte un cartucho nuevo en el medidor, este mostrará el siguiente símbolo indicativo de la cantidad de días que faltan para la fecha de desecho según se muestra en la pantalla del medidor para utilizar todas las pruebas. El medidor no permitirá usar el cartucho después de la fecha de desecho.



Nota: 15 días es solo un ejemplo.

Manipulación del cartucho

Puede retirar y volver a insertar un cartucho parcialmente utilizado para su uso posterior. No usar luego de la fecha de desecho.



Si inserta un cartucho parcialmente usado en el medidor, aparecerá este símbolo, que indica que el medidor no puede determinar correctamente la fecha de desecho. No usar luego de la fecha de desecho.



Cuando tome un cartucho parcialmente usado, intente no tocar las pruebas abiertas.

- Al manipular un cartucho parcialmente usado, coloque los dedos lejos de las pruebas abiertas.
- Lávese las manos inmediatamente después de la manipulación.
- No comparta cartuchos parcialmente usados, incluso si es con familiares.



IMPORTANTE: Por cuestiones de seguridad, las lancetas usadas se retraen hacia adentro en el cartucho para ayudar a proteger contra contacto accidental. Sin embargo, **SIEMPRE MANIPULE CON CUIDADO.**



Verifique con su proveedor de atención de la salud para conocer las instrucciones correctas de desecho.

Eliminación del cartucho

- Para expulsar de forma segura un cartucho de prueba usado, **MANTENGA PRESIONADO** el botón de la puerta del cartucho. Alinee el cartucho sobre el contenedor de desechos correspondiente, incline y libere.
- Si el cartucho se queda atrapado en el medidor, quite la plataforma de prueba para liberar el cartucho del medidor. *(Consulte **Cómo quitar la plataforma de prueba en la página 49**).*



ADVERTENCIA: Todos los suministros para pruebas de POGO Automatic se consideran de riesgo biológico y pueden potencialmente transmitir enfermedades infecciosas, incluso luego de que usted los haya limpiado y desinfectado. Lave sus manos con agua y jabón inmediatamente luego de su uso.

Pantalla del medidor y pantalla de resultados

El medidor usa símbolos para guiarlo a través de la prueba y para informarle si hay un problema con el medidor o el procedimiento de la prueba.

Pantalla de resultados

Pruebas restantes
en cartucho

Gráfico rápido

Sepa si está dentro del rango al instante


Número de resultado

mg/dL

unidad de medida estándar de EE. UU.
(miligramos por decilitro).

Fecha/Hora

Bluetooth

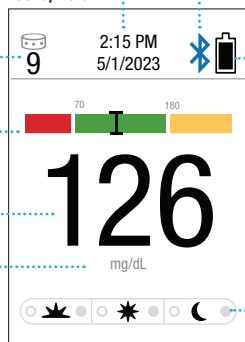

Estado de las baterías

Marcador de comidas



Negro = Tiempo registrado

○ Antes

● Después



Pantalla de pruebas restantes: presione los botones de desplazamiento cuando el medidor esté apagado para ver la cantidad de pruebas restantes en el cartucho

Barra de estado, información y símbolos de prueba

Símbolo Descripción



10

La cantidad de pruebas restantes en el cartucho actual. Disminuye a 0 a medida que se realiza las pruebas.



El número parpadeará en rojo en la pantalla de resultados cuando queden dos o menos pruebas en el cartucho. Cuando no haya pruebas restantes en el cartucho aparecerá un "0".



Si aparece "X" bajo el símbolo del cartucho, no hay cartucho.



El negro fijo indica suficiente energía de la batería.



Indica batería baja. Cuando aparece el símbolo de batería en rojo, el medidor tiene suficiente energía para alrededor de 50 pruebas. La precisión no se verá afectada. Sin embargo, debe cambiar la batería tan pronto como pueda. El símbolo de batería baja grande que se muestra indica que la batería está agotada.



Apagado Encendido

Bluetooth

2:15 p. m.
5/1/2023

Fecha/Hora

Advertencias



Frio




Caliente

La temperatura del medidor está fuera del rango de temperatura de operación



Cartucho vencido. El cartucho está vencido. No utilice el cartucho de prueba posterior a la fecha de vencimiento (⌘ Usar antes de:) impresa en la etiqueta del cartucho.


Cómo comenzar

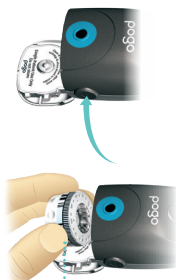

Fondo del cartucho

Inserción del cartucho de prueba POGO Automatic®

- Abra la puerta del cartucho presionando el botón en el lado derecho más bajo del medidor.
- Inserte un nuevo cartucho de prueba en el medidor con la parte inferior orientada dentro del medidor. El cartucho entra en el medidor de una sola manera.

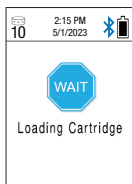

- Cierre la puerta del medidor. La información de calibración se leerá automáticamente. No se necesita codificación. Espere a que el cartucho deje de girar antes de tocar la plataforma de prueba o el puerto de prueba.



- Un cartucho nuevo mostrará 10 pruebas. Los días para desechar se mostrarán en la esquina.

Nota: 15 días es solo un ejemplo. El medidor mostrará los días de desecho correctos.

Prueba de glucosa en sangre

Aunque POGO Automatic es simple, su procedimiento de prueba es diferente. Siga estas instrucciones paso a paso para capacitarse y lograr una recolección automatizada exitosa de sangre. Asegúrese de realizar una prueba de práctica antes de utilizarla.

Lávese las manos



Para prepararse para la prueba, lávese las manos con jabón y agua y seque completamente. El uso de agua tibia estimula el flujo de sangre.

Si también decide utilizar alcohol para limpiar su dedo, asegúrese de dejarlo secar. También es una buena idea lavarse las manos en cualquier momento después de retirar la plataforma de prueba o abrir la puerta del cartucho para manipular o cambiar los cartuchos.



NOTA: Los dedos fríos limitan el flujo de sangre. Asegúrese de que los dedos estén a temperatura ambiente o más cálidos antes de realizar la prueba.



Botón de encendido

Encienda el medidor

- Para realizar una prueba de glucosa en sangre o de solución de control, encienda el medidor presionando el botón de encendido.
- Vuelva a presionar el botón de encendido para abrir una nueva prueba.
- El medidor abrirá una nueva prueba y la llevará al puerto de prueba. Espere a que el cartucho deje de girar antes de tocar la plataforma de prueba o el puerto de prueba.



IMPORTANTE: NO COLOQUE SU DEDO EN EL PUERTO DE PRUEBA hasta que el medidor le indique que está listo para la prueba, Esto podría hacer que el cartucho no rote o puede causar daño o mal funcionamiento al medidor.



Listo para la prueba

- El medidor le indicará cuando esté listo para realizar la prueba.



La prueba está lista



La prueba no está lista



NOTA: Cada vez que inicie una prueba, el medidor abrirá automáticamente una nueva celda de prueba. Tendrá cinco minutos para completar la prueba. Si no utiliza la prueba en un plazo de 5 minutos, **NO** podrá utilizarla más tarde.

Prepare el dedo para la prueba

- **Elija el lugar correcto para realizar la prueba:** Debido a que POGO automatiza la extracción de sangre, SOLO DEBE UTILIZAR LOS DEDOS QUE SABE QUE SANGRAN CORRECTAMENTE. Además, evite las callosidades.
- **Masaje para aumentar la circulación:** Prepare la punta del dedo para la perforación frotándolo varias veces, comenzando por el nudillo y presionando hacia abajo y hacia el extremo de la punta del dedo. Frote con firmeza para girar el extremo del dedo “rojizo” del aumento del flujo sanguíneo.



Inicie la prueba

- Coloque el dedo sobre el puerto de prueba y posicione la parte que desea que se perforo. El uso de la punta de los dedos puede ser más cómodo.
- Asegúrese de cubrir completamente el orificio del puerto de prueba para garantizar una prueba correcta.
- **PRESIONE EL DEDO HACIA ABAJO** para iniciar la prueba.
- Después de una cuenta regresiva de 3-2-1, se realizará la perforación. Si no aparece el conteo, aplique, suavemente, más presión para iniciar la perforación.
- **DEBE MANTENER EL DEDO EN SU LUGAR** después de la perforación.



NOTA: Para ayudar a recordar que debe mantener el dedo hacia abajo después de la perforación, cuente 3...2...1... NO MOVER EL DEDO



Recolección automática de sangre

- Siga sosteniendo el dedo en el lugar mientras el medidor recoge su muestra de sangre.
- El medidor ahora está moviendo automáticamente su muestra de sangre hasta la banda de prueba para medir su glucosa en sangre.
- El medidor intentará la extracción sanguínea automática durante 9 segundos. Mantenga el dedo hacia abajo para la extracción sanguínea automática.



Extracción de sangre exitosa

- Puede retirar el dedo cuando el medidor emita un pitido y una flecha indique que la extracción de sangre se ha realizado correctamente.

Consejos para la extracción automática de sangre



- **Selle el puerto de prueba:** Cubra completamente el puerto de prueba. Cree un sello sobre el orificio del puerto con la punta de su dedo. Evite que la posición del dedo permita que el aire se pierda por el puerto. **MANTENGA EL PUERTO SELLADO DURANTE EL PROCESO COMPLETO DE RECOLECCIÓN DE SANGRE.** Es posible que desee practicar cómo colocar su dedo antes de realizar la prueba, especialmente si tiene uñas largas o prefiere realizar la prueba sobre el costado de la punta de su dedo.
- **Aplice presión consistente:** Cuando realice la incisión, **PRESIONE HACIA ABAJO** hasta que comience la prueba. Mantenga el dedo firme para que POGO Automatic pueda perforar automáticamente y obtener la muestra de sangre. Luego de perforar, **NO ELEVE** el dedo incluso levemente fuera del puerto de prueba; esto puede interrumpir la recolección de sangre. Nota: Presionar demasiado puede restringir el flujo sanguíneo y causar errores en el medidor.
- **Es útil** colocar el dedo índice de la otra mano sobre el dedo que se está probando para asegurarse de aplicar una presión firme y constante sin levantarlo durante la extracción automática de sangre.

REALICE LA PRUEBA
EN SU SANGRE

Función Agregar más sangre (de ser necesario)

- Si la obtención automática de muestras no se realiza correctamente, se le indicará que añada más sangre. Tiene 90 segundos para agregar más sangre en el cartucho para completar la prueba. Durante este tiempo, no se realizará otra perforación.



Obtenga una
pequeña gota de
sangre



Ubique la gota en el
centro del puerto de
prueba




Presione con firmeza
la gota en el puerto



IMPORTANTE: Continúe agregando sangre tantas veces como sea necesario dentro de los 90 segundos para lograr una prueba exitosa.


Consejos para agregar más sangre con éxito

Use gotas de sangre redondeadas

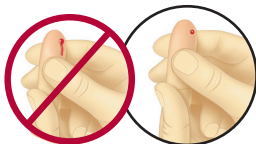

Utilice 0.5 microlitros de sangre

Tabla de sangre (microlitros)

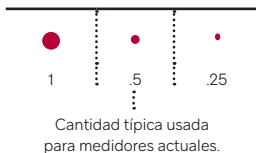

REALICE LA PRUEBA
EN SU SANGRE

- Intente no dejar correr sangre en el puerto de prueba o en el dedo. Si esto ocurre, limpie su dedo y apriete suavemente para sacar una gota adicional de sangre.
- Durante los 90 segundos, puede retirar el dedo y **CONTINUAR AGREGANDO SANGRE**, siempre y cuando, al apretarlo suavemente, se forme una gota de sangre.



Quite los residuos sobrantes de la plataforma de prueba antes de la siguiente prueba

- Mientras agrega más sangre, podría derramar algo en el puerto de prueba o en la plataforma de prueba. Si esto ocurre, quite la sangre antes de comenzar con otra prueba. (*Consulte Limpieza y desinfección: proceso de dos pasos en la página 48*).
- La sangre que haya quedado de una prueba anterior es un riesgo biológico.




Cuenta regresiva



Resultado de
glucosa

Resultados

- Puede ver el resultado después de una cuenta regresiva de 4 segundos.
- Después de revisar el resultado y marcar la comida (opcional), puede apagar el medidor presionando el botón de encendido o permitir que se apague automáticamente después de 60 segundos.
- Los resultados de la prueba se almacenan automáticamente en la memoria del medidor, se agregan a los promedios y se pueden marcar como resultados previos o posteriores a la comida (*consulte las marcas antes o después de las comidas en la página 27*).
- El Gráfico rápido (ejemplo abajo) aparece con su resultado para indicar instantáneamente si sus resultados están dentro del rango.
- El rango de glucosa preestablecido en el gráfico rápido es de 70 a 180 mg/dL. Si es necesario, puede ajustar el rango en el menú de configuración (*consulte Ajustes de rango objetivo en la página 45*).

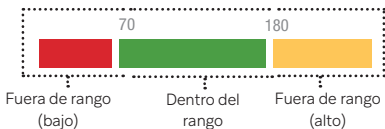Gráfico rápido



PRECAUCIÓN: Si durante las pruebas los resultados se muestran como a   o error, debe repetir la prueba. Si esto continúa, llame al Servicio de Atención al Cliente de Intuity Medical al 1-855-IMI-POGO (464-7646).

Marcado antes o después de las comidas (opcional)



NOTA: Para comprender los efectos que las comidas tienen en la glucosa en sangre, es importante realizar la prueba en "pares", 1 hora antes y 2 horas después de que coma. La Asociación Americana de la Diabetes (ADA) también recomienda realizar la prueba antes de realizar ejercicio y a la hora de irse a la cama o cuando se sospeche de hipoglucemia.

REALICE LA PRUEBA
EN SU SANGRE

Luego de una prueba, la pantalla del medidor muestra un resultado de glucosa con un símbolo parpadeante previo y posterior a las comidas.

Si usted **ELIGE NO MARCAR** sus resultados:

- Usted ha finalizado. Apague el medidor o deje que se apague automáticamente.

Si usted **ELIGE MARCAR** sus resultados:

- Presione los botones de desplazamiento hasta que aparezca el punto de (○ ●) marcado antes o después del símbolo de comida que corresponda.
- Para confirmar, apague el medidor o deje que se apague automáticamente.



 Botones de desplazamiento

Ejemplos





Cómo entender sus resultados

El medidor POGO Automatic mostrará resultados de glucosa que oscilan entre 20 y 500 mg/dL.

Resultados LO (bajo)

Si su resultado es inferior a 20 mg/dL, aparecerá LO (bajo) en la pantalla. Esto indica azúcar muy baja en sangre (hipoglucemia).



PRECAUCIÓN: Puede obtener resultados falsos de glucosa baja si está gravemente deshidratado. Si cree que está gravemente deshidratado, comuníquese con su profesional de atención de la salud de manera inmediata.



Resultado HI (alto)

Si su resultado es superior a 500 mg/dL, aparecerá HI (alto) en la pantalla. Esto indica azúcar muy alta en sangre (hiperglicemia).

Si los resultados de su prueba son inusualmente altos o bajos, repita la prueba inmediatamente.



PRECAUCIÓN: Resultados de glucosa en sangre LO (bajo) y HI (alto) indican complicaciones de salud potencialmente graves. Debe comunicarse con su profesional de atención de la salud de manera inmediata y seguir su consejo sobre el tratamiento si sigue obteniendo resultados inusualmente altos o bajos.

Niveles de glucosa en sangre

La glucosa en sangre sube después de comer, pero una o dos horas después debería regresar a su rango normal.

La tabla de abajo indica los rangos antes y después de las comidas para adultos (no embarazadas) sin diabetes.

Rango objetivo para adultos sin embarazo ni diabetes³

Ayuno	Dos horas después de comenzar la comida
Menos de 100 mg/dL	Menos de 140 mg/dL

Los resultados de la prueba de glucosa en sangre deben estar dentro de un **rango objetivo personal** recomendado por su profesional de la salud. Una vez que haya establecido su rango objetivo, podrá detectar cuando sus resultados sean altos o bajos. Los estudios clínicos han demostrado que mientras más cerca está usted de su rango objetivo, es más probable que usted reduzca su riesgo de complicaciones relacionadas con la diabetes.¹

Resultados no esperados

Si su resultado de glucosa en sangre es inferior a 70 mg/dL, lo que indica un nivel bajo de azúcar en la sangre, o 180 mg/dL o más, lo que indica un nivel alto de azúcar en la sangre, debe comunicarse con su profesional de la salud y seguir sus recomendaciones de tratamiento.³ Si la condición empeora, busque atención médica de inmediato. Nunca realice cambios significativos a su régimen de tratamiento sin consultar a su profesional de atención de la salud.

Consejos para la resolución de problemas

Si su resultado de glucosa en sangre no coincide con cómo se siente, siga estos consejos:

- Asegúrese de seguir cuidadosamente los pasos para realizar una prueba de glucosa en sangre (*consulte Pruebas de glucosa en sangre en la página 19*).
- Verifique la fecha de vencimiento en el cartucho de prueba POGO Automatic. No utilice el cartucho después de la fecha de caducidad abierta (*consulte la información importante sobre cartuchos de prueba POGO Automatic en la página 14*).
- Asegúrese de que su medidor y los cartuchos de prueba se almacenen siempre en un lugar fresco y seco. Si es necesario, repita la prueba con un cartucho de prueba debidamente almacenado (*consulte Almacenamiento y manipulación en la página 58*).
- Realice una prueba de Solución de Control para asegurarse de que el sistema funcione correctamente (*consulte Realización de una prueba de Solución de Control en la página 33*).
- Si sus resultados de glucosa en sangre aún no reflejan el modo en que se siente, llame a su profesional de atención de la salud de manera inmediata.

¿Cómo se comparan los resultados de su medidor con los resultados de laboratorio?

Para facilitar la comparación, los resultados del medidor POGO Automatic y los resultados de las pruebas de laboratorio se expresan en unidades equivalentes a plasma.

Si desea comparar el resultado de su medidor con el resultado de laboratorio, **debe estar en ayunas** durante al menos ocho horas.

- Lleve su medidor al laboratorio cuando obtenga la muestra de sangre para una prueba de glucosa en ayunas.
- Mida su glucosa en sangre con el medidor POGO Automatic dentro de los 10 a 15 minutos posteriores a la extracción de sangre de su brazo.
- Tenga en cuenta que el laboratorio utiliza una metodología de prueba diferente a la del medidor.
- Solicite orientación a su profesional de la salud cuando compare sus resultados de laboratorio con sus resultados del medidor POGO Automatic.

Prueba de la Solución de Control

Realizar una Prueba de solución de control ayuda a controlar que el medidor y el cartucho de prueba estén funcionando juntos correctamente, y que sus resultados de glucosa en sangre sean correctos.

Las Soluciones de Control POGO Automatic contienen una cantidad conocida de glucosa. Realiza una prueba con soluciones de control POGO Automatic de manera similar a una prueba de glucosa en sangre, excepto que utiliza la solución de control en lugar de la sangre (*consulte Realización de una prueba de solución de control en la página 33*).

El resultado de la Prueba de solución de control aparece en el medidor como un resultado de aprobado o desaprobado. Si el resultado de la Prueba de solución de control es desaprobado, puede ser que usted no haya realizado la prueba correctamente o que el medidor y el cartucho de prueba no estén funcionando correctamente juntos.

Se puede usar una solución de control de Nivel 1 o Nivel 2 para controlar el sistema. Obtener un resultado APROBADO usando cualquiera es aceptable para verificar el rendimiento del sistema. Para la mayoría de los usuarios, es suficiente utilizar el nivel 2.

¿Cuándo debe realizar una prueba de la solución de control?

- Para practicar hacer la prueba usando su Sistema POGO Automatic.
- Al abrir un tubo nuevo de cartuchos de prueba de POGO Automatic.
- Cuando considere que su medidor y los cartuchos de prueba no funcionan correctamente en conjunto.
- Si ha dejado caer o ha dañado el medidor.
- Si sus cartuchos estuvieron almacenados de manera incorrecta tal como en humedad o temperaturas extremas.
- Si su médico le ha aconsejado que use la Solución de Control.

IMPORTANTE: Cuando los resultados de su prueba no son consistentes ha cómo se siente, o cuando tenga resultados inesperados repetidos, realice una prueba de solución de control de POGO Automatic para confirmar que su sistema funciona correctamente.

Realización de una prueba de Solución de Control

Asegúrese de que haya un cartucho de prueba instalado y que queden pruebas. Encienda el medidor presionando el botón de encendido. Para preparar una nueva prueba, vuelva a presionar el botón de encendido.

Siga las instrucciones proporcionadas con su solución de control de POGO Automatic para realizar una prueba.

Para conocer la disponibilidad de la solución de control, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente de Intuity Medical.



NOTA: Los resultados de la prueba de la solución de control no se incluyen en los promedios de glucosa.



ADVERTENCIA: No consuma la solución de control; no es para consumo humano. No aplique la solución de control en la piel o en los ojos, ya que puede causar irritación. El aplicador de la solución de control POGO Automatic implica un riesgo de ahogamiento.

Resultados de la solución de control

El medidor lee el Rango de aprobado para las soluciones de control de Nivel 1 y Nivel 2 automáticamente desde el código de barra del cartucho y compara el resultado del rango para el nivel de control usado.

El rango se asigna como el valor promedio +/- 15%. La tabla de abajo ofrece un ejemplo del valor esperado para cada nivel de Control y el Rango de aprobado calculado que resulte.

Nivel de control	Respuesta promedio (mg/dL)	Valor esperado -15% (mg/dL)	Valor esperado +15% (mg/dL)	Rango de aprobado (mg/dL)
Nivel 1	75	64	86	64 - 86
Nivel 2	150	128	173	128-173

Resultados esperados para las Pruebas de la Solución de Control



Correcto **P**✓

Si el resultado de la prueba de la solución de control está dentro del rango, la pantalla muestra un resultado correcto, lo que indica que el medidor y el cartucho de prueba funcionan correctamente juntos. Usted está listo para realizar una prueba de glucemia.




Fallido **F**✗

Si usted recibe un resultado erróneo de Prueba de solución de control, esto indica que el valor está fuera del rango objetivo de la solución de control y debe repetir la prueba inmediatamente.

Una Prueba de solución de control errónea puede indicar:

- Solución de Control vencida o almacenada incorrectamente, a temperaturas muy altas o bajas.
- Cartuchos de prueba almacenados incorrectamente, dañados o vencidos.
- Un problema con el medidor.

Resultados inesperados para las Pruebas de la Solución de Control

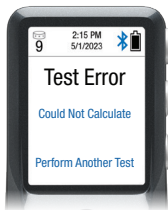


Error, sangre no observada o resultado de glucosa

Si se produce un error, no se observa sangre o se produce un resultado de glucosa, debe repetir la prueba de inmediato.

Un error puede indicar:

- Un problema con su método de análisis, por ejemplo, aplicar demasiada solución.
- Un problema con el cartucho, el dispositivo o la solución de control.

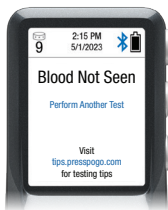

No se debe mostrar un resultado de glucosa para las pruebas de control. Un resultado de glucosa para una prueba de control puede indicar:

- Un problema con su método de análisis, por ejemplo, aplicar demasiada solución.
- Un problema con el cartucho, el dispositivo o la solución de control.



ADVERTENCIA: Si continúa obteniendo resultados fallidos, llame al Servicio de Atención al Cliente de Intuity Medical, de lunes a viernes, de 9 a. m. a 9 p. m. hora del este (ET), al 1-855-IMI-POGO (464-7646). **NO** utilice el medidor para analizar sus niveles de glucosa en la sangre hasta que obtenga un resultado correcto con la solución de control.

Memoria


Botón M

Acceso a memoria y modo de menú de configuración




Los botones de desplazamiento


se mueven hacia adelante y hacia atrás a través de los resultados en la memoria

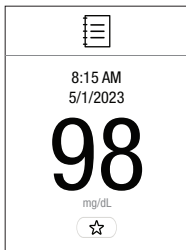

Resultado más reciente
del modo de memoria

Cómo recuperar resultados de la memoria

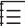En modo memoria, podemos visualizar los últimos 500 resultados de pruebas, además de los promedios de resultados. El símbolo  aparece indicando que está viendo los resultados de la memoria.

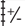El símbolo  indica que está visualizando promedios de resultados.



Cómo visualizar resultados de pruebas de la memoria









Presionar Desplazar




Ver resultados y registro



- Para ingresar al modo de memoria, presione y suelte el  botón (*consulte el diagrama anterior*). No lo mantenga presionado, ya que el medidor entrará en modo de configuración.
- El resultado más reciente aparece con fecha y hora. Si el resultado se marcó para comida, aparece el símbolo correspondiente con el resultado.
- Utilice los botones de desplazamiento  para desplazarse por la vista del registro.

		mg/dL
8:15 A 5/1		98
3:55 P 4/30		156
10:35 A 4/30	 	
8:25 P 4/29		222
8:25 A 4/28	 	

Vista del registro
del modo de memoria


		mg/dL
7 Day n = 31		86
14 Day n = 76		266
30 Day n = 100		251
90 Day n = 252		251


Modo promedios
7, 14, 30, 90 días

- Los resultados de la Solución de control aparecen como aprobados o desaprobados.
- Para salir del modo memoria cuando lo desee, presione el botón de encendido o permita que el medidor se apague automáticamente después de 30 segundos.

Promedios de 7, 14, 30 y 90 días

Puede visualizar sus promedios de resultados de los últimos 7, 14, 30 y 90 días. El medidor muestra los promedios para cada periodo de tiempo en una línea diferente.



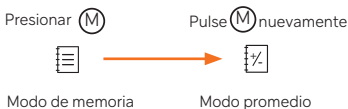





- Para acceder a sus promedios, presione el botón  nuevamente (consulte el diagrama a continuación) mientras está en modo de memoria. Sus promedios aparecen junto al número de resultados en cada promedio (n= # de resultados en promedio).




Revisión de promedios antes y después de las comidas

Si usted marcó resultados como previos o posteriores a comidas dentro de los últimos siete días, el medidor automáticamente los mostrará como promedios en la memoria junto al símbolo de la comida que corresponda.

- Para acceder a los promedios de 7 días previos y posteriores a la comida, presione el botón **(M)** nuevamente (consulte el diagrama a continuación) mientras se encuentra en el modo promedios. Sus promedios aparecen junto con el número de resultados en cada promedio ($n = \#$ de resultados en promedio) y el tiempo marcado antes/después de las comidas.

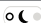7 day		mg/dL
n = 3		75
n = 2		81
n = 4		200
n = 5		95
n = 6		101
n = 6		123
n = 5		135

**Modo de promedios
antes y después de las
comidas**

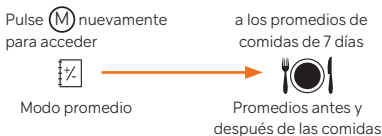

Ejemplo

**Glucosa en
sangre**

200 mg/dL

Descripción

Promedio de 4 resultados de glucosa en sangre marcados como posteriores al desayuno dentro de los últimos 7 días.

Sincronización de resultados con la aplicación Patterns

Emparejamiento de POGO Automatic® con su teléfono a través de Bluetooth

Su medidor POGO Automatic incluye conectividad Bluetooth, que le permite transferir los resultados de glucosa desde el medidor a su teléfono inteligente o computadora. Puede ver sus resultados y otra información de salud en la app Patterns® para POGO Automatic (*iOS y Android*) y en el sitio web de Patterns. Patterns está diseñado para que usted pueda cargar rápidamente, revisar y compartir resultados para fácilmente visualizar tendencias y ajustar su manejo de la diabetes.

Patterns para POGO Automatic están disponibles de forma gratuita para su descarga en las tiendas de aplicaciones de Apple y Android o en línea en **www.patternsforpogo.com**. Para transferir sus datos de POGO Automatic al sitio web de Patterns sin usar Bluetooth, puede utilizar un cable micro USB estándar.



IMPORTANTE: Mientras el medidor POGO Automatic está conectado a su computadora, la función de análisis de glucosa en sangre está desactivada. No intente realizar una prueba con POGO Automatic durante este tiempo.


Cómo enlazar su POGO Automatic®

Primero, asegúrese de haber descargado la aplicación Patterns en su teléfono inteligente. También debe tener el Bluetooth **ACTIVADO** en el teléfono. El medidor POGO Automatic activará automáticamente Bluetooth cuando inicie el proceso de emparejamiento. Para emparejar su POGO Automatic, siga los siguientes pasos:

Paso 1:


- Abra la aplicación Patterns® en su teléfono inteligente. Asegúrese de haber iniciado sesión en la aplicación.
- Presione su PERFIL. Desplácese hacia abajo hasta POGO Automatic y seleccione "Add POGO Automatic" (Agregar POGO Automatic).

Paso 2:

- Presione el botón  del medidor durante 4 segundos.
- Ignore las cuatro letras que aparecen en la pantalla.
- Su medidor proveerá un código pin de 6 dígitos para ingresar en su teléfono inteligente cuando se lo indiquen.
- Ingrese el código de 6 dígitos en su teléfono.

**Paso 3:**


- Presione "Pair" para confirmar.
- El medidor mostrará una pantalla "Connected" (Conectado) para mostrar que está emparejado.

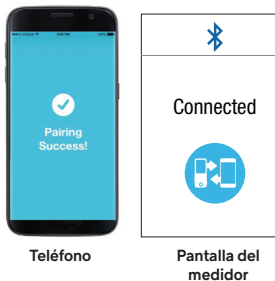

Configuración de su medidor

Cómo usar el menú de configuración

En el costado del medidor, busque los botones marcados con **(M)** y **◊**. Los usará durante la configuración.

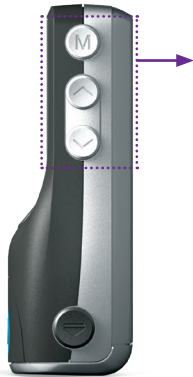

- Para ingresar a la configuración, mantenga pulsado el botón **(M)** durante tres segundos hasta que aparezca el menú de configuración.

- Para seleccionar un elemento del menú que desea cambiar, presione los botones de desplazamiento **◊**. La flecha parpadeante indica qué elemento del menú está cambiando.

- Presione el botón **(M)** para confirmar su elección y ver las opciones de configuración que puede cambiar para ese elemento.


- Para cambiar la configuración, utilice los botones de desplazamiento **◊** para encender o apagar los elementos o para aumentar o disminuir el valor de la configuración.


- Para finalizar, presione el botón **(M)**.

- En el menú de configuración principal, utilice los botones de desplazamiento **◊** para mover la flecha de selección al menú de configuración que desea cambiar. Presione el botón **(M)** para seleccionar.

- Para salir, presione el botón **⏻**.

Flecha de selección

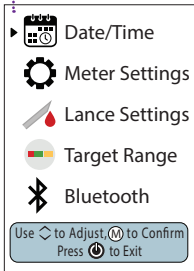

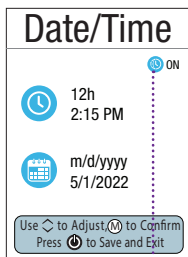

Símbolo de

hora automática

Cuando aparezca este símbolo, el medidor se ajustará automáticamente a la hora correcta en su teléfono inteligente (consulte la página 59).

Configuración de Hora/Fecha

Seleccione la configuración de hora/fecha en el menú principal de configuración (consulte la página 41).

Hora/Fecha


Siempre debe establecer la hora y la fecha para que los resultados de las pruebas puedan registrarse con la información correcta y los promedios puedan calcularse correctamente.

- Utilice los botones de desplazamiento para ajustar la configuración del campo intermitente y presione para confirmar y pasar al siguiente campo.
- Puede seleccionar el formato de hora para que sea el modo de 12 horas, que muestra el modo AM o PM (A o P) o el modo de 24 horas.
- Puede seleccionar el formato de fecha para que sea m/d/aaa, que muestra m/d/yyyy (m/d/aaaa or d/m/aaaa), que muestra día/mes/año
- Presione el botón de encendido para guardar los cambios y volver al menú *Main Settings* (Configuración principal)

Nota: El formato de fecha y hora no están disponibles inmediatamente después de insertar las baterías. Ingrese al menú de configuración desde el modo de suspensión para seleccionar los formatos de fecha y hora.

Configuración del medidor

Seleccione el menú Meter Settings (Configuración del medidor) del menú Main Set-Up (Configuración principal) (consulte la página 41).

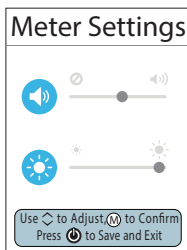


Sonido encendido

Volumen

El medidor utiliza pitidos para avisarle sobre lo que está sucediendo en la pantalla. Si lo prefiere, puede ajustar el nivel de volumen de estos pitidos o apagarlo completamente.

- En la configuración de volumen, utilice los botones de desplazamiento para seleccionar su preferencia de nivel de volumen. Presione el botón para confirmar la configuración.

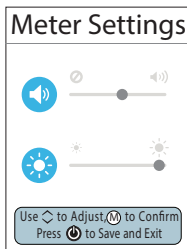


Ajuste del brillo

Brillo de la pantalla del medidor

El brillo de la pantalla del medidor se puede ajustar.

- En el ajuste de brillo, utilice los botones de desplazamiento para aumentar o disminuir el nivel. Presione el botón para confirmar la configuración.

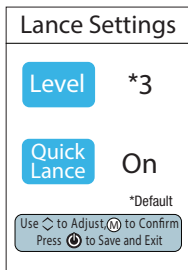

Configuración de la perforación



Seleccione el menú de configuración de la perforación en el menú Main Set-Up (Configuración principal) (consulte la página 41).

Puede cambiar la configuración de la perforación para que se ajuste a sus preferencias. El ajuste de nivel ajustará la presión de los dedos utilizada para iniciar una prueba y el vacío utilizados durante una prueba. El vacío ayuda al medidor a obtener la muestra de sangre durante las pruebas.

Nivel


El nivel de rendimiento predeterminado se establece en la fábrica en 3 y tiene los valores de vacío y presión de los dedos ajustados en valores medios.

Cuando los valores son más bajos, se requiere una menor presión de los dedos para iniciar una prueba, y el vacío durante la prueba disminuye. Cuando los valores son más altos, se requiere una mayor presión de los dedos para iniciar una prueba, y el vacío durante la prueba aumenta.

- Utilice los botones de desplazamiento  para seleccionar el nivel deseado. Presione el botón  para confirmar la configuración.

Perforación rápida

Establecer en "Off" (Apagado) para una cuenta regresiva de 3-2-1 antes de la perforación al inicio de una prueba. Configúrelo en "On" (Encendido) para lograr una perforación inmediata cuando presione con el dedo hacia abajo en el puerto de prueba (sin cuenta regresiva). Presione el botón de encendido para guardar los cambios y volver al menú Main Settings (Configuración principal).

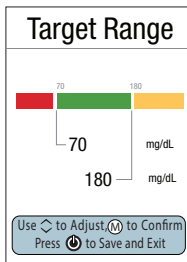

Configuración del rango objetivo

Seleccione el menú Target Range (Rango objetivo) del menú Main Set-Up (Configuración principal) (consulte la página 41).

El rango preestablecido es de 70 a 180 mg/dL. Puede cambiar el rango objetivo predefinido a su rango objetivo deseado.

Utilice los botones de desplazamiento para ajustar la configuración del campo intermitente y presione para confirmar y pasar al siguiente campo.

El objetivo bajo se puede establecer entre 60 mg/dL y 110 mg/dL. El objetivo alto se puede establecer entre 120 mg/dL y 300 mg/dL.

Presione el botón de encendido para guardar los cambios y volver al menú *Main Settings* (Configuración principal).




IMPORTANTE: Analice el rango objetivo con su profesional de atención de la salud.

Configuración del Bluetooth

Seleccione el menú Bluetooth Settings (Configuración de Bluetooth) del menú Main Set-Up (Configuración principal) (consulte la página 41).


Bluetooth y hora automática

- Desde el menú de configuración del Bluetooth, seleccione el símbolo de Bluetooth. Presione el botón (M) para confirmar la selección.
- Utilice los botones de desplazamiento ⏪ para **ACTIVAR** o **DESACTIVAR** EL BLUETOOTH. Presione el botón (M) para confirmar.
- El medidor incluye una función "Auto-Time" (Horario) que permite ajustar automáticamente a la hora actual cuando se sincroniza con tu teléfono. Puede **ACTIVAR** o **DESACTIVAR** esta función si sigue los mismos pasos que se indican anteriormente. Presione el botón (M) para confirmar.


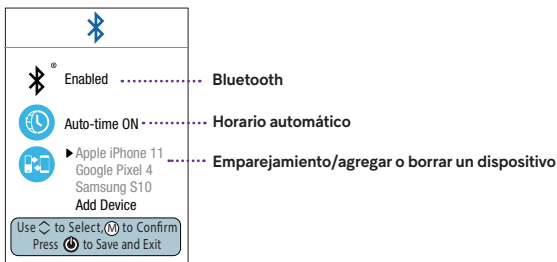


(Para enlazar POGO Automatic con su teléfono, consulte la página 39)

NOTA: Si el Bluetooth está desactivado, sus resultados no se sincronizarán con la aplicación Patterns (consulte la página 52 para obtener más información). Además, no se podrá acceder a la función "Auto-Time" (Horario automático). Para usarlo, active el Bluetooth.

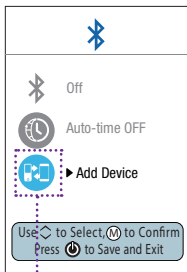

Símbolo de emparejamiento del medidor

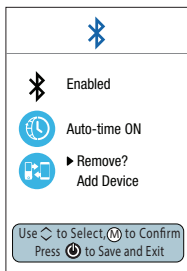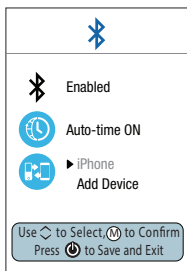

Emparejamiento de un dispositivo desde el menú de configuración

- Para agregar un dispositivo, utilice los botones de desplazamiento para mover la flecha intermitente al elemento de menú "Add Device" (Agregar dispositivo) junto al símbolo "Meter Pairing" (Emparejamiento del medidor).
- Presione el botón para ingresar a la pantalla de emparejamiento. Siga las instrucciones de la [página 39](#) para emparejar su medidor POGO Automatic con su teléfono.

Eliminar un dispositivo vinculado de POGO Automatic®

- Para quitar un dispositivo, utilice los botones de desplazamiento para seleccionar el dispositivo que desea eliminar.
- Presione el botón para confirmar. El dispositivo seleccionado estará parpadeando.
- Utilice los botones de desplazamiento para alternar entre el nombre del dispositivo y "Remove?" (¿Eliminar?)
- Presione el botón cuando el mensaje "Remove?" (¿Eliminar?) parpadee. El dispositivo será borrado.

Cuidado de su medidor POGO Automatic®

El medidor POGO Automatic y los cartuchos de prueba son para SU uso únicamente. No los comparta, incluso si es con familiares.

CUIDADO DE SU
POGO AUTOMATIC



PRECAUCIÓN: Limpie y desinfecte el medidor POGO Automatic DESPUÉS DE USAR CADA CARTUCHO y cuando esté visiblemente sucio. Limpie y desinfecte la plataforma de prueba A DIARIO. Siempre lávese las manos con agua y jabón después de manipular el medidor y los cartuchos de prueba, al retirar la plataforma de prueba o al abrir la puerta del cartucho.

Limpieza y desinfección: Un proceso de dos pasos

Debe seguir un proceso de limpieza y desinfección para quitar todo el material de riesgo biológico que haya quedado en cualquier parte del medidor. La limpieza es una parte de su régimen normal para quitar la suciedad y restos antes de la desinfección. No mata los gérmenes. La desinfección es el único modo de reducir su exposición a enfermedades infecciosas a través de la transmisión de sangre. Si la sangre es visible en cualquier parte o superficie del medidor, limpie y desinfecte DE INMEDIATO.



Ejemplo: Recipiente de Germicidal Wipes®

Suministros para la limpieza y la desinfección:

- Toallitas Clorox® Germicidal Wipes® (disponibles para todo público en Amazon.com, OfficeDepot.com y otras tiendas minoristas como Walmart). Las toallitas Clorox® Germicidal Wipes®, que contienen hipoclorito de sodio al 0.55 % como principio activo, son seguras de usar en todas las piezas y cartuchos del medidor.
- Un trozo de tela suave y libre de pelusas para las ópticas del medidor.

Plataforma de prueba**Limpieza DIARIA de la plataforma de prueba**

- Para quitar, abra la puerta del cartucho presionando el botón en el lado derecho más bajo del medidor.
- Levante y tire desde el extremo más cercano a la puerta del cartucho.
- Con una toallita Clorox Germicidal Wipe, limpie tanto la parte frontal como la parte posterior del puerto de prueba, incluido EL ORIFICIO INTERNO del puerto de prueba.

Desinfecte las superficies delantera y trasera de la plataforma de prueba

Desinfección DIARIA de la plataforma de prueba

Asegúrese siempre de que la sangre y los residuos visibles se limpien de la plataforma de prueba antes de manipularlos. (*Consulte la plataforma de prueba de limpieza A DIARIO más arriba*).



RECUERDE: Desinfecte dentro del orificio del puerto de prueba

- Con una **NUEVA** toallita Clorox Germicidal Wipe, limpie completamente las superficies frontal y posterior. Desinfecte el orificio del puerto de prueba empujando el paño al limpiar.
- Permita que la superficie de la plataforma de prueba permanezca húmeda durante un minuto, luego deje que se seque completamente al aire.
- Deje apagado hasta que el interior del medidor esté desinfectado.

Limpie TODA la suciedad de las superficies externas del medidor



... Botones

Limpieza del medidor DESPUÉS DE CADA CARTUCHO o SEMANALMENTE (lo que ocurra primero)

Es importante seguir correctamente todas las instrucciones. Primero, LIMPIE su medidor para quitar todos los restos. Utilice tantas toallitas Clorox Germicidal Wipes como sea necesario para limpiar **TODAS** las superficies del medidor.



NOTA: Asegúrese de quitar todo líquido en exceso de las toallitas antes de usarlas para impedir algún daño o mal funcionamiento del medidor.



Lente óptico


Limpie completamente el interior del medidor



Evite el exceso de líquido cerca de la puerta de la batería

- **Limpie el exterior del medidor:** limpie la parte delantera, la parte trasera, los lados y los botones de la caja del medidor.
- **Limpie el interior del medidor:** limpie completamente todas las paredes interiores y esquinas dentro del área del cartucho y las superficies de la puerta del cartucho.
- Limpie las piezas del medidor hasta que haya quitado toda la suciedad visible. Revise el área de la batería para ver si hay suciedad visible y límpiela si es necesario.
- Evite que ingrese suciedad, polvo, agua o líquido en exceso dentro de su medidor o cartuchos de prueba. Sea cuidadoso y evite que ingrese líquido en el puerto USB, en las baterías o en los contactos de la batería.

Evite el líquido en el puerto USB

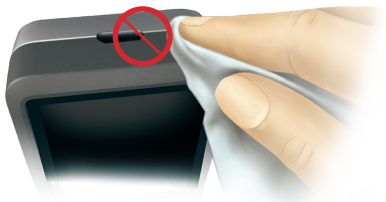

**NO REMOJE EL
MEDIDOR EN AGUA.**

CUIDADO DE SU POGO
AUTOMATIC

ADVERTENCIA: Todos los suministros para pruebas de POGO Automatic se consideran de riesgo biológico y pueden potencialmente transmitir enfermedades infecciosas, incluso luego de que usted los haya limpiado y desinfectado. Lave sus manos con agua y jabón inmediatamente luego de su uso.



Asegúrese de desinfectar todas las superficies exteriores del medidor, incluyendo los botones y las ranuras.

Desinfección del dosificador exterior **DESPUÉS DE CADA CARTUCHO o SEMANALMENTE** (lo que ocurra primero)

Inmediatamente después de la limpieza, utilice una **NUEVA** toallita Clorox Germicidal Wipe para desinfectar **TODAS** las superficies externas del medidor.

- Preste especial atención y limpie con cuidado los espacios, ranuras y alrededor de los botones en la carcasa del medidor.
- Permita que la superficie exterior permanezca húmeda durante un minuto, luego deje que se seque al aire.

Área del cartucho



Abridor de la prueba

Lector de código de barras

Torre de cartuchos

Desinfección del interior del medidor

Después de realizar la prueba, chequee dentro de su medidor en busca de sangre, incluyendo la puerta del cartucho. Limpie y desinfecte **INMEDIATAMENTE** si hay sangre. Cualquier pieza interior que haya limpiado debe desinfectarse con una **NUEVA** toallita Clorox Germicidal Wipe. Asegúrese de desinfectar **DESPUÉS DE CADA CARTUCHO O SEMANALMENTE**, lo que ocurra primero. (Para limpiar, consulte *Limpieza del dosificador DESPUÉS DE CADA CARTUCHO o SEMANALMENTE* en la página 50).

PRECAUCIÓN: No sustituya otros limpiadores domésticos (p. ej., Windex®, Lysol® o alcohol) por las toallitas Clorox® Germicidal Wipes® para garantizar una desinfección adecuada y evitar daños o mal funcionamiento del medidor. Otros productos, tal como Clorox® Disinfecting® Wipes, no han sido probados y no deben usarse.



Desinfecte todas las superficies del medidor interior, incluida la puerta de la batería y la puerta del cartucho

Desinfección del área interior del cartucho

- Abra la puerta del cartucho y quite el cartucho si fuese necesario.
- Con el movimiento hacia la derecha, limpie todas las paredes interiores del medidor y todas las esquinas y superficies de la puerta del cartucho con la nueva toallita Clorox Germicidal Wipe.
- Es seguro desinfectar completamente todas las superficies internas del área del cartucho, incluidos el dispositivo de apertura de pruebas y el lector de código de barras.
- Deje que la superficie interna permanezca húmeda durante un minuto, deje que el interior del dosificador se seque al aire.



Puerta de la batería

Desinfección de la tapa de la batería

- Retire la tapa de la batería del dosificador.
- Limpie los bordes circundantes del compartimento de la batería y la superficie interna de la puerta durante un mínimo de 30 segundos con una nueva toallita germicida Clorox.
- Permita que la superficie permanezca húmeda durante un minuto, luego deje que se seque al aire.
- Vuelva a colocar la tapa de la batería en la parte posterior del medidor.



IMPORTANTE: No aplique demasiado líquido; tampoco permita que este corra o esté alrededor de componentes internos.

Limpe suavemente la óptica del medidor con un paño suave que no suelte pelusa para eliminar cualquier residuo que quede de la desinfección.



No toque el lente directamente con los dedos

Cuidado de las ópticas del medidor

- Las ópticas del medidor son similares a los lentes de un par de anteojos y puede ocasionalmente juntar polvo o suciedad. Limpie cuidadosamente la óptica para desinfectar. Tenga cuidado de no tocar la lente con los dedos.
- Permita que la superficie de la óptica permanezca húmeda durante un minuto, luego deje que se seque al aire.
- Limpie suavemente la lente óptica con un paño suave que no deje pelusa para eliminar cualquier residuo que quede de la toallita desinfectante.

Reemplace la plataforma de prueba

Reemplace la plataforma de prueba:



- Sujete la plataforma de prueba por cualquiera de las esquinas inferiores e inserte la lengüeta superior en la ranura abierta del medidor.
- Encaje las dos lengüetas inferiores en su lugar.
- Asegúrese de que la plataforma esté completamente en su lugar antes de realizar la prueba.



Alinee las lengüetas y encaje en su lugar

Ciclo de vida útil de tres años para el medidor y las piezas del medidor

Cuidado	Uso de ejemplo	Ciclos
Desinfección y limpieza diaria de la plataforma de prueba	365 días x 3 años	1095 Ciclos
	Total probado	1100 Ciclos
Limpieza y desinfección del medidor después de cada cartucho o semanalmente	Cada 1.5 días x 3 años	730 Ciclos
	Total probado	730 Ciclos

*La vida útil esperada del medidor es tres años.

IMPORTANTE: Si tiene preguntas acerca de la limpieza o desinfección de su medidor de POGO Automatic, llame al Servicio de Atención al Cliente de Intuity Medical al 1-855-IMI-POGO (464-7646). Si nota signos de deterioro, interrumpa el uso y llame al Servicio de Atención al Cliente de Intuity Medical para averiguar sobre el reemplazo. Algunos ejemplos de daños o mal funcionamiento del medidor incluyen: pantalla empañada, pantalla o caja agrietada, etiquetas ilegibles, botones que no funcionan, error al pasar a la siguiente prueba, puerta del cartucho no abierta, medidor que no pasa la prueba, puerto de prueba que parece agrietado o roto, mensajes de error repetidos o varias pruebas de solución de control fallidas.

DOCUMENTOS IMPORTANTES DE SEGURIDAD PARA SU REFERENCIA

"FDA Public Health Notification: Use of Use of Fingertick Devices on More Than One Person Poses Risk of Transmitting Bloodborne Pathogens: Initial Communication" (2010) <http://wayback.archive-it.org/7993/20170111013014/http://www.fda.gov/medicaldevices/safety/alertsandnotices/ucm224025.htm>

"CDC Clinical Reminder: Use of Fingertick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Bloodborne Pathogens" (2010) <http://www.cdc.gov/injectionsafety/Fingertick-DevicesBGM.html>

**Batería baja****Batería descargada**

Reemplazo de baterías

El medidor de POGO Automatic viene con dos pilas AAA en la parte inferior de la caja del medidor. Las baterías deben durar para realizar aproximadamente 500 pruebas. Cuando la carga de la batería es baja, aparece un símbolo de batería baja en la barra de estado. Cuando esto ocurre, el medidor tiene energía suficiente para unas 50 pruebas. La precisión no se verá afectada. Sin embargo, debería cambiar la batería tan pronto como pueda.

Quitar las baterías no afectará la memoria del medidor o los ajustes previamente almacenados. La fecha y hora se restaurarán a la última hora y fecha que se muestra antes de extraer la batería.



IMPORTANTE: Cuando aparece el símbolo de batería descargada, su medidor de POGO Automatic no realizará una prueba. Cambie las baterías **inmediatamente**.

**Quite las baterías****Inserte baterías nuevas**

- Quite la puerta de la batería en la parte de atrás del medidor deslizando la puerta hacia el extremo abierto del medidor.
- Quite y descarte las baterías alcalinas usadas de acuerdo a las reglamentaciones locales ambientales.
- Instale dos baterías AAA alcalinas nuevas en el compartimiento de la batería. Asegúrese de alinear los extremos positivo y negativo según lo indicado en la etiqueta dentro del compartimiento.



Vuelva a colocar la tapa de la batería

- Si las baterías están instaladas correctamente, el medidor mostrará una pantalla de arranque seguida de un tutorial con botones.
- Vuelva a colocar la tapa de la batería alineando la lengüeta de la parte inferior de la tapa de la batería con la ranura del medidor hacia atrás y deslice hacia abajo para instalar en su lugar.



NOTA: Asegúrese de establecer la fecha y la hora correctas en su medidor antes de realizar la prueba (*consulte Configuración de su medidor en la página 41*).



Frío



Caliente

Símbolos fuera del rango de temperatura

Almacenamiento y manipulación

- Almacene POGO Automatic a temperatura ambiente entre 40°F y 86°F y dentro de un rango de humedad relativa de 10% a 90% (sin condensación).
- Para obtener mejores resultados, utilice POGO Automatic entre 50°F y 104°F (temperatura de funcionamiento).
- Si aparece el símbolo de temperatura en la pantalla del medidor de POGO Automatic, permita que el medidor y los cartuchos se ajusten al rango de temperatura de funcionamiento antes de realizar la prueba.
- Utilice el sistema POGO Automatic en un rango de humedad relativa de 10% a 90% (sin condensación).

Solución de problemas

Códigos de error y alertas

El medidor de POGO Automatic muestra alertas y mensajes de error específicos cuando detecta un problema. Cuando aparezca un mensaje de alerta o de error, siga las instrucciones en pantalla o consulte la siguiente lista para obtener información sobre cómo proceder. Si el mensaje de alerta o error permanece después de utilizar la información, llame al número gratuito del Servicio de Atención al Cliente de Intuity Medical al **1-855-IMI-POGO (464-7646)**.

Pantalla de error

Qué significa

Qué hacer

Test Error

Not Enough Blood
Perform Another Test

Select a finger that
bleeds well. Massage
until warm and reddish.

No se recolectó suficiente sangre para completar la prueba.

Repita la prueba después de frotar el dedo para aumentar la circulación.

Test Error

Could Not Calculate

Perform Another Test

El medidor no pudo calcular el resultado de glucosa en sangre.

El medidor no leyó la banda.

Repita la prueba.

Blood Not Seen

Perform Another Test

Visit
tips.presspogo.com
for testing tips

No se extrajo sangre en la tira de prueba.

Repita la prueba después de frotar el dedo para aumentar la circulación.

Elija el sitio de prueba sin callosidades, piel gruesa (*consulte Sugerencias útiles en la página 22*).

Pantalla de error**Qué significa****Qué hacer**

No Tests Remaining
Insert New Cartridge

No quedan pruebas en el cartucho.

Abra la puerta e inserte un cartucho nuevo.



No Cartridge in Meter
Insert New Cartridge

El cartucho de prueba no está insertado.

Abra la puerta e inserte un cartucho nuevo.

Meter Error

Finger Stalled Cartridge
Could not prepare test.



Re-Insert Cartridge

El cartucho no giró al prepararse para una prueba.

- **NO** coloque su dedo en el puerto de prueba hasta que se le indique
- Quite y reinserte el cartucho.

Meter Error

Meter issue



Re-Insert Cartridge

- Es posible que haya ocurrido un problema con el medidor.
- El medidor no realizó la perforación.
- El sello de prueba no se abrió.
- El medidor no pudo iniciar una perforación.
- Retire y vuelva a insertar el cartucho de prueba.
- Intente probar con un cartucho nuevo.
- Inserte baterías nuevas

Pantalla de error**Qué significa****Qué hacer****Meter Error**

Bluetooth Issue



Re-Insert Cartridge

Se produjo un problema de Bluetooth

- Vuelva a insertar el cartucho para borrar el error

Meter ErrorCartridge Stalled
Could not prepare test.

Re-Insert Cartridge

El medidor no puede girar el cartucho

- Vuelva a insertar el cartucho para borrar el error

Test Error

Optics Issue

Perform Another Test

Polvo o suciedad en el cartucho o el medidor.

- Repita la prueba
- Si el problema persiste, retire el cartucho y limpie suavemente la óptica con un paño suave y seco que no deje pelusa. (*Consulte Cuidado de las ópticas del medidor en la página 53*).
- Intente probar con un cartucho nuevo.

Barcode Error

Could Not Read

Re-Insert Cartridge

El medidor no pudo leer los datos del código de barras del cartucho.

Reinserte el cartucho Si el error se repite, inserte un cartucho nuevo.

Pantalla de error**System Error**

Re-Insert Batteries

Qué significa

Se produjo un problema con el medidor.

Qué hacer

Retire las baterías, mantenga presionado el botón de encendido durante al menos 3 segundos. Vuelva a insertar las baterías.

Cartridge Error


Expired Cartridge

Discard XX Days
After Opening

El cartucho de prueba ha caducado y ha pasado la fecha de caducidad abierta.

(XX = la cantidad de días desde el momento en que se abrió el recipiente de papel de aluminio del cartucho. El medidor mostrará esto como un número).

Inserte un cartucho de prueba nuevo.

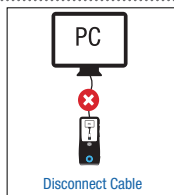

Disconnect Cable

La prueba se inició con el cable conectado a la computadora o al cable conectado durante la prueba.

Desenchufe el medidor de la PC antes de iniciar una prueba.



El puerto USB es solo para transferencia de datos.

NO intente recargar el medidor con el puerto USB.

Si se producen otras situaciones, como el medidor, no se enciende después de reemplazar las baterías o no se puede retirar el cartucho, llame a Atención al Cliente de Intuity Medical al **1-855-IMI-POGO (464-7646)**.

Especificaciones técnicas

Tecnología Bluetooth®:

Rango de frecuencia: de 2.4 a 2.485 GHz

Canales de operación:

40 canales

Distancia de rango de funcionamiento:
mínimo de 26.25 pies (sin obstrucciones)

Cifrado de seguridad:

AES de 128 bits

(estándar de cifrado avanzado)

Estándares eléctricos y de seguridad

El medidor POGO Automatic cumple con los estándares aplicables de compatibilidad electromagnética; no obstante, se recomienda no utilizarlo en presencia de campos electromagnéticos intensos.

Dado que el medidor POGO Automatic es un dispositivo electrónico, debe seguir todas las normas ambientales locales para su desecho.


Tecnología inalámbrica Bluetooth®

El medidor POGO Automatic utiliza tecnología Bluetooth de baja energía para comunicar y transferir información de manera opcional a su teléfono inteligente. La tecnología inalámbrica Bluetooth es una forma de tecnología de radiofrecuencia (RF) que funciona en la banda industrial, científica y médica sin licencia, de 2.4 a 2.485 GHz. El canal de RF utilizado para comunicación entre el medidor y otros dispositivos, tal como el teléfono inteligente, no es un canal abierto. Su medidor cumple con los estándares de la Comisión Federal de Comunicación de Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés). Este medidor se sometió a pruebas y se comprobó que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, según las Reglas de la Parte 15 de la FCC. El funcionamiento del dispositivo está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) este dispositivo puede aceptar interferencia recibida, lo que incluye la interferencia que puede provocar un funcionamiento no deseado. El cumplimiento de estos lineamientos significa que bajo circunstancias diarias normales, el dispositivo no debe afectar la operación de otros dispositivos. Además, el dispositivo debe funcionar normalmente en la presencia de otros dispositivos. En caso de que otro dispositivo produzca interferencias, se recomienda tomar las siguientes medidas:

- Aumentar la distancia entre el medidor y ese dispositivo.
- Apagar el dispositivo que causa la interferencia.
- Además, puede desactivar la tecnología inalámbrica Bluetooth en el medidor.

Obtención de la ID de FCC

Paso 1:


- Cuando el medidor esté inactivo (la pantalla esté negra), mantenga presionado el botón  durante **3 segundos** y aparecerá la pantalla de número de serie.



Mantenga presionado el botón durante 3 segundos

Aparece el número de serie

Paso 2:

- Presione el botón  para acceder a las etiquetas reglamentarias y la ID de FCC se mostrarán en las etiquetas reglamentarias.



Presione el botón para acceder a las etiquetas reglamentarias

Se muestra la ID de FCC

Especificaciones del medidor

Pantalla:	LCD
Apagado automático:	60 segundos después del resultado de la prueba
Suministro de energía:	dos baterías alcalinas AAA (no usar recargables)
Vida útil de la batería:	aproximadamente 500 pruebas
Altitud:	Hasta 10,000 pies
Tamaño:	4" x 2" x 1.5"
Peso:	3.4 onzas con baterías
Fuente de sangre:	sangre completa
Tamaño de la muestra:	250 nanolitros (.25 microlitros)
Método de ensayo:	glucosa oxidasa
Calibración:	calibrado con plasma
Rango de resultado:	De 20 mg/dL a 500 mg/dL
Unidad de medida:	mg/dL
Rango de hematocrito:	De 20% a 60%
Temperatura de funcionamiento:	50°F a 104°F (solución de control y glucosa en sangre)
Temperatura de almacenamiento:	40°F – 86°F
Almacenamiento y funcionamiento	
Humedad:	10% – 90% (sin condensación)
Capacidad de memoria:	500 resultados de prueba
Tiempo de prueba:	conteo regresivo de 4 segundos

Características de rendimiento

Consulte el prospecto del cartucho de prueba de POGO Automatic para obtener más información sobre la exactitud y precisión.

Símbolos comunes




Precauciones y advertencias: Consulte las notas relacionadas con la seguridad en este manual y otra información de POGO Automatic suministrada.



Para un solo uso. No volver a usar.



Almacenar a temperatura ambiente entre 40°F y 86°F.

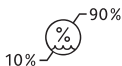

Almacenar a una humedad relativa de entre el 10% y el 90%.



Estéril (lancetas no utilizadas en cartuchos)



Código de lote



Dispositivo médico de diagnóstico *in vitro*.



Consultar instrucciones de uso.



Fabricante



Fecha de
ejemplo

Fecha de vencimiento de "Caducidad" del fabricante en el empaque

Garantía limitada del medidor de glucosa en sangre POGO Automatic®

Intuity Medical garantiza que el medidor de glucosa en sangre POGO Automatic, cuando se usa de acuerdo con las pautas de nuestro producto, funcionará en todos los aspectos materiales de acuerdo con sus especificaciones y estará libre de defectos materiales y de mano de obra bajo un uso normal durante un período de un (1) año a partir de la fecha original de compra (el “Período de garantía del medidor”).

Si, durante el Período de garantía del medidor, el medidor no funciona como se especifica, aceptamos reemplazarlo con un nuevo medidor de glucosa en sangre POGO Automatic o un producto equivalente sin cargo. La garantía del reemplazo vencerá en la fecha de vencimiento de la garantía original o 90 días después del envío de un sistema de reemplazo, el período que sea mayor. Su único y exclusivo recurso con respecto al incumplimiento de esta garantía limitada será, a nuestro criterio, reparar o reemplazar el medidor de glucosa en sangre POGO Automatic. Esta garantía limitada cubre solo el medidor, no cubre los accesorios desechables, se extiende solo al comprador original y no es asignable ni transferible.

.....

Exención de responsabilidad de la Garantía del cartucho POGO Automatic®

El cartucho POGO Automatic se proporciona “TAL CUAL”, sin ninguna garantía de ningún tipo. Algunos estados no permiten la exclusión de garantías, por lo que la exclusión antes mencionada puede no aplicarle.

.....

Reclamos y preguntas sobre la garantía

Llame a nuestro Servicio de Atención al Cliente de Intuity Medical al número gratuito 1-855-IMI-POGO (464-7646) para cualquier pregunta o reclamo sobre la garantía. Todas las solicitudes de devolución de cualquier producto deben hacerse al Servicio de Atención al Cliente de Intuity Medical. Le indicaremos el procedimiento necesario para la reparación o reemplazo de los productos que correspondan. NO devuelva ningún producto a Intuity Medical sin nuestra autorización, todo producto devuelto recibido sin nuestra autorización previa le será devuelto a costo suyo.

Para asegurarse de recibir atención al cliente de Intuity Medical oportuna y útil y actualizaciones de productos actuales, le recomendamos que complete y envíe inmediatamente la tarjeta de garantía de POGO Automatic suministrada o registre su medidor con nosotros en línea.

Exención de responsabilidad sobre la garantía

Nuestras garantías limitadas y políticas de devolución no aplican a:

- (a) desgaste y otros daños cosméticos normales en cualquier unidad de producto;
- (b) daños causados por accidente, abuso, uso indebido, derrame de alimentos, rociado con líquidos, almacenamiento inadecuado, almacenamiento o uso fuera de las temperaturas de funcionamiento especificadas, fenómenos naturales, modificación o alteración de cualquier unidad de producto o software, u otras causas externas;
- (c) daños causados por el uso de los productos fuera de nuestras pautas de productos;
- (d) pérdida de datos almacenados en el medidor de glucosa en sangre POGO Automatic o a través de nuestras aplicaciones móviles o de alojamiento web; o
- (e) cualquier unidad obtenida o utilizada en violación de la ley, o que haya eliminado, deteriorado o alterado el número de serie u otra información de identificación.

LAS GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON LAS GARANTÍAS EXCLUSIVAS PARA LOS PRODUCTOS Y, HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY QUE CORRESPONDA SE PROVEEN EN LUGAR DE, Y NOSOTROS EXPRESAMENTE RECHAZAMOS, TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN TODA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, ADAPTACIÓN PARA UN FIN ESPECÍFICO, TÍTULO Y NO VIOLACIÓN.

ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS O LAS LIMITACIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE LAS EXCLUSIONES Y LIMITACIONES ANTES MENCIONADAS PUEDEN NO APLICAR A SU CASO.

Limitación de responsabilidad

EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES ANTE USTED O NINGÚN TERCERO QUE RECLAME A TRAVÉS DE USTED, POR CUALQUIER LUCRO CESANTE, PÉRDIDA DE USO, PÉRDIDA DE DATOS, EQUIPO O TIEMPO DE INACTIVIDAD DEL SOFTWARE NI POR CUALQUIER DAÑO DIRECTO, ESPECIAL O CONSECUENTE QUE SURJA RELACIONADOS CON LA COMPRA O EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PRODUCTOS, INCLUYENDO CUALQUIER COSTE DE RECUPERACIÓN,

PROGRAMAR O REPRODUCIR CUALQUIER CONTENIDO, INFORMACIÓN O DATOS ALMACENADOS O UTILIZADOS CON EL MEDIDOR AUTOMÁTICO DE GLUCOSA EN SANGRE POGO O CUALQUIER FALTA DE MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD DEL CONTENIDO, LA INFORMACIÓN O LOS DATOS ALMACENADOS EN EL MEDIDOR AUTOMÁTICO DE GLUCOSA EN SANGRE POGO, INCLUSO SI NOS HAYAN ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY QUE CORRESPONDA, NUESTRA RESPONSABILIDAD AGREGADA MÁXIMA HACIA USTED, O HACIA UN TERCERO QUE RECLAME A TRAVÉS DE USTED O BAJO USTED, EN DAÑOS O DE ALGUNA OTRA MANERA, NO DEBERÁ EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA PAGADO A NOSOTROS DE SU PARTE POR EL PRODUCTO QUE DIO LUGAR AL RECLAMO DE GARANTÍA.

Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños indirectos, por lo que la exclusión o limitación antes mencionada puede no aplicar a usted.

.....

POGO, POGO AUTOMATIC, PATTERNS, INTUITY MEDICAL, INTUITY MEDICAL SIMPLIFYING DIABETES, el LOGO I y POGO PRESS. TEST. GO. son marcas registradas de Intuity Medical, Inc.

La marca de la palabra Bluetooth y los logos son marcas comerciales registradas de propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y todo uso de tales marcas por parte de Intuity Medical, Inc. es bajo licencia.

El logo de APPLE, APP STORE son marcas comerciales registradas de Apple, Inc. GOOGLE PLAY es una marca registrada de Google Inc.

.....

Referencias

1. The Diabetes Control and Complications Trial Research Group: The effect of intensive treatment of diabetes and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. N Eng J Med 1993; 329:977-986
2. Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications (EDIC) Study. New England Journal of Medicine. 2005.353(25)
3. American Diabetes Association Standards of Medical Care in Diabetes, Diabetes Care 39: Supplement 1, S1-S112, January 2016.

la página se dejó en blanco intencionalmente

la página se dejó en blanco intencionalmente



intuity[®] | Simplifying Diabetes[®]
MEDICAL

3500 West Warren Avenue, Fremont, CA 94538

1-855-IMI-POGO (464-7646)

www.presspogo.com

Diseñado por Intuity Medical, Inc. en California.

Fabricado para Intuity Medical, Inc. en México.

© 2024 Intuity Medical, Inc. Todos los derechos reservados
ART03408B Rev 01/2024

La información sobre patentes está disponible en www.presspogo.com/patents