
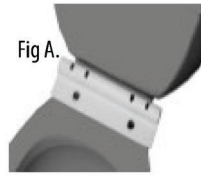


Hinged Riser Elongated/Regular with Arms Installation

1. Component list

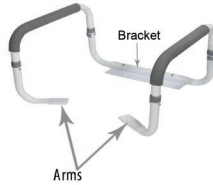



2. Assembly Instructions

1. Remove all parts from the box
2. Remove the existing toilet seat and lid from toilet.
3. Place the toilet safety Frame Bracket between the toilet opening and the tank with the rounded part of the bracket closest to the tank. See Fig. A. The holes on the bracket should line up with the mounting holes on the toilet.
4. Place the Riser on toilet seat flat then put the original seat, and lid on the Riser and align the holes. See Fig. B. 5. Reinsert screws through the Seat, Riser, Bracket, and then through the toilet.
6. The product must be tightened with the screw assembly.
7. Attach the armrest frame. Push in on the spring loaded locking pin until the push pin engages into the first hole. There should be an audible "click" when the push pin engages.

Note: Weight capacity 300 lbs

Instalación del asiento elevado estándar o alargado con bisagra y reposabrazos

1. Lista de componentes

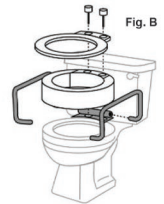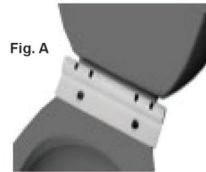

2. Ensamblaje

1. Retire todas las piezas de la caja.
2. Retire el asiento y la tapa actuales de la taza.
3. Arregle el soporte del marco de los reposabrazos entre la apertura de la taza y el tanque colocando el extremo redondo del soporte en el lado del tanque (consulte la Fig. A). Los orificios en el soporte deben alinearse con los orificios de montaje en la taza.
4. Alineando los orificios, coloque el elevador sobre la taza, superado por el asiento original y su tapa (consulte Fig. B).
5. Inserte los pernos en la tapa, el asiento, el elevador, el soporte y la taza.
6. Asegure todo firmemente apretando los dos tornillos.
7. Instale el marco de los reposabrazos. Empuje los extremos de los tubos en el soporte presionando los pasadores de resorte. Se oye un clic cuando los pernos encajen en su lugar los reposabrazos.

Nota: Capacidad de 135 kg (300 lb)