



Onderdelen

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. Handgreep | 8. Voorwiel |
| 2. In hoogte verstelbare buis | 9. Schroef om rem af te stellen |
| 3. Remhendel | 10. Achterwiel |
| 4. Afstelmek | 11. Veiligheidsclip |
| 5. Rugleuning | 12. Liftpedaal |
| 6. Zitting | 13. Stokhouder |
| 7. Haken voor tas | |

Introductie

Dit loophulpmiddel is geschikt voor personen met verminderde mobiliteit. De Neptune Rollator is ideaal voor indoor en outdoor gebruik.

De Neptune rollator is inclusief


- Rugleuning
- Stokhouder
- Bekerhouder
- Handleiding
- Rollatortas
- Zwenkbare 8"PU voorwielen en 7"PU achterwielen

Rollator openklappen

Maak de veiligheidsclip los en trek de handgrepen uit elkaar **(afbeelding 1)**.

Duw de zijbuizen van de zitting naar beneden totdat u een klik hoort **(afbeelding 2)**.

Controleer voor gebruik of de rollator op de juiste manier is opengeklapt.

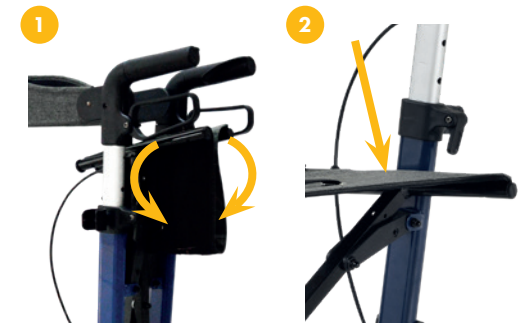

Hoogte instellen

Trek de afstelmek omhoog en stel de handgreep op de gewenste hoogte in.

Zorg dat de pin in het gaatje valt. Duw de klem vervolgens naar beneden. De handgreep zit nu vast op de gewenste hoogte **(afbeelding 3)**.



Tas bevestigen en verwijderen

Bevestig de tas op de hiervoor bestemde haken aan de voorkant van de zitting (afbeelding 4 & 5).



Remmen en op slot zetten

Knijp beide remhendels normaal in om te remmen als u met de rollator loopt (afbeelding 6).

Rem altijd voorzichtig.

Als de rollator niet in gebruik is, kunt u deze op slot zetten (parkeerstand) door beide remhendels naar beneden te duwen (afbeelding 7).

Knijp de remhendels weer in om ze van de parkeerstand te halen. De remwerking kan door slijtage van de wielen slechter worden. Controleer regelmatig de remwerking van de rollator.



Remweerstand afstellen

Om de remweerstand af te stellen, tilt u de remkabel op (afbeelding 8), en draait u vervolgens het schroefje omhoog of naar beneden (afbeelding 9).



Zitten

Plaats de rollator op een vlakke ondergrond. Zet de rollator op slot (parkeerstand). Zorg dat de rollator blijft staan en niet wegglijdt. Ga rechtop zitten en leun niet achterover (afbeelding 10).

BEWEG DE ROLLATOR NIET TERWIJL U ZIT.



Opvouwen en opbergen

Om de rollator op te vouwen, trekt u de hendel van de zitting omhoog (afbeelding 11).

De rollator kan nu helemaal opgevouwen worden en met de veiligheidsclip vastgezet worden (afbeelding 12).



Liftpedaal

Met behulp van de geïntegreerde liftpedaal kan een drempel eenvoudig genomen worden (afbeelding 13).

Zet uw voet op het liftpedaal en trek de handgrepen naar achteren. De voorwielen komen hierdoor omhoog en zo kunt u eenvoudig drempels of stoeranden overbruggen.



Stokhouder

De elegante stokhouder bestaat uit twee delen: een haakje bovenaan en een inklapbare houder onderaan. Handig om uw kruk of wandelstok mee te nemen.



Bekerhouder

Met de bekerhouder zijn drinkflesjes of blikjes eenvoudig mee te nemen.



Veiligheidsinstructies

- Gebruik uitsluitend als loophulpmiddel!
- Maximaal gebruikersgewicht 120 kg.
- Controleer regelmatig de schroefjes en draai indien nodig aan.
- Gebruik de tas uitsluitend om spullen in te vervoeren en houd u aan het maximaal voorgeschreven draaggewicht van 5 kg.
- Stel de rollator niet langdurig bloot aan een temperatuur van boven de 40°C. Hierdoor kunnen onderdelen mogelijk oververhit raken en dit is gevaarlijk voor de gebruiker.
- Controleer voor gebruik of de rollator op de juiste manier is opengeklapt. Duw de zitting naar beneden tot u een klik hoort.
- Controleer of beide handgrepen goed vast zitten en op gelijke hoogte zijn ingesteld. Test de stabiliteit van de rollator voordat u met vol gewicht op de handgrepen steunt.
- Controleer de remwerking voordat u de rollator gebruikt. Als de wielen op slot staan, moet het remblok op de achterwielen voorkomen dat de wielen bewegen. Als de rem van de wielen is, moeten de wielen weer kunnen bewegen.
- Zet de rollator met de remhendel op slot alvorens plaats te nemen op de zitting. Ga niet zitten als de rollator op een helling of ongelijke ondergrond staat.
- Vervang de wieltjes bij slijtage of beschadiging.
- **BEWEEG DE ROLLATOR NIET TERWIJL U ZIT.** Dit is een loophulpmiddel en kan niet als vervoersmiddel worden gebruikt.

Reinigen en onderhoud

Maak de rollator regelmatig schoon met een vochtige doek. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.

Specificaties

Lengte: 65 cm
 Breedte: 60 cm
 Breedte opgevouwen: 22 cm
 Verstelbare hoogte: 87 – 105 cm
 Zithoogte: 60 cm
 Gewicht: 7,1 kg
 Maximaal gebruikersgewicht 120 kg

Neptune Rollator



PR30265-BK

Neptune Rollator Black
Neptune Rollator Zwart
Neptune Déambulateur Noir



PR30265-CH

Neptune Rollator Champagne
Neptune Rollator Champagne
Neptune Déambulateur Champagne



MADE IN
CHINA

Benelux

+31(0)168 331133 www.able2.nl

UK

+44(0)1254 619000 www.able2.eu

Spain

+34 966 087071 www.able2.es

Aids to daily living

Able2