

Gebruiksaanwijzing Provo rollators

LET OP!

Cursief gedrukte groene tekst betreft uitsluitend het gebruik van de 3^e generatie Provo rollatoren.

DIENBLAD

Op het dienblad kunt u bijvoorbeeld uw thee- of koffiekopjes zetten, om deze veilig mee te nemen.

Alleen voor de 3^e generatie Provo rollator. Altijd het dienblad op de Provo rollator van de 3e generatie laten. Voor de 3e generatie is dit tevens het deksel voor de mand

BOODSCHAPPENMAND

In de boodschappenmand kunt u makkelijk boodschappen mee nemen. U kunt de mand er zeer eenvoudig af halen om deze leeg te maken. Let op dat u bij het aanbrengen van de mand de remkabels niet knakt of klemzet. Maximum laadgewicht 5 kg.

BOODSCHAPPENVAK

Op het boodschappenvak kunt u uw boodschappentas zetten als u de mand niet in gebruik heeft.

WANDELSTOK- EN ELLEBOOGKRUUK-HOUDER

In de wandelstok- en elleboogkrukhouders kunt u eventueel uw wandelstok of elleboogkruk plaatsen. De houder is geschikt voor wandelstokken of elleboogkrukken met een diameter van 18 tot 22 mm.

OPBERGEN EN IN AUTO, BUS, TREIN ENZ. VERVOEREN

Haal het dienblad en de mand van de Provo rollator af en u kunt de rollator inklappen door de opklapbeveiliging in te drukken. Trek de horizontale stang onder het zitje, in zijn geheel omhoog. Hiermee is de Provo rollator opgeklapt. (zie ook de AUTOMATISCHE OPKLAP-BEVEILIGING verderop in de gebruiksaanwijzing)

Alleen voor de 3e generatie. Laat het dienblad zitten en klap het dienbladframe met dienblad naar voren. Trek de rode hendel, die zich onder het zitje bevindt, via de handgreep, naar boven. Trek, met het handvat, de Provo rollator geheel omhoog. Hiermee klappt u de Provo rollator geheel in. (zie ook de 3^e generatie AUTOMATISCHE OPKLAPBEVEILIGING verderop in de gebruiksaanwijzing)

VEILIG TE GEBRUIKEN ACCESSOIRES

Alle, door Premis geproduceerde aanpassingen zoals Premis Onderarmschaalsteunen, Premis duwbeugels, Premis passieve remmen en Premis éénzijdige remmen, zijn veilig te gebruiken accessoires (aanpassingen) op de Provo rollator.

METALLIC KLEUREN

De 2^e generatie Provo rollators in de kleuren aubergine, blauw, champagne, titanium, wit met rode biezen en zwart. De 3^e generatie en XL generatie in de kleuren blauw en aubergine. Voor kleine volwassenen in de kleur blauw. De lichtgewicht rollatoren in de kleuren champagne, zilver, titanium, zwart en wit met rode biezen,

REMKABELS

Verstelling van de remkabels: Door de stelboutjes in het midden van de remkabel losser of vaster te draaien, zorgt u ervoor dat de remblokkjes de banden op het juiste moment raken.

REMKABELFIXATIE



GQ- KEURMERK
Goedgekeurd
KBOH TNO



De Provo rollator is voorzien van remkabelgeleiders (patent pending). De remkabels worden door deze geleiders binnen het frame gehouden zodat de remkabels niet achter obstakels kunnen blijven hangen. Let op dat u bij het aanbrengen van de mand de remkabels niet knakt of klemzet.

BANDEN

Standaard is uw Provo rollator met E-PU banden uitgevoerd: U kunt dit herkennen aan het Premis logo op de zijkanten van de banden. Premis E-PU banden zijn volledig onderhoudsvrij.



Als uw Provo rollator met luchtbanden is uitgevoerd dan is het van belang dat u de luchtbanden op de juiste spanning houdt. Door te zachte banden werken de remmen niet optimaal of de Provo rollator naar links of rechts trekt. Deze kunt u (laten) oppompen met het bijgesloten verloopnippeltje (het verloopnippeltje wordt ALLEEN bij Provo rollators met luchtbanden meegeleverd). Dit verloopnippeltje schroeft u op het ventiel. Nu kunt u met een fietspomp de band oppompen. Hierna dient u het verloopnippeltje van het ventiel af te schroeven en weer op te bergen. Indien vuil aan de banden koekt, dient u dit met een borsteltje te verwijderen.

Banden maten: Lichtgewicht Provo Rollator 200x30 mm. Alle andere Provo Rollatoren 200x50 mm.

AUTOMATISCHE OPKLAPBEVEILIGING VOOR DE 2^E GENERATIE, XL GENERATIE, LICHTGEWICHT EN KLEINE VOLWASSENEN PROVO ROLLATORS.




DE ROLLATOR INKLAPPEN.

Als u de rollator wilt inklappen, druk dan de zwarte opklapbeveiliging aan de **rechterkant** in terwijl u het hendeltje ingedrukt houdt.

Let erop dat u niet met uw vingers tussen het frame en de beveiliging klem komt te zitten.



VEILIG. Dit is de manier om de rollator in te klappen

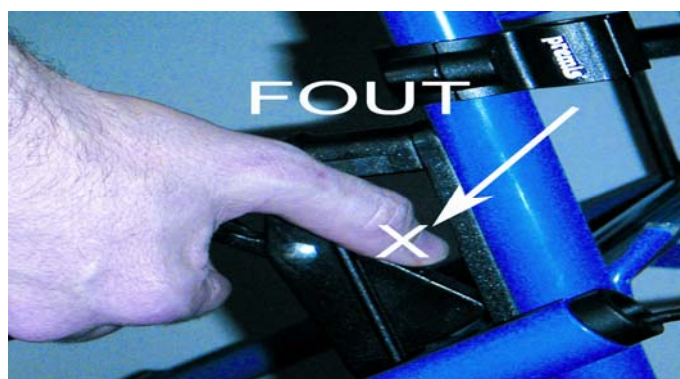

ONVEILIG: Op deze manier loopt u het risico om met uw vingers in de beveiliging vast te komen zitten. Doe dit dus niet!

Controleer ALTIJD of de AUTOMATISCHE opvouwbeveiliging er op staat als U de rollator gebruikt.

AUTOMATISCHE OPKLAPBEVEILIGING VOOR DE 3^E GENERATIE PROVO ROLLATOR




Als U de rollator uitklapt, door met uw hand de handgreep van het zijte naar beneden te duwen, valt de rode opklapbeveiliging automatisch op slot.

Controleer altijd of de handel op de onderste buis vergrendeld is.

Als u de rollator weer in wilt klappen trekt u de rode handgreep van de opklapbeveiliging met uw hand door de handgreep in het zijte omhoog.

MONTAGE VAN DE AUTOMATISCHE OPVUW BEVEILIGING VOOR DE 3E GENERATIE PROVO ROLLATOR.

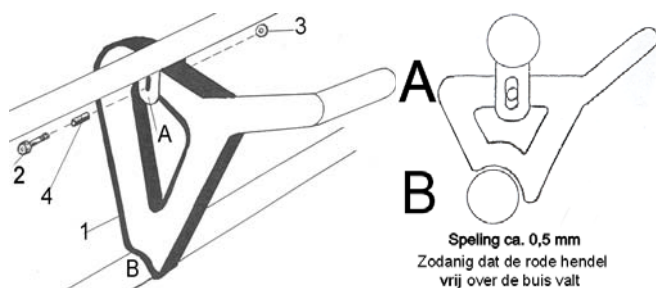

Plaats het busje (4) in het gat van de rode hendel. Bevestig de rode hendel (1) tussen de beugeltjes onder het zijte. Plaats het schroefje (2) in de gaatjes. Draai het moertje (3) op het schroefje (2) handvast. Laat de uitholling (B) van de opklapbeveiliging (A) op de buis rusten en draai het schroefje (2) vast.

OPPERVLAKTE KLEUR COATING

Alle Provo rollators zijn van een, slagvaste, 3 laags finish voorzien. Bij mechanische beschadigingen kunt u, de beschadiging, met aantipverf in de juiste kleur opvullen. Gelijk aantippen bij beschadigingen voorkomt roestvorming.

Controleer ALTIJD of de AUTOMATISCHE opvouwbeveiliging er op staat als U de rollator gebruikt.

HANDGREPEN



Instellen hoogte en stand van de handgrepen. Draai de fixatie hendel onder de handgreep los. Trek de duwbuizen omhoog tot de gewenste hoogte, maximaal tot het gladde deel van de duwbuis, echter tot de markering maximum (zie pijl op de linker foto hier naast), het gladde deel mag niet zichtbaar zijn. Draai de fixatiehendel weer goed vast, zodanig dat de handgrepen niet meer bewogen kunnen worden.



PARKEERREMEN & ZITJE

Gebruik altijd de parkeerrem om te gaan zitten. Haal het dienblad van de rollator af. Als de rollator op de parkeerrem staat kan er niet meer met de Provo rollator gereden worden.

U kunt op het zitje gaan zitten. Houdt u zelf goed vast aan de handvatten als u gaat zitten. Doe dit ook bij het weer opstaan. Zorg er voor dat er altijd iemand in de buurt is om u na ongelukkige zitmanoeuvres te helpen.

Bij een Provo rollator met een Drukrem kan het zitje alleen gebruikt worden als de rollator Premis (loop)parkeerremmen heeft. De zithoogte zakt, bij het gaan zitten, een paar cm.

Alleen bij een Provo rollator met Druk- en parkeerremmen, kunt U veilig op het zitje zitten.

Zonder parkeerremmen kunt u het zitje niet gebruiken.

GEBRUIK van de REMMEN en PARKEERREMEN

DE RODE PREMIS PARKEERREM



REMMEN: Om te remmen met de rode Premis Parkeerremmen. Knijp beide bovenste (zilverkleurige) handremmen in.

PARKEREN: Knijp de beide rode remhendels helemaal in tot deze vast klikken.

Parkeerrem ontgrendelen. Knijp de beide zilverkleurige handremmen helemaal in en laat deze weer los.

DE PREMIS LOOP-PARKEERREM

REMMEN: Om te remmen met de Premis LoopParkeerremmen. Knijp beide zwarte handremmen in.

PARKEREN: Druk de zwarte hendels naar beneden tot deze vast klikken.

Parkeerrem ontgrendelen. Knijp de beide handremmen helemaal in en laat deze weer los.



DE PREMIS DRUKREM

REMMEN: Om te remmen met de Drukremmen. Oefen druk uit op de handvatten om te remmen. Gewicht gebruiken om volledig tot stilstand te komen.



STAND VAN DE HANDVATTEN



Voor een betere loophouding en meer comfort kunnen de handgrepen maximaal 15 graden naar buiten worden gedraaid (evenwijdig aan de stand van de fixatie hendel). Draai de fixatiehendel weer goed vast, zodanig dat de handgrepen niet meer bewogen kunnen worden

PARKEERREMEN & ZITJE 3^e GENERATIE

Gebruik altijd de parkeerrem om te gaan zitten. Voor de 3e generatie. (zie parkeerremmen links) Klap het dienblad frame naar voren en u kunt gaan zitten.

ROLLATOR WEER GEBRUIKEN

Om de Provo rollator weer te gebruiken, knijpt u de de remmen in (zie gebruik van de remmen). Houdt de Provo rollator iets achterover en oefen enige druk uit op de handvatten. De Provo rollator komt nu weer op 4 wielen in de gebruiksstand. Laat de handremmen los.

ROLLATOR WEER GEBRUIKEN

Controleer ALTIJD of de AUTOMATISCHE opvouwbeveiliging er op staat als U de rollator gebruikt. U kunt de Provo rollator nu weer gebruiken.
JAARLIJKSE CONTROLE

Het verdient aanbeveling eens per jaar de draaiende delen te laten smeren, alle schroeven en moeren aan te laten draaien, de remkabels te laten controleren en af te stellen en de banden op slijtage te laten controleren. Hiermee blijft de goede werking van uw Provo rollator gegarandeerd.

De Provo rollator kan met een zachte vochtige doek schoon gemaakt worden, eventueel kan er een huishoudschoonmaakmiddel gebruikt worden.

Schuurmiddelen en agressieve schoonmaakmiddelen tasten de kunststof onderdelen, de coating en de chroomlaag van de handvatten aan.

KWALITEIT & KEURMERKEN

GQ- KEURMERK De Provo rollators voldoen aan de eisen van de normen EN 12182, EN Goedgekeurd KBOH TNO 1285 en EN-ISO 11199-2.



De Provo rollators, voorzien van Premis parkeer-remmen en Premis Loop parkeerremmen voldoen aan de KboH richtlijn L-01 en zijn GQ goedgekeurd.

Alle Provo rollators zijn voorzien van een CE label met relevante product informatie volgens onderstaand voorbeeld.



GEBRUIKTE MATERIALEN

Alle gebruikte materialen zijn te recyclen, vrij van PVC en vrij van giftige stoffen.

Alle Provo rollators zijn geschikt voor binnen en buiten gebruik.



PRODUCTNUMMERS, MATEN EN GEWICHTEN

OMSCHRIJVING PROVO ROLLATORS	artikelnummer	zit breedte	zit hoogte	Maximaal gebruikers gewicht	Gewichten in kg:			Handvat hoogte		Maximum breedte	
					rollator	Mand	Dienblad	Totaal	van		tot
Rollator licht gewicht	RO4943	42 cm	62 cm	110 kg	8,3	0,75	0,4	9,45	79 cm	101 cm	58 cm
Rollator 2e generatie standaard breedte	RO4143	42 cm	62 cm	120 kg	10,7	1	0,4	11,85	80 cm	98 cm	58 cm
Rollator 2e generatie extra breed	RO4150	49 cm	62 cm	150 kg	11,7	1	0,4	13,10	79 cm	104 cm	65 cm
Rollator 2e generatie extra breed	RO4155	54 cm	62 cm	150 kg	11,75	1	0,4	13,15	79 cm	104 cm	70 cm
Rollator 2e generatie extra breed	RO4160	59 cm	62 cm	150 kg	11,8	1	0,4	13,20	79 cm	104 cm	75 cm
Rollator 3e generatie	RO4043	42 cm	63 cm	110 kg	13,4	1	0,4	14,80	80 cm	102 cm	58 cm
Rollator kleine volwassenen	RO4737	36 cm	53 cm	100 kg	9,75	1	Nee	10,75	70 cm	85 cm	53 cm
Rollator kleine volwassenen	RO4743	42 cm	53 cm	100 kg	9,80	1	Nee	10,80	70 cm	85 cm	58 cm

Dealer

De Nort 20 - 3931 NG Woudenberg
Telefoon: 033-2779191 - Fax: 033-2779190

Email adres: verkoop@premis.nl
Web site: www.premis.nl