







Let's Go

**Able2**

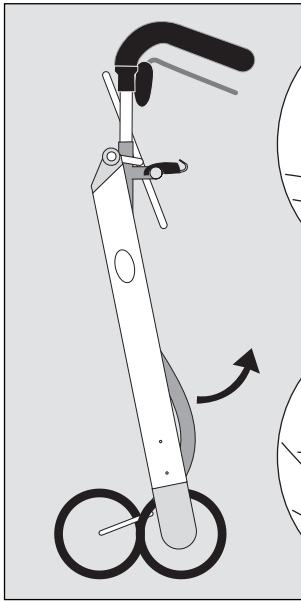


**1.**

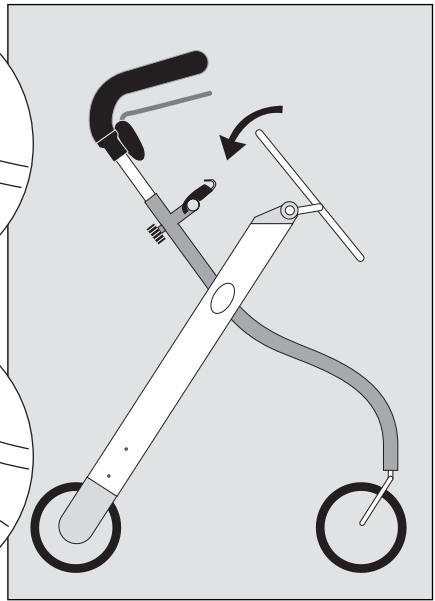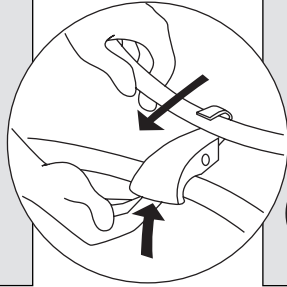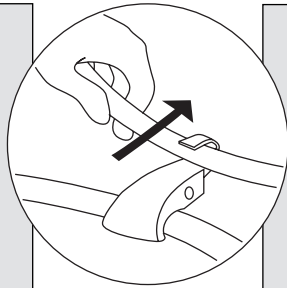





**2.**



**3.**

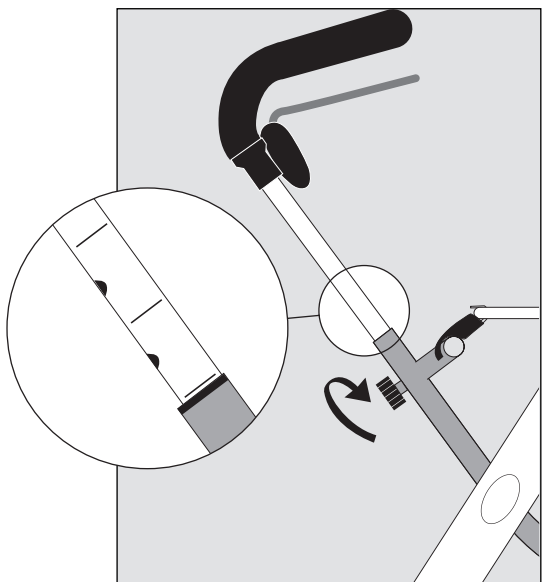

**4.**

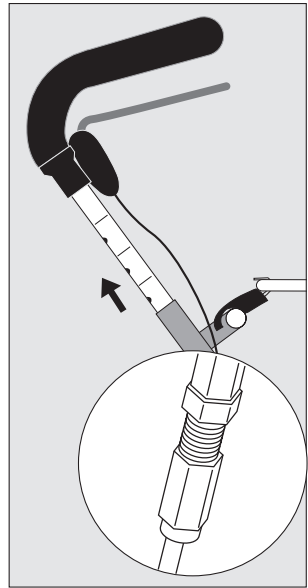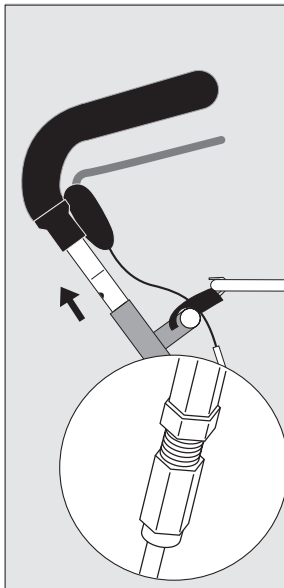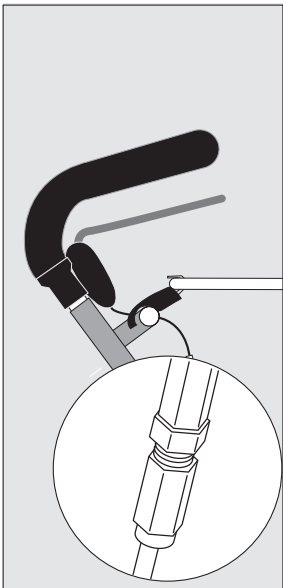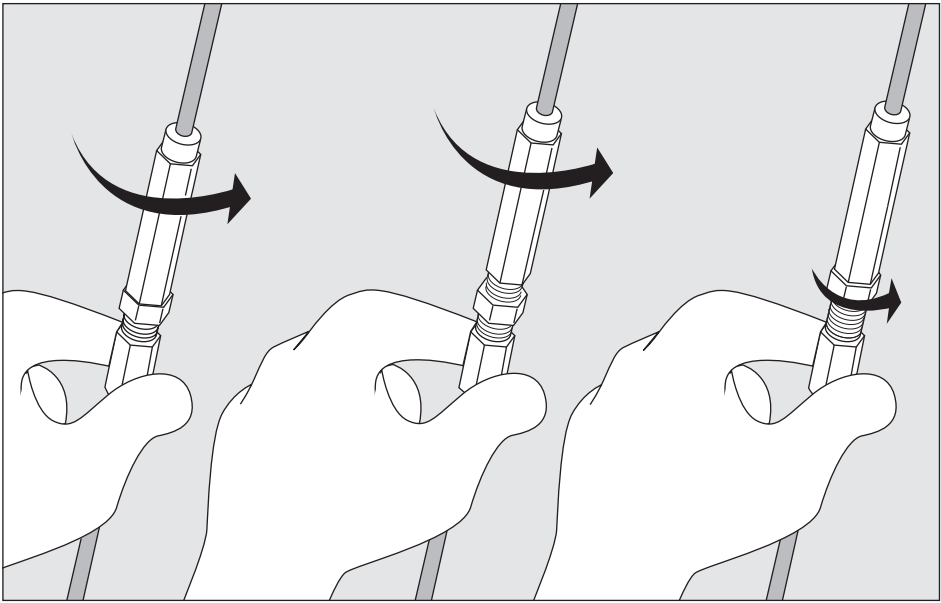

## Let's Go rollator voor binnengebruik.

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe binnen-rollator die uw leven wat gemakkelijker, veiliger en aangenamer zal maken.

Om u snel vertrouwd te maken met uw rollator is het belangrijk dat u deze gebruiksaanwijzing goed leest en deze bewaart zodat u later nog eens iets kunt opzoeken.

De rollator helpt u om binnenshuis te lopen. U kunt hem tevens gebruiken als bijzettafel. Ook kunt u de Let's Go rollator over uw benen plaatsen en gebruiken als tafeltje terwijl u eet of koffie drinkt. Vergeet niet om de parkeerrem te gebruiken, zoals op de bovenste afbeelding aangegeven is.

Doe extra voorzichtig terwijl u een drempel over gaat, zodat de voorwerpen op het blad niet vallen. Wees voorzichtig met vervoeren van hete vloeistoffen.

Het blad is bedoeld voor het plaatsen/mee-nemen van kleine lichte voorwerpen, zoals een bord, koffiekopje of plantengieter. Gebruik de rollator niet om grote of zware voorwerpen te verplaatsen.

De rollator is niet bedoeld om op te zitten, maar alleen voor gebruik met het blad en de speciale stoffen tas die als accessoire verkrijgbaar is. Deze tas kan gebruikt worden voor lichte voorwerpen.

**Onderhoud:** U kunt de rollator en het blad reinigen met water en eventueel wat afwasmiddel.

### Garantie:


De garantietermijn is 1 jaar. Slijtage aan b.v. wielen en kabels valt niet onder de garantie.

### Uitvouwen.

(Zie de afbeeldingen op pag. 2)


1. Zet de rollator rechtop voor u, steunend op de wielen. Trek het voorframe naar voren door aan beide poten met wielen te trekken.
2. Laat de steunbeugel voor het blad vanaf de achterzijde in de haak vallen.

3. Verzeker u ervan dat de vergrendeling goed op zijn plaats klikt.
4. Draai de klenschroeven voor de duwbeugel los. Stel de duwbeugel in op de gewenste hoogte en draai de schroeven vast.

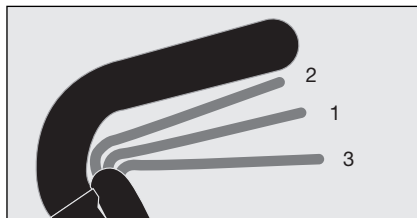

### Remfunctie.

1. Remhandgreep in positie 1: de wielen kunnen vrij draaien.
2. Remmen: trek de remhandgreep omhoog naar positie 2
3. Parkeerrem: duw de remhandgreep omhoog naar positie 3

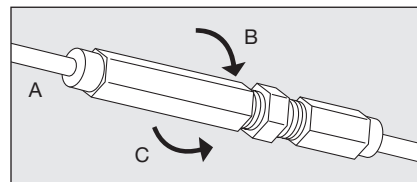


### Remmen afstellen.

1. De remkracht wordt ingesteld met de stelschroeven op de remkabels (A)
2. Draai de stelschroeven linksom of rechtsom tot de remkracht ingesteld is zoals gewenst. Door de nippel in de richting C te draaien wordt de remkracht groter. Als u de nippel in de richting B draait vermindert de remkracht.

### Technische gegevens:

Getest volgens ISO 11199-2 voor maximum gebruikersgewicht 100 kg.  
 Grootste breedte 54 cm.  
 Gewicht 6,5 kg.  
 Hoogte duwbeugel verstelbaar van 83 tot 94 cm.  
 Belasting blad: max 5 kg.  
 Belasting tasje (optioneel): max 3 kg.




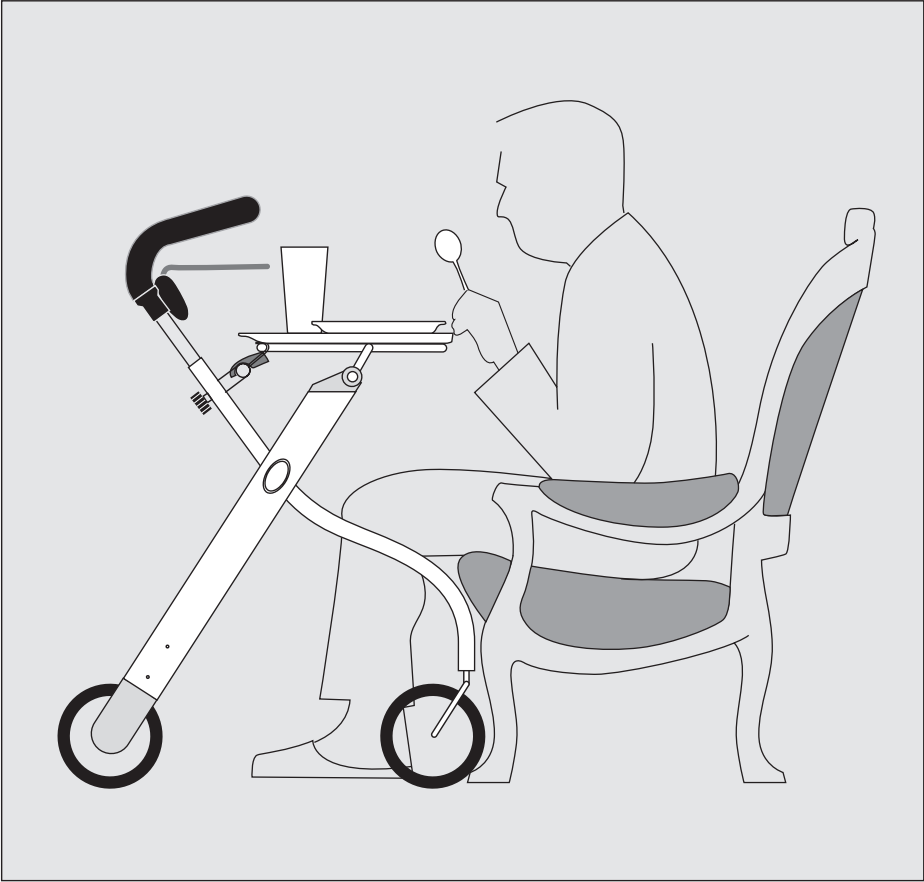

# TRUST CARE

[www.trustcare.se](http://www.trustcare.se)

Trust Care  
Skrittgatan 8B  
21377 Malmö, Sweden  
Tel.: +46 40 15 61 20  
[info@trustcare.se](mailto:info@trustcare.se)

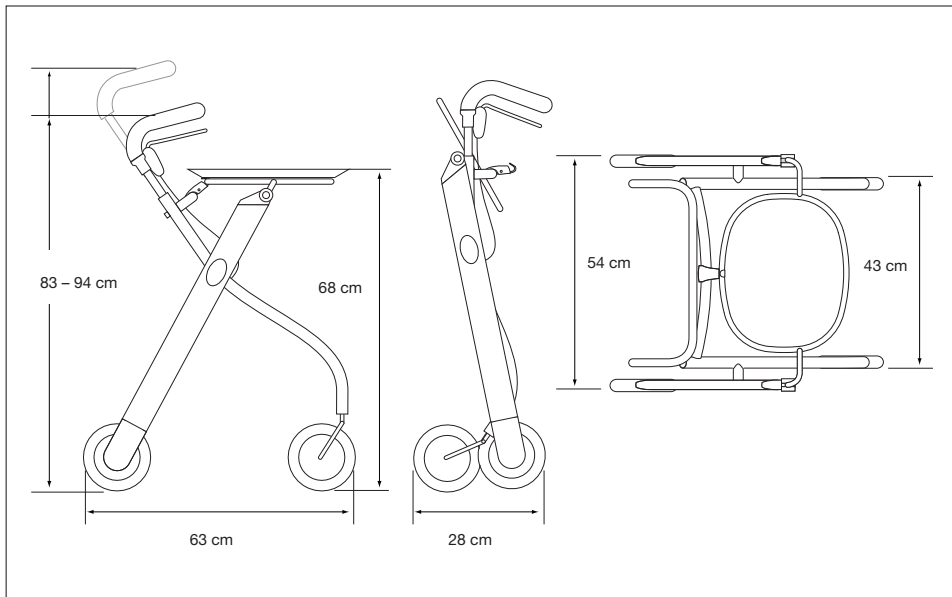

Rev003 Oct 2019