



MENSTRUATIONS-WÄRMEPFLASTER GEBRAUCHSANLEITUNG


DE Wir freuen uns sehr, dass du dich für Ovy entschieden hast. Unsere Mission ist es, Frauen weltweit zu helfen, ihre reproduktive Gesundheit einfach und effektiv zu kontrollieren. Neben der Ovy App bieten wir daher weitere Produkte an, die dich während der unterschiedlichen Zyklusphasen unterstützen.

i Bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen und zum Nachlesen aufbewahren!

Die Ovy App ist kostenlos für iOS und Android

Mit der Ovy App hast du die Möglichkeit, deinen gesamten Zyklus zu dokumentieren und stets über dein Smartphone im Blick zu behalten. Ovy richtet sich sowohl an Frauen, die natürlich verhüten möchten, als auch an Frauen mit Kinderwunsch.

Die App steht im App Store und Google Play Store kostenlos zum Download zur Verfügung. Die Ovy App ist ein Medizinprodukt der Klasse I.

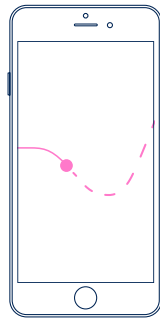

Wie berechnet Ovy deinen Zyklus?

Ovys Algorithmus basiert auf der symptomthermalen Methode. Anhand der Basaltemperatur und anderer Körpersignale berechnet Ovy die fruchtbare Phase, den Tag des Eisprungs und die nächste Periode.

Alle Ovy Produkte und weitere Informationen findest du auf www.ovyapp.com.

Medizinprodukt zur lindernden Wärme-Therapie

- Einfache und schnelle Hilfe zur Linderung von Menstruationsbeschwerden
- Kann auch auf anderen Körperpartien angewandt werden
- Bei Gelenk- und Muskelschmerzen, Muskelkater, Verspannungen, Rückenschmerzen und Zerrungen ebenfalls anwendbar
- Selbsterwärmend

- Langanhaltende, gleichmäßige und wohlthuende Wärme bis zu 8 Stunden
- Tiefenwirksam und entspannend

Inhalt:
Menstruations-Wärmepflaster (im weiteren Wärmepflaster genannt):
2 Stück (ca. 20 x 10 cm) zur einmaligen Anwendung auf der Haut oder Slipinnenseite.

Anwendung

Säubere und trockne deine Haut an der Stelle, an der du das Produkt anwenden möchtest. Öffne die luftdichte Verpackung mit den Händen (nicht mit spitzen Gegenständen, wie einem Messer oder einer Schere), um das Wärmepflaster zu entnehmen. Ziehe die Schutzfolie von der Rückseite ab und bringe das Produkt mit der selbstklebenden Seite auf die schmerzende Stelle direkt

auf der Haut oder auf die Slipinnenseite an. Die Erwärmung erfolgt langsam und erreicht nach ca. 30 Minuten die maximale Temperatur, die über mindestens 8 Stunden bestehen bleibt. Die Wärme wird durch die Luft aktiviert, weshalb die luftdichte Verpackung erst unmittelbar vor Benutzung des Wärmepflasters geöffnet werden sollte.

1. ZYKLUS BERECHNEN



Mit der Ovy App den Beginn der nächsten Periode berechnen.

2. WÄRMEPFLASTER ANWENDEN



Klebefolie entfernen, Anwendungsstelle reinigen und trocknen.



Selbstklebend auf der Haut oder Slipinnenseite.




Bis zu 8 Stunden wärmewirksam.

Vorsichtsmaßnahmen

- Bei rheumatischen Erkrankungen, Kreislaufbeschwerden, Diabetes, Durchblutungsstörungen, Herzerkrankungen, rheumatoider Arthritis, Nervenschäden, Erkrankungen der Sinnesfunktionen, Hauterkrankung oder Schwangerschaft bitte vor der Anwendung einen Arzt konsultieren
- Nur zur äußerlichen und zweckmäßigen Anwendung
- Für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren
- Nicht verwenden, wenn das Produkt beschädigt ist
- Nicht zusammen mit schmerzstillenden Mitteln und bei eingeschränktem Temperaturempfinden sowie bei arteriellen Durchblutungsstörungen und Raynaud-Syndrom verwenden
- Wärmepflaster nur einmal benutzen
- Bei versehentlicher Einnahme des Inhalts, bei Kontakt mit der Haut oder den Augen, das Produkt entfernen, den betroffenen Bereich mit Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen. Der Inhalt kann bei

Verschlucken oder direkten Kontakt mit Augen und Haut schädlich sein
· Dauerhafte Lagerung bei Zimmertemperatur

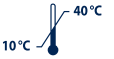

· Beachte das Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Einzelverpackung



Die Entsorgung kann über den Hausmüll erfolgen. Sollte nach Anwendung eine leichte Rötung der Haut auftreten, ist dies kein Grund zur Beunruhigung. Bitte lass diese vor einer weiteren Anwendung abklingen. Ab dem Alter von 55 Jahren nimmt die Empfindlichkeit der Haut zu, deshalb über dünner Kleidung tragen.

⚠ Warnhinweise

Bei falscher Anwendung können selbst bei niedriger Temperatur Brandwunden entstehen. Befolge deshalb die Gebrauchsanweisung und überwache die Anwendung in regelmäßigen Abständen. Sorge für eine Zirkulation der Luft über dem Wärmepflaster, um mögliche Brandwundenbildung zu vermeiden. Lege und setze dich nicht auf das Produkt und trage keine enganliegende Kleidung über dem Wärmepflaster. Beende die Anwendung sofort, wenn

es unangenehm heiß wird, sich ein Hautausschlag bildet oder du dich nicht wohl fühlst. Personen, die das Wärmepflaster ohne Hilfe nicht eigenständig abnehmen können, z.B. ältere oder behinderte Personen, sollten während der Anwendung sorgfältig überwacht werden. Suche einen Arzt auf, sofern Schmerzen nach einwöchiger Anwendung des Produktes nicht gelindert wurden, da dies auf eine Erkrankung hinweisen könnte.

Nicht anwenden

- Länger als 8 Stunden innerhalb von 24 Stunden
- Bei Kindern unter 12 Jahren
- An einer Stelle mit Entzündungen, Prellungen, Rötungen, Schwellungen, Hautrissen, Blutergüssen, Hautreizungen bzw. überempfindlicher, kranker, verletzter oder geschädigter Haut
- An einer Stelle, an der du Wärme nicht wahrnehmen kannst

- In Verbindung mit medizinischen und kosmetischen Cremes, Mitteln, Lotionen, die auf die Haut aufgetragen werden
- Wenn Personen das Produkt nicht selbst entfernen können
- Wenn das Produkt beschädigt oder undicht ist



Wärmepflaster niemals

- Zerschneiden, zerreißen, verbrennen, kneten, pressen
- In der Mikrowelle oder durch andere äußere Einwirkungen erwärmen

- Mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt bringen

Inhaltsstoffe

Eisen, Wasser, Kieselgur, Aktivkohle, Natriumchlorid

Hast du Fragen zum Ovy Menstruations-Wärmepflaster?

Bei Fragen oder Feedback steht dir das Ovy Team gerne jederzeit zur Verfügung:

Shop: ovyapp.com
E-Mail: hello@ovyapp.com
Connect: facebook.com/ovyapp
instagram.com/ovyapp

Zeichenerklärung

- i** Gebrauchsanweisung beachten
- °C** Angabe für Grenzwerte der Lagertemperatur
- 🏭** Hersteller
- ⚠** Sicherheitshinweise beachten
- 🚫** Nicht verwenden, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist
- 🚫** Nicht zur Wiederverwendung
- 🕒** Verwendbar bis
- LOT** Chargennummer