

# STUHLANALYSE PARASITEN-PROFIL



## Parasiten im Darm-ungeliebte Mitbewohner

### UNSER ANGEBOT

- Schwermetall-Test
- Glyphosat-Test
- Darmtest/Darm-Check
- Hormon Profil Frau/Mann
- Cortisol-DHEA-Tagesprofil
- Diaminoxidase/Histaminintoleranz
- Parasiten-Profil
- Mikrobiom
- Nahrungsergänzungen ory-berlin.de
- Beratung - per Internet oder bei uns in der Natura Heilpraxis

#### Parasiten-Profil erstellen- Warum?

Beschwerden, die von einer Infektion mit Darmparasiten verursacht werden sind oft sehr unspezifisch und gleichzeitig sehr unterschiedlich. Einige Infektionen verlaufen komplikationslos und unauffällig, andere äußern sich durch Fieber, Durchfall und Gewichtsverlust. Nach einem längeren Aufenthalt in tropischen Gebieten beispielsweise, kann es ratsam sein, sich auf Darmparasiten testen zu lassen. Ory Analysis bietet verschiedene Testsets, die mit Hilfe molekulargenetischer Nachweismethoden (PCR) sowohl Einzeller, als auch Würmer in allen Stadien diagnostizieren.

Zu den Darmparasiten, die uns Menschen betreffen können, zählen neben Würmern wie z.B. einigen Fadenwürmern, Saug- oder Bandwürmern, aber auch eine Reihe von Einzellern wie z.B. Amöben oder Lamblien. Der Weg in unseren Körper verläuft oft unbemerkt durch verunreinigte Nahrungsmittel oder verunreinigtes Wasser. Meist nehmen wir hierbei die Eier oder Larven auf, die dann in unserem Verdauungstrakt heran wachsen. Viele Parasiten kommen eher in den Tropen vor, andere wie der Fuchsbandwurm oder der Kindermadenwurm sind weltweit verbreitet.

Eine Infektion mit Darmparasiten kann sich ganz unterschiedlich äußern. Es kann zu Durchfall, Gewichtsverlust, Fieber oder allgemeiner Schwäche kommen.

#### BERATUNG

030 88 66 33 73  
praxis@natura-heilpraxis.de  
www.natura-heilpraxis.de

#### BESTELLUNG

Auguste-Viktoria-Str. 91  
14193 Berlin  
www.ory-berlin.de

## Was wird untersucht?

### A169 Parasiten-Profil Würmer/Microsporidien

Bandwürmer, Spulwürmer, Madenwürmer (Oxyuren), Hakenwürmer, Neuweltlicher Hakenwurm, Zwergbandwürmer, Peitschenwürmer, Zwergfadenwürmer, Enterocytozoonssp. / Encephalitozoon spp.

### A178 Parasiten-Profil Einzeller (mit Erregerlast)

Blastocystis, Dientamoeba, fragilis, Giardialamblia, Cryptosporidium spp. , Cyclosporacayctanensis, Entamoeba histolytica

## So funktioniert der Test

### • Anleitung

- Überprüfen Sie die Vollständigkeit des Testsets
- Anforderungsbogen
- Anleitung zur Durchführung
- Postversandkarton + Klebestreifen zum sicheren Verschließen
- Stuhlauffanghilfe ("Patientenhilfe für die Entnahme von Stuhlproben")
- 2 Probenröhrchen mit in den Deckel integriertem Löffel & 2 kurze Transportröhrchen



### Stuhlprobengewinnung-

Legen Sie die beiliegende Stuhlauffanghilfe in die Toilettenschüssel (je nach Badinstallation können Sie zur Unterstützung Zeitungspapier darunter platzieren)- Fangen Sie Ihren Stuhlgang damit auf



### 2x Probenröhrchen mit in den Deckel integriertem Löffel-

Entnehmen Sie mit dem Löffel an mehreren Stellen Proben und befüllen Sie beide Probenröhrchen damit. Die Füllhöhe sollte zwischen min. und max. liegen (siehe Markierung). Der Löffel darf bei der Probenentnahme nicht mit dem WC in Kontakt kommen, um das Ergebnis nicht zu verfälschen- Schrauben Sie den Deckel (samt Löffel) wieder auf die Röhrchen und stecken Sie die Röhrchen in die kurzen Transportröhrchen und verschrauben Sie diese




### Verpacken und versenden-


Die zwei Transportröhrchen mit den Proben in den beiliegenden Postversandkarton packen - Anforderungsbogen ausfüllen: Name, Vorname, Geburtsdatum (1. Seite oben) sowie Erklärung des Patienten ankreuzen und unterschreiben (2. Seite unten). Alles weitere ist bereits von uns für Sie ausgefüllt. Ausgefüllten Anforderungsbogen mit in den Versandkarton packen- Versandkarton mit beiliegendem Klebestreifen sicher verschließen und zur Post bring



**Geschafft! Sie erhalten eine E-Mail, wenn Ihre Ergebnisse vorliegen.**

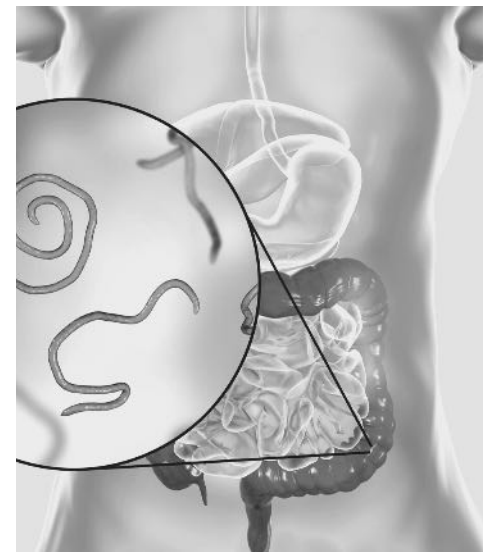

*Mit Hilfe molekulargenetischer Nachweismethoden können Würmer in allen Entwicklungsstadien diagnostiziert werden*

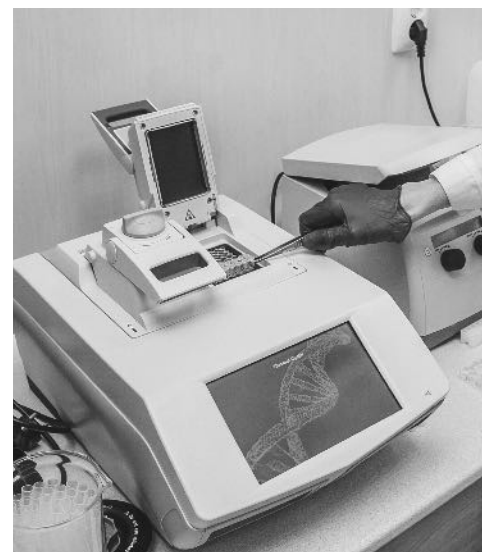

*Sie bekommen eine E-Mail sobald die Ergebnisse vorliegen*

### BESTELLUNG

Auguste-Viktoria-Str. 91  
14193 Berlin  
www.ory-berlin.de

### BERATUNG

030 88 66 33 73  
praxis@natura-heilpraxis.de  
www.natura-heilpraxis.de