

TWINKLES® Bonding Guide



Puhdista hampaan pinta pastalla. Hammaskorua ei tarvitse esikäsitellä.



Etsaa kohta johon hammaskoru kiinnitetään. Etsaa jonkin verran korun kokoa laajempi alue. Huuhtelee ja kuivaa ilmauustilla.



Levitä sidosaine etsatulle pinnalle, puhalla ilmauustilla ja koveta.



Puhalla uudestaan, ja vie juoksevaa yhdistelmämuovia hampaan pinnalle, hiukan korun kokoa isommalle alueelle



Nosta koru Starpickerillä (tarratikkulla) . **Älä käytä** atuloita. Aseta koru yhdistelmämuovipintaa vasten, kierrä Starpickeriä ¼ kierrosta. Nyt se irtoaa helposti korun pinnalta



Tasoiata yhdistelmämuovi sondilla niin, että kerroksen paksuus kasvaa kohti korua ja pienenee reunoja kohti, noin 1½mm. Näin saadaan aikaan mekaaninen retentio, ja samalla varmistetaan ettei korun alle pääse bakteereja.



Paina korua uudelleen, niin että se painuu kiinni kiilteen pintaan. Valokoveta ensin takaa, ja sitten vinosti joka suunnasta 4 x 20 s. Viimeistelee yhdistelmämuovi kiiltäväksi. Varmista ettei muodostu mitään saumoja.

Kristallien kiinnityksessä on erittäin tärkeää että yhdistelmämuovi sitoo myös sivut, eikä ainoastaan taustaa. Muuten on olemassa huomattava vaara että lasi vähitellen irtoaa alla olevasta foliosta, jolloin se putoaa pois. Kiinnitys varmistetaan helpoimmin liu'uttamalla sondin kärkeä pitkin kristallin reunaa yhdistelmämuovissa

Jos Twinkles kiinnitetään koveralle pinnalle, voidaan koru taivuttaa niin että se myötäilee hampaan muotoa. Näin koru kiinnittyy luotettavammin hampaaseen. Varo kuitenkin rikkomasta korua taivuttaessa.

Korun poisto

Koru irrotetaan samalla tavalla kuin braketit. Poista yhdistelmämuovijäänös ja kiillota.

Twindent ei vastaa vahingoista jotka voivat aiheutua Twinklesin virheellisestä kiinnityksestä, käytöstä tai poistamisesta.

© Twindent 2000 www.twindent.se

TWINDENT

