





1. Stellen Sie sicher, dass Sie und Ihr Kunde sich einig sind, wo genau die Twinkles platziert werden sollen. Bereiten sie den Zahn für den zahnmedizinischem Kunststoffkleber vor und säubern sie die Zahnoberflächen. In Salons wird mit einer feuchten Watterolle die Reinigung durchgeführt.

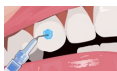

2. Eine Fläche, die nur wenig größer als der Twinkles-Schmuck ist, wird angeätzt. 20 Sekunden einwirken lassen. Wischen Sie das Gel mit einer feuchten Watterolle und in einer Abwärtsbewegung ab. Reinigen Sie den Zahn gründlich mit einer feuchten Watterolle, um die Oberfläche anzufeuchten. Stellen Sie sicher, dass die gesamte Ätzung entfernt wird und nicht mit dem Zahnfleisch in Kontakt kommt. Mit einer trockenen Watterolle wischen Sie den Zahn trocken, bis Sie eine weiße, mattierte Oberfläche erhalten. Dies ist wichtig, um eine sichere Befestigung zu erreichen. Wenn Sie keine mattierte Oberfläche erhalten, wiederholen Sie den Vorgang.

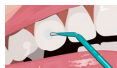


3. Tragen Sie eine dünne Schicht des zahnmedizinischem Kunststoffklebers mit dem Mikropinsel auf die mattierte Fläche auf. Tupfen Sie mit einer Watterolle schnell und leicht nach, um überschüssige Flüssigkeit zu entfernen.




4. Tragen Sie eine dünne, aber ausreichende Schicht des flüssigen Komposits auf den Zahn auf, der gesamte geätzte Bereich muss hierbei bedeckt werden.



5. Geben Sie eine kleine Menge Vaseline auf die Spitze einer Sonde oder verwenden Sie das umgekehrte Ende der in Vaseline getauchten Mikrobürste. Nehmen Sie den Edelstein auf, indem Sie leicht auf die Vorderseite des Schmuckstücks drücken. Pinzetten haben sich für diese Applikation nicht bewährt. Platzieren Sie den Twinkles auf dem vorbereiteten Zahn und drehen Sie die Sonde leicht, um ihn zu lösen. Verwenden Sie die Sonde, um den Edelstein korrekt dort zu positionieren, wo Sie und Ihr Kunde es vereinbart haben. Schieben Sie den Edelstein vorsichtig im flüssigen Komposit, um auch die Seiten des Edelsteins zu bedecken. Drücken Sie den Edelstein mit der Rückseite der Sonde leicht gegen den Zahnschmelz.

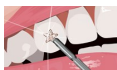

6. Streichen Sie überschüssige flüssige Komposit um den Edelstein herum mit der Sonde glatt. Lassen Sie den Kleber an den Kante des Edelsteins dicker und dünnen Sie ihn allmählich von der Kante weg aus. Dies erzeugt eine mechanische Verriegelung. Beim Verkleben von Dental-Kristallen müssen unbedingt auch die Seiten verklebt werden, damit sich der Kristall nicht von der Trägerfolie löst. Dies geschieht am besten, indem Sie den Kristall im aufgetragenen flüssigen Komposit herumschieben, bevor Sie ihn abschließend gegen den Zahnschmelz drücken.

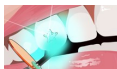


7. Drücken Sie den Zahnschmuck fest an, um eine optimale Verbindung zu erreichen. Anschließend erfolgt eine Lichthärtung von der Lingualseite her für 20 Sekunden. Es folgt abschließend die Aushärtung von allen Winkeln auf der labialen Oberfläche. 20 Sek. pro Winkel. Danach sollten - wenn notwendig - die Ränder poliert werden, um etwaige Kanten zu vermeiden.

TWINKLES

DENTAL JEWELRY

Twinkles Goldschmuck wird mit 18 - 24 Gold oder Weissgold gemacht je nach Modell. Unsere Diamanten mit Brillantschliff 0,01 oder 0,02 ct. Wesselton SI.

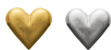

Small Heart



Large Heart



Round w Diamond 0,01c



Round w Diamond 0,02c




Small Star



Large Star



Star w Diamond

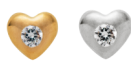


Heart w Diamond



Female sign



Dollarsign

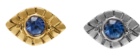

Evil Eye with Sapphire



Hamsa



Cross



Ankh Egyptian Cross



Star of David



Smiley/Soccerball



Scorpion




Bunny



Horseshoe



Dolphin

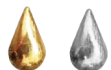

Droplet



Treble Clef



Anchor



Tick-mark

