


# TWINKLES

## GUÍA DE ADHESIVO


Twinkles sólo puede unirse a un diente vivo




**1.** Asegúrese de que usted y su paciente estén de acuerdo con exactamente dónde colocar los Twinkles. Prepare el diente para unirlo como cualquier restauración retenida con resina. Limpie el diente con piedra pómez, un chorro profiláctico o chorro de arena.

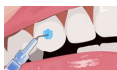

**2.** Grabar el área superficial ligeramente más grande que la joya. Enjuague y seque al aire.

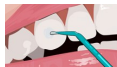


**3.** Aplique adhesivo al esmalte grabado y dejar una capa delgada, secar con aire.

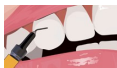


**4.** Aplique una capa fina de resina fluida sobre el diente que cubra el área grabada.



**5.** Coloque un trozo pequeño de cera en una sonda y úselo para recoger la gema. Coloque los Twinkles en el composite fluido y gire la sonda ligeramente para aflojarla. Retire la cera, trabaje con una sonda para colocar los Twinkles correctamente donde usted y su cliente estuvieron de acuerdo.

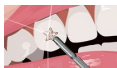

**6.** Alise el exceso de material alrededor de la joya con una sonda. Deje el compuesto más grueso en el borde de la joya, gradualmente adelgazándolo lejos del borde. Esto crea un bloqueo mecánico. Al unir cristales dentales es imprescindible unir el lado del vidrio para evitar que el vidrio se separe del soporte de la lámina. Esto se hace mejor empujando el cristal en el flujo **antes de presionarlo contra el esmalte.**

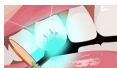

**7.** Presione para asegurarse de que la joya esté en contacto con el esmalte. Cura de luz de la superficie lingual del diente 20 seg. Termine de fotocurar desde todos los ángulos en la superficie labial. 20 seg. cada ángulo. Si es necesario pulir los bordes del compuesto con puntas de goma o pulidoras para eliminar cualquier borde

### TÉCNICA DE ELIMINACIÓN

El enfoque de la eliminación es de la misma manera que se hace una eliminación de un componente de ortodoncia (bracket) de un diente. Eliminar todo el compuesto. Limpiar con piedra pómez y pulir el diente. Nota: No elimine el esmalte, sólo el agente adhesivo.

### DISCLAIMER

Twindent no es responsable de ninguna lesión que pueda resultar de la unión, uso o eliminación de Twinkles. Twindent no garantiza la vinculación realizada por terceros.

# TWINKLES

## DENTAL JEWELRY

Diseñado para tu sonrisa. Twinkles sólo puede unirse a un diente vivo.



Small Heart



Large Heart



Round w Diamond 0,01c    Round w Diamond 0,02c



Small Star



Large Star



Star w Diamond



Heart w Diamond



Female sign



Dollarsign



Evil Eye with Sapphire



Hamsa



Cross



Ankh Egyptian Cross



Star of David



Smiley/Soccerball



Scorpion




Bunny



Horseshoe



Dolphin

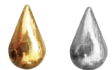

Droplet



Treble Clef



Anchor



Tic-mark

