



TWINKLES


Bijoux dentaire Mode d'emploi

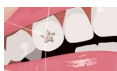


1. Assurez-vous que vous et votre client êtes d'accord sur l'emplacement exact des Twinkles. Poser un rouleau de coton sec entre la dent et la lèvre supérieure. Nettoyer toute la surface de la dent en la frottant en mouvements réguliers, de haut en bas, avec un coton sec.

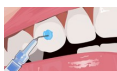

2. Appliquer le gel bleu de mordantage sur une surface plus grande que celle sur laquelle le bijou sera posé. Laisser le gel agir pendant 20 secondes. Éliminer le gel en passant sur la dent, de haut en bas, un rouleau de coton sec. Nettoyer soigneusement avec un coton humide pour mouiller la surface de la dent. Procéder toujours de haut en bas pour éliminer toute trace de gel et pour éviter tout contact du gel avec le palais. Avec un coton sec, sécher la dent jusqu'à obtention d'une surface blanche givrée. Cela est essentiel pour réaliser une fixation solide du bijou. Faute d'obtenir une surface givrée, répéter la phase d'application du gel.

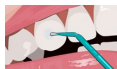


3. Appliquer avec la brosse une fine couche d'adhésif sur la surface givrée.

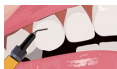


4. Appliquer le composite fluide sur une surface un peu plus grande que le bijou et avec environ la même épaisseur.



5. Mis une petite morceau de cire au bout d'une sonde et saisir le bijou et le placer au centre du composite. Retirer l'a sonde en le faisant pivoter. Mis le bijou en place avec la sonde.

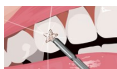

6. Lissez l'excès de matière autour du bijou avec la sonde. Laisser le composite plus épais au bord du bijou, en l'amincissant progressivement loin du bord. Cela crée un verrou mécanique. Il est important pour le collage des Cristaux de laisser l'adhésif remonter légèrement sur les cotés du Cristal afin d'assurer une meilleure retention

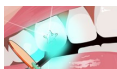

7. Appuyer doucement sur les bijoux avec la sonde. Éviter toute tache de composite sur le bijou. Photopolymériser au travers de la face palatine pendant 20 secondes, puis latéralement en face vestibulaire pendant 20 secondes pour chaque angle.

IMPORTANT

Ne pas manipuler le bijou avec des précelles, utiliser une peux de cire au bout du'une sonde.

Twindent ne peut être tenu responsable des dommages et blessures résultants du collage, de utilisation ou de la dépose des Twinkles.

TWINKLES

BIJOUX DENTAIRE



Small Heart



Large Heart



Round w Diamond 0,01c



Round w Diamond 0,02c



Small Star



Large Star



Star w Diamond




Heart w Diamond



Female sign



Dollarsign

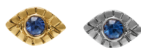

Evil Eye with Sapphire



Hamsa



Cross



Ankh Egyptian Cross



Star of David



Smiley/Soccerball



Scorpion




Bunny



Horseshoe



Dolphin

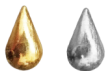

Droplet



Treble Clef



Anchor



Tic-mark

