




# TWINKLES BONDING GUIDE

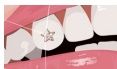


1. Kom överens med klienten om exakt var smycket ska sitta på tanden. Rengör tandytan med en våt bomullsulle.

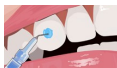

2. Etsa den del där tandsmycket ska sitta i 20 sekunder. Ytan ska vara lite större än vad själva smycket är. Ta bort med nedåtgående rörelse med en fuktig bomullsulle. Torka ordentligt torr med bomullsulle. Kontrollera att det etsade området har blivit matt och mjölkfärgat. Om inte, upprepa etsningen.

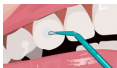


3. Applicera ett tunt lager med bonding på den matta ytan. Torka bort överskott med en lätt tryck med bomullsullen.

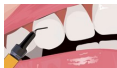


4. Lägg på ett tunt lager flytande komposit på en yta något större än smycket.



5. Ta lite vaselin längst ut på bakändan på en sond, eller nederdelen på en micro brush. Plocka upp smycket genaom att lätt pressa sonden mot framsidan på smycket. Använd inte pincett. Lägg smycket mot kompositen, vrid sonden ett kvarts varv och denna släpper nu smycket lätt. Använd sonden för att positionera smycket rätt. Med sonden, jämna till kompositen runt om - tjockare mot smycket och tunnare utåt - ca 1 ½ mm. Du får på så sätt en mekanisk låsning och försäkrar dig samtidigt att det inte tränger in bakterier under smycket.

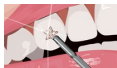

6. Med sonden, jämna till kompositen runt om - tjockare mot smycket och tunnare utåt - ca 1 ½ mm. Du får på så sätt en mekanisk låsning och försäkrar dig samtidigt att det inte tränger in bakterier under smycket. Vid **fästning av kristaller** är det mycket viktigt att kompositen binder sidan och inte bara baksidan. Risken är annars stor att glaset så småningom separerar från den underliggande folien och faller av. "Kana" därför först kristallen runt i kompositen med sonden innan den försiktigt pressas mot emaljen.

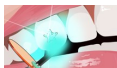

7. Tryck till igen på smycket så att den får kontakt mot emaljen. Ljushärda först från baksidan och sedan snett från alla riktningar 4 x 20 sekunder.

## TA BORT TANDSMYCKE

Tandsmycket kan bara tas bort på en tandläkarklinik. Använd samma procedur som vid avlägsnande av tandställning. Notera: Ta inte bort emalj utan bara utan bara resterna av bindemedlet.

## NOTERA

Twindent tar inte ansvar för skador som kan uppkomma vid felaktig bonding, användning eller avlägsnande av Twinkles.

# TWINKLES

## DENTAL JEWELRY

Lägg till en extra gnista i ditt vackra leende med Twinkles eleganta tandsmycken. Twinkles smycken har designats och tillverkats i Sverige i över 20 år. Vi använder 24-18 karat massivt guld och vitt guld med äkta diamanter och ädelstenar när vi skapar våra smycken.



Small Heart



Large Heart



Round w Diamond 0,01c



Round w Diamond 0,02c



Small Star



Large Star



Star w Diamond




Heart w Diamond



Female sign



Dollarsign

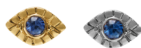

Evil Eye with Sapphire



Hamsa




Cross



Ankh Egyptian Cross



Star of David

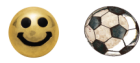

Smiley/Soccerball



Scorpion




Bunny



Horseshoe



Dolphin

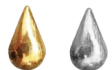

Droplet



Treble Clef



Anchor



Tic-mark

