

Dental Crystals Bonding Guide

Примечание: Кристаллы могут быть успешно установлены только на естественные зубы. Отбеливание зубов может изменить цвет кристалла.



1. Подготовьте зуб к бондингу так же, как для восстановления композитными материалами. Очистите поверхность зуба с помощью полировочной пасты или пескоструя..



2. Протравите эмаль в области наклейки, чуть большей чем размер самого украшения. Промойте и просушите.



3. Нанесите бонд на протравленную эмаль. Распылите его струей воздуха. Посветите 10 секунд.



4. Нанесите жидкий композитный материал на зуб.

5. Возьмите Twinkles, слегка надавив на украшение специальным приспособлением Starpicker. Не используйте пинцет! Установите Twinkles на композит. Слегка поверните Starpicker для отсоединения.




6. Удалите излишки материала, оставив небольшой слой композита вокруг украшения. Это обеспечит механическое сцепление.

При установке кристалла, удалите излишки материала, оставив небольшой слой композита вокруг кристалла. Это обеспечит механическое сцепление. Можно слегка надавить на внешнюю сторону украшения зондом с небольшим количеством воска на нем. Избегайте попадания композита на поверхность кристалла



7. Убедитесь в надежном контакте украшения с эмалью зуба. Светополимеризуйте лампой 20 секунд с внутренней стороны зуба и по 20 секунд на каждую из граней украшения с вестибулярной стороны зуба. При необходимости отполируйте композит по краям украшения с помощью резиновой насадки

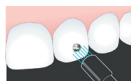

Совет: если у вас нет под рукой Starpicker, можно слегка надавить на внешнюю сторону украшения зондом с небольшим количеством воска на нем. Не используйте пинцет! Избегайте загрязнения обратной стороны украшения. Если это произошло, обработайте поверхность 70% раствором спирта. Не протравливайте кислотой!

Техника снятия украшения: снятие украшения с зуба выполняется подобно снятию брекетов. Снимите украшение, удалите композит и сошлифуйте его с поверхности эмали. Внимание: не повредите эмаль при удалении клея!

Предупреждение: компания Twindent не несет ответственности за какие-либо повреждения, которые могут возникнуть в процессе наклейки, использования или снятия Twinkles.

Примечание: перед установкой украшения Twinkles рекомендуем подписывать с пациентом: «Добровольное информированное согласие пациента на установку украшений для зубов Twinkles».