

## Certificação

Máscaras Covid-19 aprovado 12767/2020 CITEVE

5 lavagens uso geral (nível 3)

## A máscara é produzida à mão e tem as seguintes especificações:

**Camada externa • 100% poliéster reciclado:** Produzido através de desperdício plástico

**Camada interna • TNT (Tecido Não Tecido) 100% poliéster:** Protege de partículas grandes e fluídos

**Funcionalidade • Elástico ajustável:** Adaptabilidade do elástico à face, sendo que deverá dar um nó no elástico assim que sentir alguma tensão, certificando que não existem espaços entre o rosto e a máscara

**Funcionalidade • Clip moldável ao nariz:** Adaptabilidade extra na zona do nariz

## Na sua utilização tenha em consideração:

**Contaminação de si para outros: eficaz, com cuidados na utilização.** A utilização destas máscaras previne a contaminação a pessoas externas caso esteja infetado. Note que para que haja eficácia deverá seguir as recomendações dos cuidados na sua utilização referido neste documento.

**Contaminação de outros para si: parcialmente eficaz.** As máscaras incorporam TNT (Tecido Não Tecido) utilizado nas máscaras cirúrgicas que oferecem proteção de partículas grandes e fluídos.

## A máscara reutilizável deverá ser manuseada de forma correta, de acordo com Orientação da DGS (nº 019/2020 de 03/04/2020):

- a) Higienização das mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes de colocar a máscara;
- b) Colocação da máscara com a face interna virada para a cara, e a face externa virada para fora;
- c) Ajuste da extremidade rígida da máscara ao nariz, cobrindo a boca, o nariz e o queixo com a máscara, certificando que não existem espaços entre o rosto e a máscara;
- d) Não se deve tocar na máscara enquanto esta estiver em utilização; caso tal aconteça, deve ser feita imediatamente higienização das mãos;
- e) Recomenda-se uma utilização de cada máscara por um período máximo de 4h por dia, devendo a máscara ser substituída por uma nova no final desse período ou assim que se encontre húmida. A máscara retirada deve ser lavada antes de ser reutilizada;
- f) Se acidentalmente molhar a máscara deve trocá-la por outra bem seca logo que possível. A máscara molhada deve ser lavada antes de ser reutilizada;
- g) A remoção da máscara deve ser feita a partir da parte de trás (não tocando na frente da máscara), segurando nos atilhos ou elásticos;
- h) A máscara deve ser colocada individualizada num saco plástico fechado, até ser colocada na máquina de lavar;
- i) Deve ser feita nova higienização das mãos, no final da utilização e manuseamento da máscara.


## Cuidados na utilização

- A máscara deverá ser lavada antes de nova utilização
- A proteção da máscara só é garantida se respeitar as instruções de limpeza e conservação que se seguem
- A máscara deverá ser guardada em ambiente seco e resguardadas de potencial contaminação
- A máscara deverá ser lavada antes do seu primeiro uso
- Em caso de defeito ou dano não use a máscara, substitua por outra

## Colocação da máscara



## Retirada da máscara

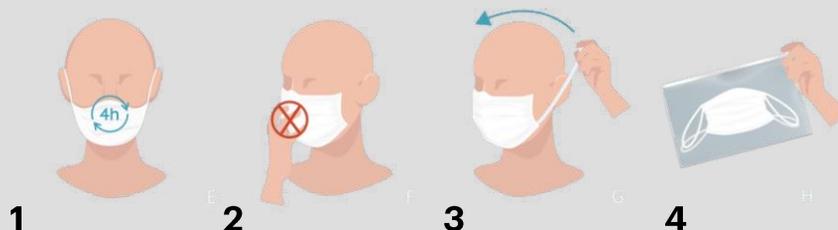

## Manutenção

As máscaras deverão ser lavadas usando um ciclo de lavagem normal, completo, a 60°C com detergente, após cada utilização. O utilizador terá que garantir que a máscara se encontra bem seca, antes da sua utilização.



Temperatura de lavagem à máquina a 60°C (processo normal)



Não permite limpeza a seco

## Limitações ao uso

- Este dispositivo não é um dispositivo médico. Não cumpre o regulamento das máscaras cirúrgicas (regulamento UE/2017/745) nem dos equipamentos de proteção individual (regulamento UE/2016/425)
- A máscara deve ser usada bem seca depois de lavada. A máscara molhada / húmida diminui a proteção da máscara
- A máscara só pode ser usada por outra pessoa após lavagem.
- Se acidentalmente molhar a máscara deve trocá-la por outra bem seca logo que possível. A máscara molhada deve ser lavada antes de ser reutilizada
- Ao fim da utilização diária recomendada ou sempre que regressar a casa a máscara deve ser lavada antes de ser reutilizada