

Instructie gezichtsbeschermer

Wij leggen aan de hand van foto's stap voor stap uit hoe de gezichtsbeschermer in elkaar gezet moet worden.

Inhoud:



Resultaat:



Stap 1: verwijder aan **BEIDE** zijden de folie (groene en doorzichtige)

Stap 2: doe de elastieken band door de kleurstrook (zie foto's)



Stap 3: schuif de kleurstrook met 1 hoekje schuin in het scherm. Haak hem vast en schuif dan de andere hoek erdoorheen (zie foto's)

