

L'esthétique parfaite alliée
à la résistance

GC Initial™ LRF BLOCK

Bloc CAD/CAM
céramique feldspathique
renforcé en leucite



GC

GC Initial™ LRF BLOCK

Bloc CAD/CAM - céramique feldspathique renforcé en leucite



Fabrication de restaurations céramique indirectes :

- Facette pelliculaire
- Inlays/onlays
- Couronnes unitaires antérieure et postérieure partielle ou complet

Un bloc esthétique universel pour le cabinet dentaire et le laboratoire de prothèses dentaires (mandrin CEREC® / inlab et Universal)


Ses atouts

- Le meilleur des 2 mondes – combine l'esthétique et la résistance des blocs céramique CAD/CAM.
- Initial™ LRF est le plus résistant des blocs en céramique feldspathique classique

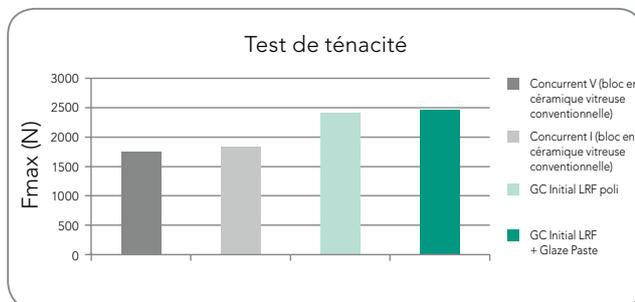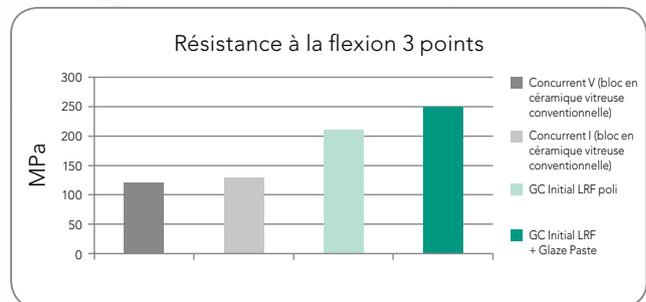


- La plus haute résistance à la flexion et ténacité de sa catégorie, avec polissage ou avec glazure

- Bloc compacté haute densité
- Moins de shipping

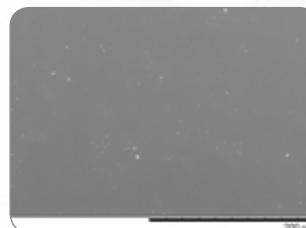

SEM image 1 (usiné & poli) surface céramique dense et hautement compactée

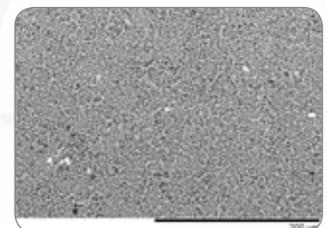

SEM image 2 (usiné & mordancé) microstructure dense parfaitement cristallisée

- Surface extrêmement lisse après usinage
- Cuisson non nécessaire pour bénéficier de propriétés physiques exceptionnelles




Surfaces extrêmement lisses après usinage avec adaptation marginale parfaite.

Esthétique

- Polissage facile avec un kit conventionnel
 - Le polissage manuel permet d'obtenir rapidement un brillant et une esthétique superbes.



- Effet caméléon pour une intégration optimale de la teinte en bouche
 - Dynamique de la lumière naturelle avec une translucidité, une fluorescence et un caractère opalescent parfaitement équilibrés

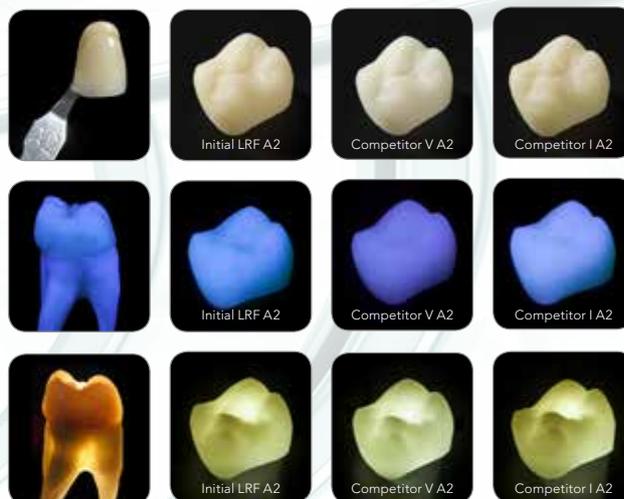

Photos de MDT M. Brüsch, Allemagne / Quini. M, Espagne

- Une glazure spéciale pour la cuisson de la céramique
 - Glazure et cuisson prennent plus de temps mais permettent des résultats esthétiques plus personnalisés



Un brillant profond jusqu'aux fissures, sans polissage



Cas clinique



1^{ère} molaire supérieure (26) montrant une restauration à l'amalgame défectueuse. Décision prise de créer un inlay CAD/CAM céramique



Préparation de la cavité selon les critères bio-mécaniques du "tout céramique"



GC Initial LRF juste après usinage



Contact, occlusion, position, anatomie sont finalisés en bouche



Collage avec G-CEM LinkForce



Résultat final juste après la mise en place

Manipulation facile et rapide – usinez, polissez et assemblez

GC Initial™ LRF BLOCK

Un bloc esthétique universel pour le cabinet dentaire et le laboratoire de prothèses dentaires (mandrin CEREC® / inlab et Universal)

Conditionnement

5 teintes Vita en deux translucidités (HT, LT), et une teinte bleach, disponibles en 3 tailles

GC Initial™ LRF BLOCK, 5 pièces		
CEREC®/inlab	UNIVERSAL	Teinte/Translucidité et taille
876501	876551	A1-HT-12
876502	876552	A1-HT-14
876503	876553	A1-HT-14L
876504	876554	A1-LT-12
876505	876555	A1-LT-14
876506	876556	A1-LT-14L
876507	876557	A2-HT-12
876508	876558	A2-HT-14
876509	876559	A2-HT-14L
876510	876560	A2-LT-12
876511	876561	A2-LT-14
876512	876562	A2-LT-14L
876513	876563	A3-HT-12
876514	876564	A3-HT-14
876515	876565	A3-HT-14L
876516	876566	A3-LT-12
876517	876567	A3-LT-14
876518	876568	A3-LT-14L

GC Initial™ LRF BLOCK, 5 pièces		
CEREC®/inlab	UNIVERSAL	Teinte/Translucidité et taille
876519	876569	A3.5-HT-12
876520	876570	A3.5-HT-14
876521	876571	A3.5-HT-14L
876522	876572	A3.5-LT-12
876523	876573	A3.5-LT-14
876524	876574	A3.5-LT-14L
876525	876575	B1-HT-12
876526	876576	B1-HT-14
876527	876577	B1-HT-14L
876528	876578	B1-LT-12
876529	876579	B1-LT-14
876530	876580	B1-LT-14L
876531	876581	BL-12
876532	876582	BL-14
876533	876583	BL-14L

GC Initial™ LRF Glaze Paste & Liquide	
876590	Glaze Paste & Liquide



GC EUROPE N.V.
 Head Office
 Researchpark
 Haasrode-Leuven 1240
 Interleuvenlaan 33
 B-3001 Leuven
 Tel. +32.16.74.10.00
 Fax. +32.16.40.48.32
 info.gce@gc.dental
<http://www.gceurope.com>

GC Europe NV
Benelux Sales Department
 Researchpark
 Haasrode-Leuven 1240
 Interleuvenlaan 13
 B-3001 Leuven
 Tel. +32.16 74.18.60
 info.benelux@gc.dental
<http://benelux.gceurope.com>

GC AUSTRIA GmbH
 Swiss Office
 Bergstrasse 31c
 CH-8890 Flums
 Tel. +41.81.734.02.70
 Fax. +41.81.734.02.71
 info.switzerland@gc.dental
<http://switzerland.gceurope.com>

