



Drewe Design Rev.060319

**P308+P313** EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. **P333+P313** En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. **P501** Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

**Contient:** acrylate d'uréthane dans méthacrylate d'hydroxypropyle (HPMA), oxyde de phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine, pigments colorés

## Numéro de lot / date de péremption

Le numéro de lot et la date de péremption se trouvent sur chaque emballage de FotoDent® gingiva. En cas de réclamation sur le produit, prière de toujours indiquer le numéro de lot du produit. N'utilisez pas le produit une fois la date de péremption dépassé.

## Modes de livraison

**REF** D35850

FotoDent® gingiva

1,0 kg Bouteille



Agiter avant l'utilisation



Attention



Rx only

Etat d'information : 03.2019



**Drewe Dentamid GmbH**

Max-Planck-Str. 31 • 59423 Unna/Germany  
www.dentamid.drewe.de • dentamid@drewe.de

# FotoDent® gingiva 385 nm

## Mode d'emploi

FR

[www.dentamid.drewe.de](http://www.dentamid.drewe.de)



## Description du produit

FotoDent® gingiva est un matériau à base de résine (méth)acrylate pour le système DLP avec 385 nm LED pour la production des masques gingivaux. Les appareils de photopolymérisation PCU LED N<sub>2</sub>, FotoDent® flash et RS Cure sont recommandés pour le postdurcissement de composants fabriqués en FotoDent® gingiva et sont parfaitement adaptés au processus de production.

## Traitement

- Pour le traitement du FotoDent® gingiva, nous recommandons de porter un équipement de protection individuelle, par ex. des gants, lunettes de protection, etc. adaptés.
- Les récipients du FotoDent® gingiva doivent être bien agités env. une heure avant l'utilisation.
- Versez précautionneusement le FotoDent® gingiva dans le récipient défini de l'installation de production.
- Voir également les consignes d'application dans les instructions de l'imprimante.
- Enlevez des bulles éventuelles avec un objet propre.
- Températures de traitement :
 

Imprimante Rapid Shape DII	23 ± 3 °C
Asiga MAX UV	35 ± 3 °C
- Sélectionnez les réglages des paramètres spécifiques au produit pour votre processus d'impression de FotoDent® gingiva.
- Une fois le processus de construction terminée, un post-traitement est recommandé.
- Un temps d'égouttage de 10 minutes env. est recommandé après le démarrage de la plateforme.
- Les composants mouillés avec de la résine liquide peuvent être nettoyés avec de l'isopropanol (97 %) pendant env. 2 x 6 minutes. Pour un nettoyage particulièrement efficace avec de l'isopropanol, il est recommandé d'utiliser d'installations à ultrasons protégées contre les explosions. Le nettoyage s'effectue avec de l'alcool isopropylique dans un gobelet séparé dans des conditions dynamiques pour environ 2 x 6 min. Recommandation: bécet et agitateur magnétique, shaker de laboratoire ou nettoyeur à ultrasons. Répéter le processus de nettoyage s'il a été insuffisant (endroits brillants sur l'objet après séchage).

- Pour le postdurcissement des composants, veuillez sélectionner les réglages des paramètres pour votre processus. Vous trouverez d'autres imprimantes qualifiées sur notre site Internet [www.dreve.dentamid.de](http://www.dreve.dentamid.de).

- Postdurcissement :

PCU LED N <sub>2</sub>	
Rapid Shape DII / Asiga MAX UV	8 min. à 80 % de puissance lumineuse (vide)

FotoDent® flash	
Rapid Shape DII / Asiga MAX UV	10 min. + 1 min. pré gaz

RS Cure	
Rapid Shape DII / Asiga MAX UV	8 min. à 75 % de puissance lumineuse (vide)

- Aucune procédure ne peut exclure des saletés dues à la construction ou une rupture du matériau ainsi que des saletés dues à des erreurs de commande. Il est toutefois possible de filtrer le FotoDent® gingiva en raison de la faible viscosité. Il est recommandé de retirer à intervalles réguliers le récipient de l'installation de production afin d'homogénéiser et de filtrer le contenu. Les inclusions de bulles apparues chez le FotoDent® gingiva peuvent être enlevées après une durée de service de 1 à 2 heures env.

**Ne jamais exposer le matériau liquide à la lumière afin d'éviter de compromettre la qualité. Des différences du processus de fabrication effectué peuvent entraîner la modification des propriétés mécaniques et/ou des variations de couleurs du matériau du FotoDent® gingiva.**

## Dangers possibles

Veuillez observer la fiche de données de sécurité en utilisant le FotoDent® gingiva.

**Mentions de danger : H319** Provoque une sévère irritation des yeux. **H317** Peut provoquer une allergie cutanée. **H411** Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**Conseils de prudence : P261** Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. **P273** Éviter le rejet dans l'environnement. **P280** Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / un équipement de protection du visage.