



CÓMO UTILIZAR EL SELLO OSTOFORM

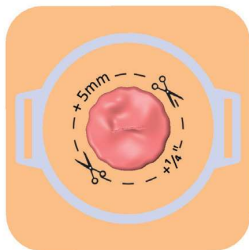


PASO 1

Corte la abertura de la bolsa según el tamaño del estoma + 5 mm (1/4")
p. ej. para un estoma de 25 mm, corte la abertura de la bolsa a 30 mm
p. ej. para un estoma de 1", corte la abertura de la bolsa a (1 1/4")

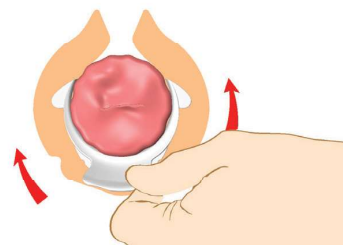


PASO 2

Coloque la boquilla directamente debajo del estoma.

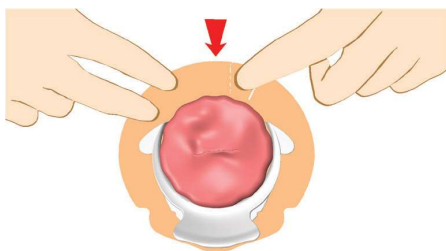

PASO 3

Envuelva las lengüetas alrededor del estoma para garantizar un ajuste ceñido

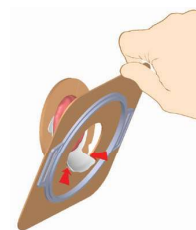


PASO 4A

Para una fijación segura de la bolsa de 2 piezas, coloque el disco sobre el sello primero, asegurándose de que la boquilla pase a través la apertura. Posteriormente, asegure la bolsa al disco.



PASO 4B

Para una fijación segura de la bolsa de 1 pieza, asegúrese de que la boquilla del sello ostofom esté completamente dentro de la abertura de la bolsa.
Posteriormente, tire de la bolsa para arriba hacia la ranura que está por debajo de la boquilla

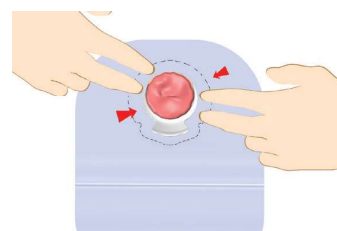

PASO 5

Presione el adhesivo de la bolsa contra el sello y la piel para lograr una buena adhesión.