

Corsinel®

Live as you like

StomaSafe Classic Faja De Ostomía



Apoya, estabiliza y oculta la bolsa de ostomía

Reduce el ruido de la bolsa

Adecuado para sistemas de 1 y 2 piezas



Breathable



4-way stretch



Latex-free

TYTEX®

Instrucciones de uso

1

Ponte el Stomasafe Classic



2

Tire de la bolsa de ostomía a través de la abertura del estoma en el bolsillo interior



3

Coloque la bolsa de ostomía en el bolsillo interno



4

Al usar una bolsa drenable, la abertura de la bolsa se coloca a través de la parte inferior de la faja.



El cinturón de soporte para ostomía StomaSafe oculta y sostiene la bolsa de ostomía, lo que permite al usuario vivir una vida cotidiana con actividad física normal. Reduce el ruido de la bolsa y se puede usar con sistemas de 1 y 2 piezas.

Características:

- Proporciona soporte, estabilidad cubriendo de bolsa.
- Fija la bolsa de ostomía, ayudando al usuario a sentirse seguro
- Oculta y sostiene la bolsa de ostomía.
- Reduce el ruido de la bolsa y del contenido.
- También recomendado para uso nocturno y durante el día cuando se necesita de un soporte ligero o baja actividad física.
- El bolsillo interior presenta un orificio para la bolsa del estoma y una abertura de drenaje inferior, lo que facilita su uso con bolsas drenables y cerradas
- Se puede usar con sistemas de 1 y 2 piezas
- Material suave y elástico: fácil de estirar
- Tejido flexible y transpirable, cómodo de llevar y no irrita la piel.
- lavable
- material libre de látex
- Certificación libre de sustancias nocivas según el estándar 100 de Oeko-Tex 100

Indicaciones:

StomaSafe Classic está especialmente diseñado para la fijación y el soporte de la bolsa de ostomía. Se puede usar para ileostomía, colostomía y urostomía. Recomendado para uso nocturno, pero se puede usar libremente durante el día si desea un soporte ligero..

Precauciones:


Si es demasiado pequeño / ajustado, el producto puede influir en el drenaje del estoma. Si tiene alguna pregunta sobre el tamaño, el uso, la indicación o si se presentan molestias o problemas discontinue su uso y consulte a su especialista.

material libre de látex

Medida de la máxima

Circunferencia abdominal

Tallas recomendadas

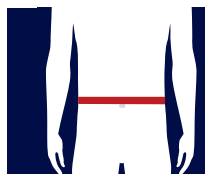

SIZE	CM	IN
S	80 - 100	31,5 - 39,5
M	95 - 115	37,5 - 46,5
L	105 - 130	41,5 - 51
XL	115 - 145	45,5 - 57

Colores Disponibles:



Blanco

Composicion:

49% Algodón
24% Polyamide
18% Elastane
9% Polyester.

Cuidados :



Lavar con colores similares y en una bolsa de lavado.