

Corsinel®

Live as you like

StomaSafe Plus Faja De Ostomía



Apoya, estabiliza y oculta la bolsa de ostomía
Reduce el ruido de la bolsa
Adecuado para sistemas de 1 y 2 piezas.
Calidad de microfibra sin costuras



Breathable



4-way stretch



Seamless



Latex-free

TYTEX®

Instrucciones de uso

1

Tire de la ropa interior tipo StomaSafe (la impresión debe ubicarse en el interior en la parte superior).




2

Tire de la bolsa de ostomía a través de la abertura interna.



3

Coloque la parte inferior de la bolsa de ostomía en el bolsillo pequeño en la parte inferior de la capa externa.

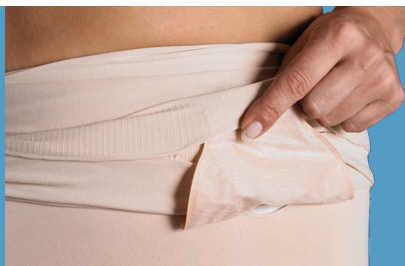

4

Dobla hacia abajo la capa exterior.



El cinturón de soporte para ostomía StomaSafe Plus oculta y apoya la bolsa de ostomía, lo que permite al usuario vivir una vida activa. Reduce el ruido del contenido y puede ser utilizado con sistemas de 1 y 2 piezas.

Características:

- Proporciona soporte, estabilidad y es una cubierta de bolsa: unidad todo en uno
- Fija la bolsa de ostomía, ayudando al usuario a sentirse seguro
- Oculta y apoya la bolsa de ostomía y permite al usuario vivir una vida activa.
- Reduce la bolsa y el ruido del contenido
- La capa interna tiene una apertura para la bolsa del estoma.
- Se puede usar con sistemas de 1 y 2 piezas
- Calidad de microfibra: suave para la piel
- Tejido flexible que es transpirable, cómodo de llevar y no irrita la piel.
- Sin costuras para pieles sensibles.
- Material suave y elástico que es fácil de tirar
- material libre de látex
- Probado para sustancias nocivas según el estándar 100 de Oeko-Tex

Indicación:

StomaSafe Plus está especialmente diseñado para la fijación y soporte de una bolsa de ostomía. Se puede usar para ileostomía, colostomía o urostomía. Recomendado para uso durante el día, cuando se desea más soporte.

Precaución:

Si el producto es demasiado pequeño o está demasiado ajustado este puede afectar el drenaje del estoma. Si tiene alguna pregunta sobre el tamaño, el uso, la indicación o si se producen molestias o problemas, consulte con un especialista.

Colores Disponibles:



White Black Tan

Composición:


91% Polyamid
9% Elastane.

Cuidados:



Lavar con colores similares y en una bolsa de lavado.

Medida de la máxima circunferencia abdominal

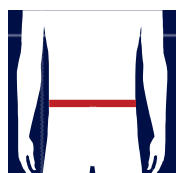

Tamaños recomendados

SIZE	CM	IN
S/M	80 - 110	34 - 44
M/L	105 - 125	42 - 50
L/XL	120 - 140	48 - 56

www.carefix.eu



TYTEXA/S has been certified according to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 13485



For further information please contact:

Dealer:

