

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La almohadilla superabsorbente de Erland Care es un nuevo producto “todo en uno” que garantiza una fijación segura y estable de la bolsa y la placa. Esto reduce el riesgo de fugas debajo de la placa. La almohadilla superabsorbente se adhiere directamente a la piel y absorbe un alto volumen de efluente de las bolsas de estoma cuando se haya disuelto el adhesivo.

Este producto superabsorbente consta de:

- Una capa de silicona suave, blanda y perforada, que va en contacto con la piel.
- Una almohadilla interior con extraordinarias propiedades de retención de agua.
- Una película de poliuretano transpirable.

Téngase en cuenta:

Erland Care está indicado exclusivamente para uso externo.

Erland Care no es estéril y no debe utilizarse cuando exista infección.

2. INDICACIÓN

Erland Care se ha desarrollado para usuarios de bolsas de estoma, muchos de los cuales tienen problemas con la disolución del adhesivo en la bolsa de estoma y la fuga del contenido de esta. Al colocar Erland Care en el exterior del disco adhesivo de la bolsa de estoma, se reduce el riesgo de fugas mediante la estabilización de la almohadilla, la cual absorberá cualquier fuga. Esto evita filtraciones en la ropa y permite al usuario ganar tiempo para sustituir la bolsa de estoma.

3. PRECAUCIONES

Este dispositivo es de una sola unidad y no debe reutilizarse.

La reutilización de productos de un solo uso plantea un gran riesgo para el usuario o el paciente.

Puede producir contaminación o deterioro de la funcionalidad del producto, lo que puede provocar lesiones graves o la muerte.

4. CONTRAINDICACIONES

La almohadilla superabsorbente de Erland Care está contraindicada para:

- Úlceras resultantes de una infección, como tuberculosis o sífilis.
- Micosis profundas.
- Quemaduras de tercer grado.
- Pacientes alérgicos a materiales superabsorbentes.

Si aparecen signos de irritación o infección, póngase en contacto con la autoridad sanitaria correspondiente. Puede reanudar el uso cuando presente un estado de curación normal.

5. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Erland Care solo debe utilizarse para la aplicación del estoma.

6. INFORMACIÓN DE USO

6.1 Para un uso normal con un estoma, Erland Care se aplica de la siguiente manera:

1. Limpie con cuidado el área peristomal.
2. Extraiga el producto Erland Care del envase.
3. Pegue la bolsa de estoma como de costumbre.
4. Tire de toda la bolsa de estoma a través del orificio situado en el centro del producto de Erland Care, para colocarlo debajo de la bolsa de estoma, pero encima de la superficie adhesiva de esta. El lado recubierto con el revestimiento protector debe mirar hacia dentro.
5. Retire uno de los revestimientos protectores y alise suavemente el producto para que quede en su lugar.
Retire el revestimiento restante y continúe alisando el producto para que quede bien colocado.
6. Es importante evitar las arrugas. Intente que la superficie quede lo más lisa posible (al principio puede ser difícil de lograr, pero mejora si continúa alisando).

6.2 Retirada/cambios del material absorbente.

El volumen de exudado determina el intervalo entre los cambios de vendaje de Erland Care. Debe cambiarse inmediatamente cuando esté saturado.

Tiempo de uso >24 h.

7. OBSERVACIONES

Erland Care es un artículo de un solo uso. Una vez retirado del envase y quitados los revestimientos, el producto se considera como usado y no se debe quitar ni volver a utilizar.