

fusseinlagen.de

So geht`s

Mit dieser Schritt-für-Schritt Anleitung kommen Sie ganz einfach in wenigen Minuten zu ihren Einlagen:

Für die weiteren Schritte benötigen Sie lediglich:

- Ein Smartphone mit Kamera und Frontkamera
- Ein Blatt Papier im Format DIN A 4.

1. Legen Sie das Blatt Papier im Format DIN A 4 an eine senkrechte Fläche (z.B. Wand oder Schrank) auf den Boden (möglichst fester Boden, kein Teppich)



2. Ziehen Sie Schuhe und Strümpfe aus und stellen Sie einen Fuß auf das Papier, die Ferse ganz an die senkrechte Fläche. Dabei macht es nichts aus, wenn ihr Fuß länger als das Papier sein sollte



3. Machen Sie ein Digitalfoto von oben von ihrem Fuß. Smartphone dabei idealerweise seitlich am Oberschenkel halten



Wiederholen Sie das Gleiche mit dem anderen Fuß

4. Setzen Sie sich auf einen Stuhl und stellen Sie ihr Smartphone um auf Frontkamera (wie für ein Selfie), mit Blitz und (wichtig!) Selbstausröser


5. Legen Sie das Smartphone vor sich auf den Boden und halten Sie ihren Fuß zur Probe direkt gerade über das Smartphone, so dass Sie den kompletten (!) Fuß auf dem Display sehen



6. Lösen Sie den Selbstauslöser aus und halten Sie ihren Fuß wie vorher geprobt ruhig über das Smartphone, bis das Foto ausgelöst ist (Wichtig: Der Fuß muss in seiner ganzen Länge auf dem Foto sichtbar sein)

Wiederholen Sie das Ganze mit dem anderen Fuß

7. Falls Sie wollen, können Sie nun auf den Fotos mit einer Bildbearbeitungsapp schmerzhafte Stellen am Fuß anmarkern

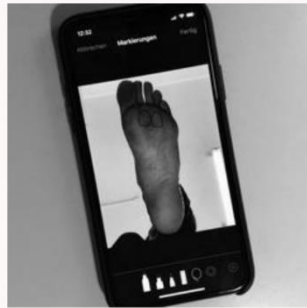

8. Senden Sie uns nun alle 4 Fotos per Mail an info@fusseinlagen.de, oder per SMS oder WhatsApp an **+49 151 22106698**. Bitte im „Betreff“ Name/Vorname und/oder Bestellnummer angeben. Falls eine ärztliche Verordnung vorliegt, schicken Sie uns auch davon ein Foto mit 

9. Klicken Sie hier und füllen Sie den Einlagen-Fragebogen aus.

Nach Beantwortung aller Fragen klicken Sie auf fertig und schließen Sie das Fenster

Wenn Sie diese Schritte abgeschlossen haben, liegen uns alle Informationen vor, die wir zur Anfertigung ihrer orthopädischen Einlage brauchen.

10. Wählen Sie nun im **Shop** die für ihre Bedürfnisse geeignete Einlage aus. Legen Sie die Einlage in der gewünschten Größe in den Warenkorb und schließen Sie den Einkauf ab. Sie erhalten dann ihre Bestellbestätigung.

Nach Eingang ihrer Bestellung skalieren wir die Fotos und erhalten mittels Anwendung spezieller Filter aussagekräftige Darstellungen ihrer Fußgewölbe und eventueller Druckstellen oder Fehlstellungen.



Nach diesen Vorgaben und unter Einbezug der Auswertung ihres Einlagen-Fragebogens fertigen wir ihre orthopädischen Einlagen individuell auf ihre Füße angepasst in unserer Werkstatt an. Nach wenigen Tagen erhalten Sie dann ihre Einlagen per DHL zugesandt. Alternativ können Sie ihre Einlagen natürlich auch gerne bei uns im Geschäft in Ingolstadt, Ziegelbräustraße 10 zu den Geschäftszeiten abholen.