

TheraLift



TM3000	TM3001	TM3002	TM3003	TM3004
--------	--------	--------	--------	--------

Datos del producto	
Descripción	<p>Sillón eléctrico ergonómico reclinable con asistencia para colocarse de pie, masaje y calor.</p> <p>Hasta 3 posiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Silla ● Semicama ● Levantamiento <p><i>*El sillón puede quedarse en posiciones intermedias. La posición de este es graduada según la necesidad y requerimiento del usuario*</i></p>
Partes del producto	<ul style="list-style-type: none"> ● Respaldo acolchado de 3 secciones. ● Apoya pies acolchados. ● Apoyabrazos acolchado. ● Asiento acolchado. ● Base con ruedas traseras sin frenos. ● Bolsillo lateral derecho. ● Control de masajes y calor. ● Control de posiciones del sillón.
Tallas	N/A
Materiales	<p>Producto: Motor, mecanismo metálico, madera maciza</p> <p>Relleno: Espuma de alta densidad - 28Kg/m³.</p> <p>Cubierta: Ecocuero con costuras resistentes, reforzadas y lavable.</p>
Materiales por SKU	<p>TM3000: Tapicería de Eccocuero a base de PU.</p> <p>TM3001: Tapicería de tela a base de PU.</p> <p>TM3002: Tapicería de tela a base de PU.</p> <p>TM3003: Tapicería de tela a base de PU.</p> <p>TM3004: Tapicería de Eccocuero a base de PU.</p>
Peso máximo soportado	136 kg

Dimensiones del producto	84 x 92 x 104 cm
Ángulo de inclinación	<ul style="list-style-type: none"> • Inclinación entre el suelo y la base del sillón en posición de alzado: 15° • Desde 90° en posición de silla a 160° en posición de Semicama
Datos de almacenamiento	
Peso Neto Producto	45 Kg
Peso Bruto Producto	N/A
Dimensiones del empaque	N/A
Dimensiones de la caja de envío	88 x 77 x 67 cm
Peso de la caja de envío	47 Kg
Cantidades por caja de envío	1
Limpieza	<p>No lavar. No limpiar en seco. No desmonte ninguna pieza para limpiarla por separado.</p> <p>Limpieza general: Se recomienda una limpieza regular con una solución de jabón o alcohol isopropílico.</p>
Condiciones de almacenamiento	Evitar la luz solar directa. Almacenar en un lugar fresco y seco.
Especificaciones técnicas	
Sistema	Eléctrico. Solo en caso de fallas eléctricas o desconexión de la corriente, el sillón volverá de forma automática a su posición original.
Tensión de salida nominal	A2900201: CC29V 2.0A; A2900201: CC29V 2.0A; A2900181: CC29V 1.8A; A2900181: CC29V 1.8A; A2900151: CC29V 1.5A; A2900151: CC29V 1.5A;
Rango de voltaje de entrada	CA 100 – 240V, 50/60hz; 1.5A