

Arnés de Cuerpo Completo

Manual de Uso



Arnés de Cuerpo Completo

Manual de Uso

Tabla de Contenidos

Posicionamiento del Arnés	3-4
Colocación del Arnés de una Sola Pieza en la Grúa	5
Instrucciones de Lavado	6
Especificaciones	6
Garantía	6
Contacto	6

IMPORTANTE

Lea y entienda estas instrucciones antes de ensamblar o usar el arnés. Si no entiende alguna parte de estas advertencias, precauciones o instrucciones, póngase en contacto con profesionales de la salud para recibir dirección de para uso de este producto. Si el arnés no es usado correctamente, podría producirse lesiones personales y daños en el arnés como resultado.

Si algún componente dañado o perdido, por favor póngase en contacto inmediatamente con su Distribuidor Autorizado Theramart.

Revise cuidadosamente el arnés antes de cada uso para ver que no haya daños o desgastes en las costuras, telas, las correas y los ganchos de las correas. Los arneses dañados, cortados o desgastados pueden producir lesiones personales graves al usuario. Use el arnés que se encuentre en buen estado. Deshágase de los arneses viejos e inutilizables.

No exceda la capacidad máxima de carga.

Theramart no se responsabiliza por ningún daño o lesión causado por la aplicación o el uso inapropiado de este producto.

Posicionamiento del Arnés

1. Compruebe el peso del paciente y la capacidad máxima de carga del arnés.
Asegúrese de que el peso del paciente no exceda la capacidad máxima del arnés.
2. Revise cuidadosamente los siguientes procedimientos antes de intentar levantar al paciente.

NOTAS:

Para este procedimiento observe la Figura 1 y Figura 2.

Siga el siguiente método para mover fácilmente al paciente y evitar presionarse a sí mismo.

3. Ubique al paciente en el centro de la cama y recostándose sobre su espalda.
4. Doble el arnés por la mitad (longitudinalmente) y coloque el arnés al lado del paciente. Vea el Detalle "A" Figura 1.


NOTAS:

El pliegue o la abertura para el inodoro del arnés debe estar más cerca del paciente cuando este doblado.

El borde superior de la tela del arnés debe estar apenas por encima de la cabeza del paciente. El borde inferior del arnés debe estar algunas pulgadas por encima de la rodilla del paciente.

5. Con un asistente sosteniendo al paciente, y el segundo asistente empuja el arnés doblado debajo del paciente sin voltearlo/a. Consulte para el Detalle "B" Figura 1.


FIGURA 1: POSICIONAMIENTO DEL ARNÉS

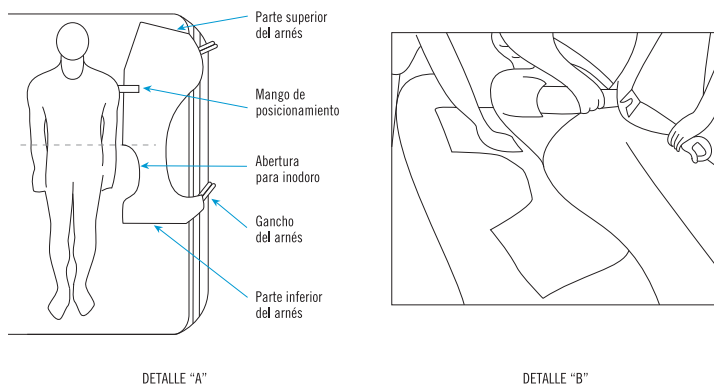

Posicionamiento del Arnés (cont.)

6. Con los asistentes uno de cada lado de la cama y y contra el colchón, el asistente del lado izquierdo de la cama colocará su mano derecha sobre la rodilla elevada del paciente y su mano izquierda debajo del hombro derecho del paciente, empuje lentamente la rodilla y ayude con ligero levantamiento del hombro. El paciente rodará fácilmente sobre su costado. Consulte para Detalles Figura 2 “A”.
7. Con el paciente en esa posición, empuje suavemente la tela del arnés (asiento y la espalda) por debajo de el/ella. Consulte para Detalles Figura 2 “B”.

FIGURA 2: RUEDE AL PACIENTE SOBRE SU LADO

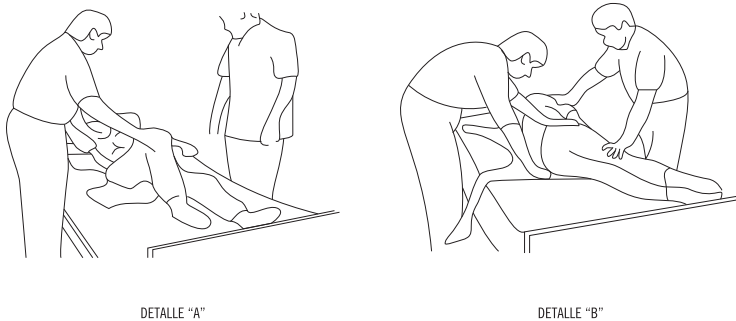

NOTA:

La cabeza del paciente debe colocarse en el apoyacabeza justo debajo del borde superior para una mayor comodidad y el borde inferior de la sección del asiento se coloca algunas pulgadas por encima de la parte posterior de las rodillas del paciente.

8. Ruede al paciente sobre su espalda. NOTA: Los asistentes revertirán los roles.
9. Una vez que el paciente haya sido ubicado nuevamente sobre su espalda, ahora debe girar al paciente hacia su lado derecho (de frente al asistente de la izquierda)
10. Con un asistente a cada lado de la cama y en contra del colchón, el asistente en el lado derecho de la cama elevará la rodilla izquierda y colocará su mano izquierda del paciente, empuje lentamente la rodilla y ayúdelo con una ligera elevación del hombro y el paciente rodará fácilmente de lado. Consulte el Detalle Figura 2 “A”.
11. Jale de la tela del arnés (asiento y espalda) sobre el colchón hasta que quede lisa.
12. Ruede al paciente sobre su espalda y así debería quedar en el centro del arnés.
13. Coloque la grúa para su uso. Consulte Colocación de Arnés de una Sola Pieza en la Grúa.

Colocación del Arnés de una Sola Pieza en la Grúa

NOTA: Para este procedimiento, consulte la FIGURA 3.

1. Coloque las correas del arnés sobre los ganchos de la barra giratoria. Para el levantamiento uniforme del paciente, haga coincidir los colores correspondientes en cada lado de los ganchos.

⚠ ADVERTENCIA


Cuando enganche el arnés a la grúa, la correa más corta **DEBE** estar en la parte posterior del paciente para el apoyo. Usar las correas más largas hará poco o ningún soporte en la espalda del paciente. Las correas del arnés están codificadas por colores y se pueden usar para darle diferentes posiciones al paciente. Los colores hacen fácil el enganche de ambos lados del arnés de manera igualada. Asegúrese que la cabeza del paciente tenga suficiente soporte cuando lo levante.

2. Consulte Levantar al paciente en el Manual del propietario de la Grúa para Pacientes.

NOTA:

Para las barras giratorias de elevación que tiene tres puntos de enganches por lado, la conexión central **SOLO** se utiliza para los arneses que tienen tres juegos de correas por lado o arneses que usan cadenas o correas ajustables.

FIGURA 3: COLOCACIÓN DEL ARNÉS DE UNA SOLA PIEZA EN LA GRÚA

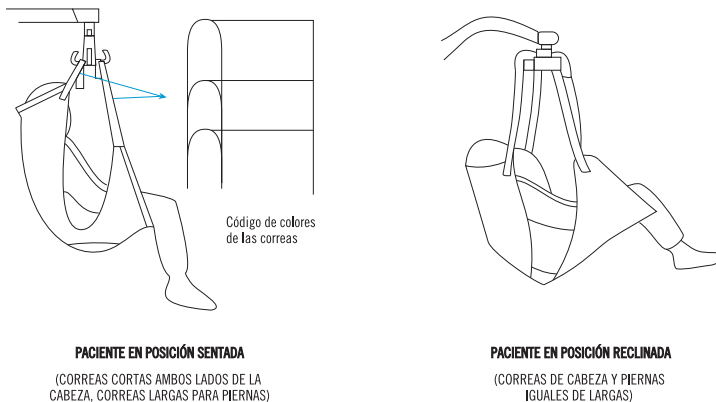

Instrucciones de Lavado

1. Lavar a máquina con agua tibia o fría
 - Temperatura máxima de lavado 185 °F (85 °C)
 - Lavar a 160 °F (71° C) por 3 minutos
 - Lavar a 145° F (63 °C) por 10 minutos
 - Secar al aire, o secar en secadora en fresca o muy baja temperatura
 - No secar en secadora a alta temperatura
2. Use detergente sin enzimas
3. No use cloro
4. No lave con otros colores

ADVERTENCIA

Después de cada lavado (de acuerdo con las instrucciones del arnés), revise el (los) arnés para ver si están gastadas, desgarradas o tiene costuras flojas. El arnés roto, deshilachado, cortado no son seguros y podría producirse una lesión. Descártelo inmediatamente.

Especificaciones

MATERIAL DEL ARNÉS	MATERIAL DE LAS CORREAS
Polyester	Polipropileno

Garantía Limitada de Por Vida

Su Arnés Theramart es un producto garantizado que está libre de defectos en los materiales y en su manufactura por vida para el comprador consumidor original. La vida útil de este producto es de seis meses a partir de la fecha de compra bajo uso normal, sin embargo, el uso excesivo o un lavado excesivo pueden reducir la vida útil del producto. En el caso de un defecto estará cubierto por la garantía, repararemos o reemplazaremos el dispositivo a nuestra discreción. Esta garantía no cubre la falla del dispositivo debido al mal uso o negligencia del propietario, o el desgaste normal.

Información de Contacto

Florida, Estados Unidos de America
+(1) (305) 521 9440
info@theramart.com
www.theramart.com