

CM TraumaMatratze™ Anwendung



Patient fertig fixiert mit CMCOVER und CMTFIX für den Kopf.

1. Platzieren Sie den Stoffteil des CMTFIX (nur Kopfstütze) oder CMCOVER (mit Wärme-
decke) symmetrisch auf den Kopfteil und befestigen Sie es mit den Klettbindern unten.
Warten Sie mit dem Schaumteil bis der Patient auf die TraumaMatratze fixiert wurde.

2. Fixieren Sie **zuerst den Brustkorb des Patienten** mit den sich kreuzenden Fixierungs-
bändern. Dann die Beine und **zuletzt den Kopf mit dem CMTFIX**.

**Fixieren Sie NIE zuerst den Kopf - der Patient könnte unvermittelt aufstehen und
sich am Nacken verletzen.**

3. Platzieren sie die Kopffixierung (CMTFIX) fest um den Kopf des
Patienten und drücken sie die unteren Klettverschlüsse auf den fixierten
Stoffteil.

4. Die Sicherung des Kopfes wird durch die weißen Klettbinden
abgeschlossen. Platzieren Sie diese an den Seiten der Kopffixierung
und/oder an den roten Klettverschlüssen.

5. Mit CMCOVER: Wickeln sie den wärmenden Deckenteil um den
Patienten.



Reinigung und Vorbereitung für den nächsten Patienten:

Die Matratzen-Oberfläche sowie alle Teile der Matratze sind mit einem
Desinfektionsmittel für weiche Oberflächen abwaschbar.

Stellen Sie die TraumaMatratze mit einem neuen CMTFIX oder
CMCOVER und alle Fixierungs-bändern vorhanden und zugemacht mit
den Schnallen, auf den dafür vorgesehenen Ort.

DRUCKENTLASTUNG / IMMOBILISIERUNG
RÖNTGEN-KOMPATIBEL / CT-KOMPATIBEL
NICHT EMPFOHLEN FÜR MRI