

ReadyHeat™

 Winther Medical

Aktive selbstwärmende Patientendecken

Die Ready-Heat Decke besteht aus einem Vliesstoff mit eingearbeiteten, chemischen, selbsterhitzenden Wärmeelementen und ist vakuumverpackt. Jede Decke bzw. jedes Element erwärmt sich nach Kontakt mit Luft auf ca. 40°C (Temperaturspitzen möglicherweise bis 52°C). Die max. Wärmeleistung wird nach 15 – 30 Minuten erreicht und hält ca. 6 Stunden.

Anwendung:

1. Verpackung unmittelbar vor Anwendung öffnen.
2. Nehmen Sie die Decke aus der Verpackung und entfalten Sie diese. Öffnen Sie nicht die Wärmeelemente.
3. Die Wärmeelemente benötigen 10-20 Minuten zur vollen Leistungsentfaltung.
4. Bei nachlassender Wärmeleistung Decke zum Belüften der Elemente schütteln.
5. Enthält keine umweltschädlichen Stoffe, dadurch einfache Entsorgung nach Gebrauch.

Sicherheitshinweise:

1. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren
2. Sorgsame Anwendung an älteren Personen, Säuglingen, Kindern, Personen mit sensibler Haut oder Personen mit eingeschränktem oder fehlendem Wärmeempfinden
3. Personen mit Allergien, Diabetes, Frostschäden, Narben, offenen Wunden oder Durchblutungsstörungen sollten einen Arzt konsultieren bevor sie Ready Heat verwenden
4. Entfernen Sie die Decke falls sie zu heiß wird oder Sie sich unwohl fühlen. Die maximale Temperatur kann 52°C erreichen. Nicht während des Schlafens verwenden. Nicht auf nackter Haut anwenden
5. Öffnen oder beschädigen Sie nicht die Wärmeelemente und erlauben Sie nicht, dass der Inhalt in Kontakt mit Mund oder Augen kommt. Bei Kontakt der Inhaltsstoffe mit Augen und/oder Schleimhäuten sofort mit klarem Wasser spülen.

Verpackungsmaß: 34 x 48 cm (ausgepackt: 86,5 x 122 cm)
Gewicht pro Stück 0.68 Kg

Artikel Nr.:

ReadyHeatII

Verpackung mit 8 Stück: G12RH2



 Winther Medical

WINTHER MEDICAL
Mugerenmatt 21
6330 Cham
Schweiz

Natel: 078 647 71 20
Tel.: 041 780 81 85
Fax: 041 560 81 86

info@winthermedical.ch
www.winthermedical.ch