

Lagerungsschlange

PRODUKTHINWEISE

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Lagerungsschlange der Firma Born for Life entschieden haben. Unsere Produkte werden alle in Deutschland liebevoll per Hand gefertigt und erfüllen unsere hohen Ansprüche an Qualität und Funktionalität.

Damit Sie an Ihrem Produkt möglichst viel Freude haben, sind im Folgenden einige Nutzungshinweise für Sie zusammengestellt.

Sollten Sie Fragen bezüglich des Produktes haben, melden Sie sich bitte per E-Mail info@born-for-life.com oder telefonisch unter +49 40 33370039.

Bitte bewahren Sie diese Produkthinweise sorgfältig auf.



NUTZEN & VORTEILE






Zweckbestimmung:

Die Lagerungsschlange dient als Hilfsmittel zur Lagerung von Säuglingen in variabler Position, aber auch zur unterstützten Positionierung von Kleinkindern. Sie bietet hierbei durch die Kombination von Gewicht und Elastizität Halt, aber auch die Möglichkeit sich in die Begrenzung Einstemmen oder von ihr Abdrücken zu können. Hierdurch wird der Säugling beim Finden einer Position für Ruhe- oder Aktivität unterstützt. Die Lagerungsschlange ermöglicht die Lagerung des Säuglings mit Mittellinienausrichtung, bei gleichzeitig unterstützter Beugehaltung. Aktivitäten zur Selbstregulation, wie das Suchen und Saugen an den eigenen Händen und das Einstemmen und Abdrücken mit Händen und Füßen, für mögliche Lageveränderungen sowie zur Körperraumorientierung, sind so möglich.

Klassifizierung:

Die Lagerungsschlange ist kein medizinisches Hilfsmittel, da es ausschließlich zum Zwecke der Behaglichkeit des Säuglings eingesetzt wird. Dieses Produkt ist nicht für diagnostische bzw. therapeutische Zwecke laut Art. 1 Absatz 2 der Medizinprodukteverordnung (93/42/EWG) bestimmt.

Sicherheitshinweise:

-  Die Lagerungsschlange darf, aufgrund der Gefahren des Plötzlichen Kindstodes, nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.
-  Die Lagerungsschlange darf, aufgrund ihres Gewichts, nicht auf dem Säugling platziert werden.
-  Die Lagerungsschlange muss stets auf Dichtigkeit geprüft werden. Bei Austreten der Füllung ist die Nutzung sofort zu unterlassen, es besteht die Gefahr des Verschluckens von Kleinteilen.
-  Die Reparatur der Lagerungsschlange erfolgt ausschließlich durch die Born for Life GmbH oder durch von dieser beauftragten Unternehmen.
-  Die Lagerungsschlange darf nicht erwärmt werden.

Alle sonstigen, nicht in diesen Produkthinweisen beschriebenen Verwendungen werden als zweckwidrig betrachtet.


Material:

Hülle: 100% Polyester, Füllung: Polypropylen-Granulat.

Reinigung:

Die Lagerungsschlange ist bei 40 °C, unter Verwendung der üblichen Haushaltswaschmittel, waschbar und verträgt desinfizierende Substanzen. Aufgrund ihres Gewichtes empfehlen wir Handwäsche. Die Wäsche in einer Waschmaschine erfolgt auf eigene Gefahr.

Die Trocknung sollte mittels Lufttrocknung erfolgen. Das Trocknen in einem Wäschetrockner ist, aufgrund der Gefahr des Zusammenschmelzens der Füllung, unzulässig.

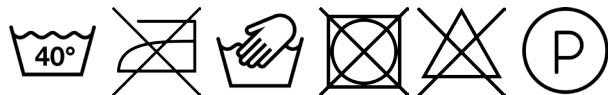

Haftungsbeschränkung:

Wird das Produkt auf eine mit dem beabsichtigten Verwendungszweck nicht vereinbare Weise verwendet, wird die Haftung für die ordnungsgemäße Funktion des Produkts dauerhaft an den Eigentümer bzw. Benutzer übertragen. Dies gilt auch, wenn die Minderung der ordnungsgemäßen Funktion im Zusammenhang mit der Herstellung oder dem Vertriebsprozess steht und zuvor die Born for Life GmbH Produktgarantie gegolten hätte.

Die Born for Life GmbH kann nicht für einen eventuell entstandenen Schaden aufgrund:

- der Nichteinhaltung der in dieser Packungsbeilage beschriebenen Empfehlungen,
 - zweckwidriger, unsachgemäßer Verwendung bzw. Missbrauch,
- verantwortlich gemacht werden.

Benutzer der Lagerungsschlange müssen ihre Verantwortung hinsichtlich einer geeigneten Überwachung des Kindes anerkennen. Die Verantwortung zur Wahl einer geeigneten Überwachungsart liegt einzig und allein bei dem Benutzer.

Wir wünschen Ihnen mit Ihrem Produkt viel Freude!

Ihr Born for Life Team



**Made in
Germany**

Born for Life GmbH
Heinskamp 18 - D22081 Hamburg
+49 4033370039 info@born-for-life.com www.born-for-life.com