

GEBRAUCHSANWEISUNG

Assistica® MEDIZINISCHES ELASTISCHES BAND FÜR NABELBRUCH, MIT ABNEHBAREM EINSATZ

Model:

- AA 501-1

Die Bestimmung:

Das Nabelbruchband ist zur konservativen Behandlung des Nabelbruchs bei Kontraindikationen für eine Operation, zur Vorbeugung des Austritts und der Einklemmung des Bruchsacks bestimmt.

Die medizinischen Aussagen:

Die konservative Behandlung von postoperativen Brüchen, Nabelbrüchen, paraumbilikalischen Brüchen, Brüchen der weißen Bauchlinie, Vorbeugung von Rückfällen nach der Bruchoperation.

Die Zusammensetzung des Rohstoffs:

Polyester 60%, Latex 30%, Baumwolle 10%.

Die Methodik der Anwendung:

Achtung! Die Anwendung des Gürtels wird nach der Konsultation mit dem behandelnden Arzt empfohlen!

Das Bruchband kann in Krankenhäusern und während einer ambulanten Behandlung angewendet werden. Kurz nach der Operation wird das Band ständig getragen und vor der Nachtruhe abgenommen. Während des Heilungsprozesses wird ein vorübergehendes Tragen der Bandage empfohlen, hauptsächlich bei physischer Belastung. Das Produkt besteht aus zwei Komponenten: dem elastischen Band und der Baumwollhülle, in die das Kompressorium eingelegt wird. Die Größe wird gemäß dem Taillenumfang ausgewählt. Legen Sie das Band im Liegen an, unmittelbar nach der Wiedereinrichtung der Hernienausbuchtung. Das halbhartes Kompressorium wird auf den Nabelbereich gelegt, danach wird das Band mit einem Velcro-Verschluss fixiert. Geben Sie Acht, dass das Band eng an den Körper anliegt, zugleich die Blutversorgung der Weichgewebe aber nicht gestört wird.

Sanitäre Bearbeitung:

Das Nabelbruchband im Seifenwasser, bei +35°C bis +40°C ohne Bleichmittel von Hand waschen, wobei das Kompressorium vorher herausgenommen wird. Keine chemische Reinigung anwenden. Sorgfältiges Schleudern ohne zu wringen. Im ausgebreiteten Zustand trocknen. Nicht bügeln.

Aufbewahrung:

Die Waren werden in trockenen, sauberen, gut belüfteten Räumen bei der Temperatur von +3°C bis +25°C und relativen Luftfeuchtigkeit 60–65% aufbewahrt.

Gegenanzeigen:

individuelle Unverträglichkeit von Produktbestandteilen, eingeklemmte und irreponible Hernien, Intertrigo.

Verpackung:

1 Stück.

Verfügbare Größen: 1, 2.
Taillenumfang: 65,0-125,0 cm.

Gültigkeitsdauer der Ware - 5 Jahre.

Ihre Bemerkungen und die Vorschläge richten Sie an die Adresse des Verkäufers:

SELL WELL SIA

Ropazu iela 21-1, Riga, LV-1039, Latvia

E-mail: sales@assistica.com

Hergestellt in der EU

Hersteller ist nach ISO 9001 zertifiziert

