

GEBRAUCHSANWEISUNG

Assistica® MEDIZINISCHES ELASTISCHES BAND FÜR NABELBRUCH (für Kinder)

Model:

- AA 501-D

Die Bestimmung:

Das Nabelbruchband ist zur konservativen Behandlung des Nabelbruchs für Kinder bis 6 Jahre zur Vorbeugung des Austritts und der Einklemmung des Bruchsacks bestimmt.

Die medizinischen Aussagen:

Die konservative Behandlung von Nabel und paraumbilical Hernien und epigastrische Hernie, die Vermeidung von Rezidiven nach herniotomy, Prolaps und Einkerbung von Bruchsack und andere Komplikationen.

Die Zusammensetzung des Rohstoffs:

LATEX FREE: Polyurethanschaum - 80%, Polyamid - 10%, Baumwolle - 10%.
Verband: PVC - 100%.

Die Methodik der Anwendung:

Achtung! Die Anwendung des Gürtels wird nach der Konsultation mit dem behandelnden Arzt empfohlen!

Das Bruchband kann in Krankenhäusern und während einer ambulanten Behandlung angewendet werden, auch zu Hause, aber nur nachdem sie in der Technik der Nabelhernien-Taxis ausgebildet wurden. Der Gürtel sollte 2 bis 24 Stunden am Tag getragen werden, sofern vom Arzt nichts anderes vorgeschrieben ist.

Das Produkt besteht aus weichem, ökologisch sauberem Leinen, dessen Innenfläche aus Baumwolle und die Außenfläche aus geschliffenem Polyamid besteht und mit Hilfe des Klettverschlusses leicht zu befestigen ist.

Das Produkt besteht aus zwei Teilen: dem vorderen breiteren Teil (von der Innenseite her ist ein Hernienverband eingenäht) und einem schmalen Gürtel mit Klettverschluss. Es wird empfohlen, die Bandage nach der Reduzierung des Hernienüberstandes liegend anzulegen. Die halbstarre Bandage wird im Bereich der Nabelschnur platziert, dann wird der Gürtel mit Hilfe des Klettverschlusses am vorderen Teil des Produkts befestigt. Es ist zwingend notwendig sicherzustellen, dass der Gurt fest am Körper anliegt und dabei die Blutversorgung der Weichteile nicht stört. Wenn der Nabel noch nicht verheilt ist, wird empfohlen, ein Baumwollpad zu verwenden.

Sanitäre Bearbeitung:

Das Nabelbruchband im Seifenwasser, bei +35°C bis +40°C ohne Bleichmittel von Hand waschen, wobei das Kompressorium vorher herausgenommen wird. Keine chemische Reinigung anwenden. Sorgfältiges Schleudern ohne zu wringen. Im ausgebreiteten Zustand trocknen. Nicht bügeln.

Aufbewahrung:

Die Waren werden in trockenen, sauberen, gut belüfteten Räumen bei der Temperatur von +3°C bis +25°C und relativen Luftfeuchtigkeit 60–65% aufbewahrt.

Gegenanzeigen:

individuelle Unverträglichkeit von Produktbestandteilen, eingeklemmte und irreponible Hernien, Intertrigo.

Verpackung:

1 Stück.

Verfügbare Größen: Einheitsgröße.

Taillenumfang: 36,0-52,0 cm

Die Gürtelgröße ist universell und kann auch für Säuglinge verwendet werden.

Gültigkeitsdauer der Ware - 5 Jahre.

Ihre Bemerkungen und die Vorschläge richten Sie an die Adresse des Verkäufers:

SELL WELL SIA

Ropazu iela 21-1, Riga, LV-1039, Latvia

E-mail: sales@assistica.com

Hergestellt in der EU

Hersteller ist nach ISO 9001 zertifiziert

