

GEBRAUCHSANWEISUNG

Assistica® MEDIZINISCHES ELASTISCHES GURT, WÄRMEGÜRTEL (mit Angora und Merino Wolle)

Model:

- AA 509-A-T

Die Anwendung:

Der elastische Gürtel zur Behandlung und Prophylaxe von Radikulitis und Neuritis. Der Gürtel beruhigt die Schmerzen, nimmt die Anstrengung der Muskeln ab und beschleunigt den Genesungsprozess. Die Anwendung des Gürtels beeinflusst wohltuend die inneren Organe durch die Reliefstrukturen der Webleinen, durch die weiche Unterstützung und die Verbesserung der Mikrozirkulation. Es ist auch allen empfehlenswert, wer nach seiner Tätigkeitsart eine langwierige Belastung in der Kreuzabteilung der Wirbelsäule hat und bei der Kälte und den Zugwinden arbeitet.

Die medizinischen Aussagen:

Behandlung von verschiedenen Krankheiten: die Radikulitis in der Kreuzabteilung der Wirbelsäule und die Radikulopathie, die Lumbalgien, die Ischialgien, die Neuralgie, bei den nicht erschweren Brüchen der Bandscheiben, bei den myofaszialen Schmerzen und bei vertebrale Osteochondrose.

Vor- und Nachoperative Periode: für die Kürzung der Rehabilitierungsfristen nach den Verletzungen und nach den Operationen in der Kreuzabteilung der Wirbelsäule.

Prophylaktische Maßnahmen: für die Prophylaxe der Komplikationen und neurologischen Beschwerden bei der Radikulitis in der Kreuzabteilung der Wirbelsäule, bei der Neuralgie; für die Vorbeugung der Berufskrankheiten verbunden mit langwierigen statischen und dynamischen Belastung auf die Kreuzabteilung der Wirbelsäule während der Arbeit und bei der Möglichkeit der Unterkühlung, sowie bei der Arbeit in der Kälte.

Die Zusammensetzung des Rohstoffs:

Baumwolle – 52%, Mischung aus Angora und Merino Wolle – 35%, Latex – 7%, Polyester – 6%.

Die Methodik der Anwendung:

Der elastische Gürtel kann in den Krankenhäusern, bei der ambulatorischen Behandlung, in den Fitness Institutionen und in den häuslichen Bedingungen angewandt werden. Die Größe bestimmt man nach dem Umfang der Taille, siehe die Größenskala auf der Verpackung. Man trägt den Gürtel direkt am Körper oder auf der Wäsche aus Baumwolle. Die äußerliche Seite des Gürtels ist aus dem Wollgarn und die innere Seite aus der Baumwolle gemacht. Wenn man den thermischen Effekt verstärken soll, so wird der Gürtel mit der wollenen Seite zum Körper und für die Verstärkung des Massage Effektes mit der baumwollene Seite zum Körper getragen.

Es ist prophylaktisch empfehlenswert, das Erzeugnis 2-4 Stunden pro Tag zu tragen und für die Nacht abzunehmen. Es ist empfehlenswert, das Erzeugnis zu den Heilzielen komplex, in der Kombination mit den pharmazeutischen Präparaten bis zu 24 Stunden pro Tag, nach der Vereinbarung mit dem behandelnden Arzt bis zu 7, 14, 21, 28 und mehr Tagen zu tragen. Im Falle der Benutzung des Gürtels mehr als 30 Tage wird zwischen den Kursen eine Pause 3–7 Tage empfohlen.

Sanitäre Bearbeitung:

Das Band im Seifenwasser, bei +35°C bis +40°C ohne Bleichmittel von Hand waschen, wobei das Kompressorium vorher herausgenommen wird. Keine chemische Reinigung anwenden. Sorgfältiges Schleudern ohne zu wringen. Im ausgebreiteten Zustand trocknen. Nicht bügeln.

Aufbewahrung:

Die Waren werden in trockenen, sauberen, gut belüfteten Räumen bei der Temperatur von +3°C bis +25°C und relativen Luftfeuchtigkeit 60–65% aufbewahrt.

Gegenanzeigen:

individuelle Unverträglichkeit von Produktbestandteilen, d.h. allergische Hauterkrankungen.

Verpackung:

1 Stück.

Gültigkeitsdauer der Ware - 5 Jahre.

Ihre Bemerkungen und die Vorschläge richten Sie an die Adresse des Verkäufers:

SELL WELL SIA

Ropazu iela 21-1, Riga, LV-1039, Latvia

E-mail: sales@assistica.com

Hergestellt in der EU

Hersteller ist nach ISO 9001 zertifiziert

