

GEBRAUCHSANWEISUNG

Assistica® Medizinischer Kompressionsärmel

für nach einer Mastektomie und Brustkrebsoperation

Modelle:

- AA 403-0T, AA 403-1T, AA 403-2T

Die Bestimmung:

Der medizinische elastische Kompressionsarmstrumpf dient der Vorbeugung und Behandlung der Lymphabflußstörungen kurze oder längere Zeit nach Brustdrüsenabtragung, nach Verletzungen, Brüchen, tiefen Brandwunden, Folgen von Lymphangitis und Thrombophlebitis der oberen Extremitäten und nach der Strahlentherapie in der Achselgegend.

Die medizinischen Aussagen:

Der Kompressionsärmel ist aus elastischem medizinischem Trikotstoff nahtlos gefertigt, die Länge des Erzeugnisses reicht vom Handgelenk bis zur Achselgegend. Die Verflechtung des Erzeugnisses gewährleistet verteilten Druck (abfallend von der Hand oder vom Unterarm in Richtung Schulter) auf die Weichteile der oberen Extremitäten, wodurch die venöse Durchblutungszeit vergrößert, die Filtration verringert und die Rückabsorption der extrazellulären Flüssigkeit vergrößert und der physiologische Lymphstrom gewährleistet wird. Auf diese Weise wird die Ödembildung verhindert und das Ergebnis bisheriger Behandlung gefestigt.

Der Kompressionsärmel und die Schulter kann am Körper mit Hilfe eines speziellen elastischen Bandes oder am Träger des Büstenhalters mit einem Klettverschluss fixiert werden.

Die Zusammensetzung des Rohstoffs:

Polyamid 80%, Lycra 20%.

Die Methodik der Anwendung:

Die Kompressionsklasse und die Produktart werden vom Arzt verordnet. Die Größe des Erzeugnisses wird individuell aufgrund anatomischer Maße der Extremitäten festgelegt.

Der Kompressionsärmel sollte jeden Tag getragen werden. Ziehen Sie diesen am Morgen, sofort nach dem Aufwachen, an. Schlagen Sie zunächst den Kompressionsärmel bis zum Teil um, der auf das Handgelenk angezogen wird. Ziehen Sie den Kompressionsärmel hoch. Streichen Sie gleichmäßig, ohne zu verdrehen das Produkt auf dem Arm glatt. Stellen Sie sicher, daß der Kompressionsärmel auf der ganzen Armlänge gleichmäßig ausgebreitet ist, keine Falten bildet und keine Quetschung verursacht.

Sanitäre Bearbeitung:

Die Kompressionsartikel sollten von Hand mit Seife bei einer Wassertemperatur von +40°C, ohne Verwendung von Bleichmitteln gewaschen werden. Nicht mit chemischen Mitteln reinigen. Sorgfältiges Auspressen ohne Wringen empfohlen sowohl Trocknen in ausgebreiteter Form. Nicht bügeln.

Aufbewahrung:

Die Waren werden in trockenen, sauberen, gut belüfteten Räumen bei der Temperatur von +3°C bis +25°C und relativen Luftfeuchtigkeit 60–65% aufbewahrt.

Gegenanzeigen:

individuelle Unvereinbarkeit mit den Rohstoffkomponenten, Dermatitis unterschiedlicher Ursache, Ekzeme (vor allem nässende), Erysepelentzündungen (akute), schwere Herz-Lungeninsuffizienz, chronische arterielle Insuffizienz.

Verpackung:

1 Stück.

Gültigkeitsdauer der Ware - 5 Jahre.

Ihre Bemerkungen und die Vorschläge richten Sie an die Adresse des Verkäufers:

SELL WELL SIA

Ropazu iela 21-1, Riga, LV-1039, Latvia

E-mail: sales@assistica.com

Hergestellt in der EU

Hersteller ist nach ISO 9001 zertifiziert

