

XEN®

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- LIRE CES INSTRUCTIONS
 - CONSERVER CES INSTRUCTIONS
 - SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS
 - TENIR COMPTE DE TOUS LES AVERTISSEMENTS
-

AVERTISSEMENTS

NE PAS UTILISER ce produit si vous avez un stimulateur cardiaque, un défibrillateur implanté ou tout autre appareil électronique implanté ou métallique. Cela pourrait provoquer un choc électrique, des brûlures, des interférences électriques ou la mort.

NE PAS UTILISER ce produit en cas d'utilisation de tout autre appareil de stimulation électrique externe.

NE PAS UTILISER ce produit pendant la grossesse ou l'allaitement.

NE PAS UTILISER ce produit en cas d'épilepsie ou d'antécédents de convulsions.

NE PAS UTILISER ce produit en cas de troubles de l'articulation temporo-mandibulaire, de paralysie de Bell, de fonction altérée des nerfs crâniens ou de douleurs au visage.

NE PAS UTILISER ce produit en conduisant, en faisant fonctionner des machines ou pendant toute activité au cours de laquelle la distraction ou la stimulation électrique peut vous exposer à un risque de blessure.

NE PAS UTILISER cet appareil près de l'eau.

NE PAS UTILISER ce produit si le boîtier a été endommagé.

Pour éviter d'éventuelles lésions auditives, NE PAS ÉCOUTER à un volume sonore élevé pendant de longues périodes.



NE PAS UTILISER ce produit en présence de champs électromagnétiques puissants, tels que des scanners IRM.

NE PAS PLACER les écouteurs Xen dans ou sur tout endroit du corps autre que le conduit auditif.

NE PAS PLACER les écouteurs Xen sur une peau présentant des blessures ouvertes, des plaies ou des éruptions cutanées; ou une peau enflée, infectée, enflammée ou présentant des éruptions cutanées.

En cas de soins médicaux dirigés, consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit.

Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 18 ans. Garder ce système hors de portée des enfants.

EFFETS INDÉSIRABLES Les utilisateurs à la peau sensible peuvent ressentir une irritation de la peau dans la zone où les écouteurs Xen sont appliqués. En cas de douleur ou de gêne dans l'oreille, de maux de tête, d'étourdissements ou tout autre effet indésirable, CESSER L'UTILISATION. Si une telle condition persiste après l'arrêt de l'utilisation, consulter votre médecin.

PRÉCAUTIONS L'écouteur gauche transmet le signal Xen et ne doit être utilisé que dans l'oreille gauche.

Faire preuve de prudence en cas d'utilisation dans un conduit auditif qui n'a pas de sensations normales. N'utiliser que des accessoires/équipements annexes spécifiés par le fabricant.

En cas d'utilisation en dehors des États-Unis, il convient d'utiliser une alimentation électrique certifiée par un agent international (IEC/EN) avec une sortie LPS/PS2 et une fiche configurée de manière appropriée pour le pays d'origine.

Ne pas démonter l'appareil ou les écouteurs. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.

Confier toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, comme lorsque le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e), lorsque du liquide a été renversé ou des objets sont tombés sur l'appareil, lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, qu'il ne fonctionne pas normalement, ou qu'il est tombé.

Le fonctionnement à proximité d'un équipement à ondes courtes ou à micro-ondes peut produire une instabilité dans la sortie du produit.

En cas d'utilisation de musique, s'assurer de régler d'abord le volume de la musique, puis régler l'intensité de la session.

Risque d'étouffement : Garder les écouteurs, les oreillettes et le flacon pulvérisateur de solution saline à micro-gouttes hors de portée de jeunes enfants.

Ce produit est destiné aux utilisateurs en bonne santé souhaitant potentiellement améliorer leur bien-être général. Il ne s'agit pas d'un appareil médical et n'est pas destiné à diagnostiquer, à traiter, à guérir ou à prévenir une maladie ou une affection.