



Le présent guide a pour objet de vous aider à utiliser correctement votre appareil TENS 7000^{MC}. N'utilisez pas cet appareil pour des syndromes de douleurs non diagnostiqués avant d'avoir consulté un médecin. Ce guide n'est pas destiné à remplacer ou à se substituer au manuel d'instructions du TENS 7000^{MC}. **VEUILLEZ LIRE ENTIÈREMENT LE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.** Lisez, comprenez et tenez compte dans la pratique des contre-indications, des avertissements, des mises en garde et des instructions d'utilisation figurant aux pages 4 et 5 de votre manuel d'instructions. Respectez toujours les instructions d'utilisation figurant dans le manuel.

APPAREIL TENS 7000^{MC}

- 1 Prises de fils conducteurs – 2 canaux
- 2 Cadran de marche/d'arrêt/d'intensité – 2 canaux
- 3 Panneau de commandes avec guide de référence
- 4 Écran à cristaux liquides (ACL)
- 5 Commande de sélection du mode
- 6 Commande de sélection du réglage
- 7 Commande d'incrément/d'augmentation de l'intensité
- 8 Commande de décrément/de réduction de l'intensité
- 9 Couverture de protection
- 10 Pince de ceinture

ÉLECTRODES
(ENSEMBLE DE 4)

CONNECTEURS DE FIL
(2 INCLUS, UN POUR CHAQUE CANAL)

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

Le positionnement des électrodes est l'un des paramètres déterminants de réussite dans la cadre de la thérapie de TENS. Si les premiers résultats ne sont pas positifs, consultez votre médecin pour configurer un autre réglage de stimulation ou autre positionnement d'électrodes. Une fois les résultats souhaités obtenus, notez les coordonnées de positionnement des électrodes et leurs réglages pour référence ultérieure. Le TENS 7000^{MC} est équipé de deux capuchons de protection qui empêchent tout changement involontaire des réglages.

Allumez l'appareil en tournant le cadran dans le sens horaire et sélectionnez le niveau d'intensité souhaité. **Éteignez l'appareil** en tournant le cadran dans le sens antihoraire jusqu'à 0.

L'**indicateur de pile faible** signale que la pile est faible. Remplacez la pile lorsque la stimulation semble plus faible.

INSÉRER LA PILE

Appuyez sur la flèche et faites glisser le couvercle du compartiment des piles pour l'ouvrir. Insérez une pile de 9 V*, en faisant correspondre les polarités + et - à celles de l'appareil.

La pile doit être placée au-dessus du ruban du compartiment pour faciliter son retrait.


*La pile incluse est conçue pour être une pile de démarrage. Cette pile n'est destinée à durer que 30 minutes à une heure avant d'être remplacée.



IMPORTANT!

Effectuez les étapes 1 à 3 lorsque l'appareil est éteint (OFF). Lorsque l'appareil est allumé (ON), ne retirez pas la ceinture avant d'avoir éteint l'appareil (OFF).

1 BRANCHEZ LES CONNECTEURS DE FILAUX ÉLECTRODES

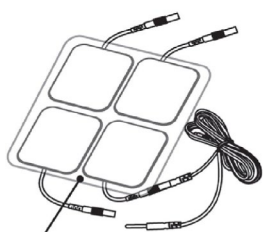


Insérez fermement l'extrémité de la broche du connecteur de fil dans les connecteurs d'électrode.


Assurez-vous que la connexion est établie et qu'aucun métal nu des broches n'est exposé.

2 BRANCHEZ LES CONNECTEURS DE FIL À L'APPAREIL

Sélectionnez l'un des deux canaux disponibles et insérez fermement le connecteur de fil dans la prise.

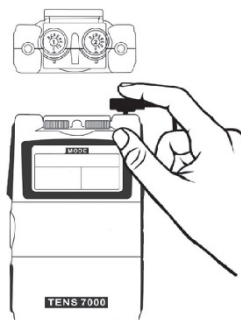

3 POSITIONNEZ LES ÉLECTRODES SUR LA PEAU

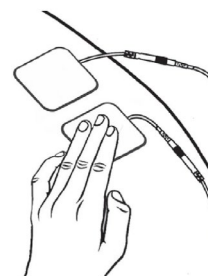


Retirez les électrodes de leur enveloppe protectrice. Conservez l'enveloppe protectrice pour y stocker les électrodes après utilisation.

Avant de les appliquer, assurez-vous que la peau du site de traitement est propre et sèche.

Voir le Guide de positionnement des électrodes pour plus de renseignements


4 ALLUMEZ L'APPAREIL ET SÉLECTIONNEZ L'INTENSITÉ

En tournant les commandes dans le sens horaire, le canal approprié est allumé et l'indicateur d'alimentation (CH1 et CH2) s'affiche sur l'écran ACL.

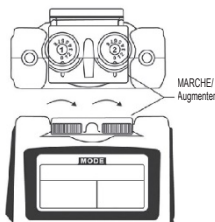


La puissance de stimulation de sortie augmente lorsque le cadran est tourné dans le sens horaire ou vers un chiffre plus élevé.
1 = Plus faible 8 = Plus élevé

5 SÉLECTIONNEZ UN MODE DE THÉRAPIE

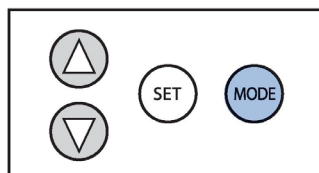

Vous avez le choix entre 5 modes : **Burst, Normal, Modulation, SD1 et SD2**. Appuyez sur la commande MODE et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que vous ayez atteint le réglage souhaité.



6 SÉLECTIONNEZ LA LONGUEUR D'IMPULSION

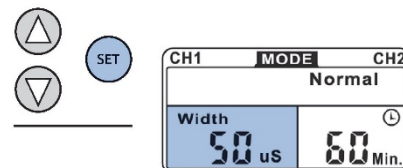

La longueur d'impulsion est réglée entre 50 us et 300 us. Appuyez sur la commande « SET » pour accéder à ce menu, puis appuyez sur les boutons ▲ et ▼ pour régler la valeur.

Sauf indication contraire, il est recommandé de régler l'appareil entre 70 et 120 us.


7 SÉLECTIONNEZ LA FRÉQUENCE DES IMPULSIONS

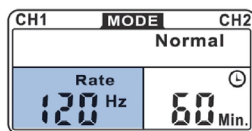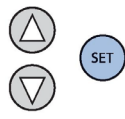

La fréquence d'impulsion est réglable entre 2 Hz et 150 Hz.

Appuyez sur la commande « SET » pour accéder à ce menu, puis appuyez sur les boutons ▲ et ▼ pour régler la valeur. Sauf indication contraire, il est recommandé de régler l'appareil entre 70 et 120 Hz.

8 RÉGLEZ LA MINUTERIE

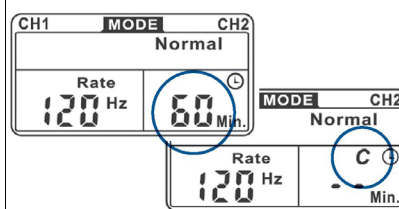

La durée du traitement peut être réglée de 1 à 60 min ou en mode Continu (C). Appuyez sur les boutons ▲ et ▼ pour effectuer le réglage. Vos réglages seront sauvegardés de façon permanente, à moins qu'ils ne soient à nouveau modifiés.

COMPTEUR D'UTILISATION

Cet appareil peut contenir 60 programmes de traitement. Il est possible d'enregistrer jusqu'à 999 heures de temps de traitement.

Pour vérifier et supprimer un enregistrement individuel, appuyez sur la commande MODE lorsque vous mettez l'appareil en marche. L'écran ACL affichera le nombre d'enregistrements et le temps d'utilisation. Appuyez sur les boutons ▲ et ▼ pour accéder à chaque enregistrement.

Pour supprimer un enregistrement, appuyez sur la commande « SET » pendant 3 secondes.

Pour vérifier et supprimer un enregistrement cumulatif, appuyez sur la commande MODE pour passer à ce réglage. Appuyez d'abord sur la commande de réglage (SET), puis sur la commande mode (MODE) et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes; tous les enregistrements seront effacés, suivis d'un bip.