



D-CHECK FRASCO

PRUEBA RÁPIDA PARA DETECCIÓN DE DROGAS

Registro Sanitario No. 0416R2017 SSA



TIRA DE ALCOHOL OPCIONAL PARA NUESTROS CLIENTES SIN COSTO ADICIONAL

Inmunoensayo cromatográfico para la detección cualitativa y simultánea de 1 a 21 drogas y adulterantes, en una variedad de combinaciones en orina humana. Se basa en el principio de vinculación competitiva. Las drogas que puedan estar presentes en la muestra de orina compiten contra su conjugado de droga respectivo para sitios vinculantes en su anticuerpo específico.

Detecta sustancias toxicológicas simultáneamente

- | | | | |
|----------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| » 7-Amino-Clonazepam | » Creatinina | » Mefedrona | » Nicotina |
| » Acetaminofén | » Éxtasis | » Mescalina | » Nitrito / Glutaraldehído |
| » Ácidos | » Fenciclidina | » Metabolito de Metadona | » Opíáceos |
| » Alcohol | » Fentanilo | » Metabolitos de heroína | » Oxidantes |
| » Anfetaminas | » Glucuronido de etilo | » Metacualona | » Oxidantes |
| » Antidepresivo tricíclico | » Glutaraldehído | » Metadona | » Pregabalina |
| » Barbitúrico | » Grav. específica | » Metanfetaminas | » Propoxifeno |
| » Benzodiacepina | » Hidromorфона | » Metcatinona | » Tiilidina |
| » Buprenorfina | » Ketamina | » Metilendioxipirovalerona | » Tramadol |
| » Clonazepam | » Marihuana | » Metilfenidato | » Zaleplón |
| » Cocaína | » Marihuana Sintética | » Morfina | |

CADENA DE CUSTODIA

El proceso que va desde la toma de la muestra que se analizará hasta la entrega de los resultados se denomina "cadena de custodia". El proceso inicia cuando la persona es nominada al examen y continúa con la orden médica, llena una ficha donde expresa su consentimiento para continuar con la toma de la muestra de orina. Una vez tomada, se vuelve a sellar en presencia de la persona. De ahí se va al laboratorio.

Los resultados se comunican al médico que emitió el orden o al responsable de la política preventiva en la empresa.

Sello de seguridad

Etiqueta autoadherible que se coloca en la prueba para evitar manipulaciones.


Bolsa de seguridad

Bolsa especial para el traslado de muestras positivas al laboratorio para confirmación de presunto positivo.

Confirmación de positivo

Estudio por el cual se confirma el positivo de la muestra en nuestro laboratorio, certificado el resultado.

MODO DE USO

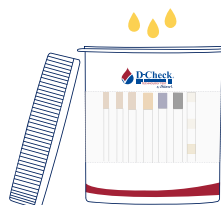

- 1 Deposite la muestra de orina en el frasco y ciérrelo.
- 2 Despegue la etiqueta para conocer los resultados.
- 3 Interprete los resultados en 5 minutos.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

