



## INCORRECT

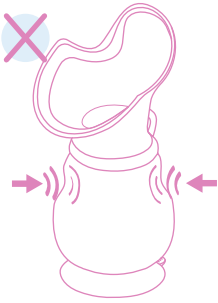

Squeezing the top area of the pump may cause the flange to change in shape.

**Posisi Penekanan Yang Salah:**  
Menekan pada bagian atas pompa dapat mengakibatkan corongnya berubah bentuk

## CORRECT

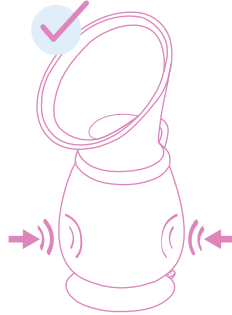

Squeeze on the bottom area of the pump.

**Posisi Penekanan Yang Benar:** Tekan bagian bawah pompa

## HOW TO USE

Before first use, wash and sterilize pump. Wash and clean pump well after each use.

## CARA PENGGUNAAN

Sebelum digunakan untuk pertama kalinya, cuci dan sterilkan pompanya. Cuci dan bersihkan pompa setiap kali setelah digunakan

1

Place pump over the breast and make sure that nipple is in the middle of the neck of the pump. Squeeze pump (see squeezing position) fill pump is attached securely on the breast.

Posisikan pompa pada payudara dan pastikan puting berada pada tengah-tengah leher pompa. Tekan pompa (lihat posisi penekanan) hingga pompa menempel dengan baik pada payudara.



2

Once milk starts to flow, allow the milk to fill the pump or collect milk as desired. **Note:** To use as a breast pump, squeeze pump repeatedly till milk is expressed as desired.

Saat ASI mulai keluar, biarkan ASI memenuhi pompa. **Catatan:** Untuk penggunaan sebagai pompa ASI, tekan pompanya berulang kali hingga ASI keluar.



3

Remove pump once you have stopped milk collection or pump is full by squeezing flange area.

Lepaskan pompa saat Anda telah selesai menampung ASI atau saat pompa sudah penuh dengan menekan bagian corongnya.



4

Store breast milk in PIGEON breast milk storage bottles or bags.

Simpan ASI dalam botol atau kantong penyimpanan ASI Pigeon.



## CAUTION

- ❖ Before using the milk saver pump for the first time, please wash and sterilize the pump well. Wash thoroughly and dry it well for storage after each usage.
- ❖ Keep away from heat and child.
- ❖ In case of discomfort on your breast during usage, stop using immediately.

## PERHATIAN

- ❖ Sebelum pemakaian pompa penampung ASI untuk pertama kalinya, cuci dan sterilkan pompa dengan benar. Setelah digunakan, cuci pompa sampai bersih dan keringkan terlebih dahulu sebelum disimpan.
- ❖ Jauhkan dari panas dan anak-anak.
- ❖ Jika terjadi ketidaknyamanan pada payudara saat digunakan, segera hentikan pemakaian.