

### Værd at vide om Sea-Band... (spørgsmål og svar)

Spørgsmål	Svar
<b>1</b> Hvad er Sea-Band..?	Sea-Band er et elastisk akupressurbånd, der giver et svagt vedvarende tryk på et vigtigt akupressurpunkt P6 på hvert håndled. Behandlingen aktiverer populært sagt "kroppens eget forsvar mod kvalme" og kvalmen forsvinder eller bliver reduceret.
<b>2</b> Hvornår skal jeg tage båndet på..?	Generelt tager man Sea-Band på forebyggende. Sea-Band vil typisk virke efter 5-10 minutter også selvom kvalmen er begyndt.
<b>3</b> Hvordan placerer jeg båndet rigtigt..?	Læg dine tre midterste fingre på undersiden af håndledet som vist på tegningen i æsken. Punktet ligger nu lige under din pegefinger mellem de to sener. Gentag fremgangsmåden på det andet håndled. Det er vigtigt at placere Sea-Band rigtigt. Virkningen kan forstærkes ved at masere let på akupressurknappen nogle sekunder.
<b>4</b> Hvor lang tid tager det inden båndet virker..?	Virkningen begynder typisk 5 til 10 minutter efter at båndet er placeret korrekt. Du kan fremskynde virkningen ved at masere let på akupressurknappen.
<b>5</b> Kan man bære Sea-Band hele tiden..?	Det kan man godt, men det anbefales at tage det af når man sover. Hvis båndet strammer eller hånden hæver tager man det af en tid.
<b>6</b> Er der forskel på Sea-Band til børn og voksne..?	Sea-Band universalbånd (sort) kan anvendes af både børn og voksne. Børnebåndet giver lidt mere tryk på små håndled og anvendes til børn fra 3 til 12 år. Tilbage meldinger fra familier siger, at børn ned til 1 år kan opnå den fulde virkning mod transportsyge.
<b>7</b> Virker båndet på alle personer..?	9 ud af 10 opnår den fulde virkning af båndet ved transportsyge. Der findes altså enkelte personer som kun reagerer begrænset eller hvor virkningen udebliver ved denne behandling.
<b>8</b> Hvor mange gange kan båndet anvendes..?	Sea-Band kan anvendes igen og igen og kan håndvaskes 3 til 5 gange.
<b>9</b> Findes båndet i flere farver..?	Sea-Band universal fås i farven sort og som mama-version i lys lilla. Sea-Band mama-båndet virker på samme måde som universalbåndet. Til børn fås det i farverne pink og blå. Børn kan også anvende det sorte universalbånd.
<b>10</b> Hvordan virker "Tilfreds eller pengene tilbage" ?	Hvis kunden ikke bliver tilfreds med sit Sea-Band refunderer Sea-Band Danmark det fulde beløb for købet - direkte til kunden, uanset årsag og hvornår båndet er købt. Kunden skal blot sende båndet til Sea-Band Danmark sammen med kvitteringen fra butikken. Adressen står på æsken.



Undgå køresyge..!  
- for børn og voksne

SEA-BAND  
mama!

Førstehjælp  
til gravide



## Køresyge er især et problem på længere rejser..!

- men der findes en løsning, der hurtigt og uden medicin afhjælper køresyge for de fleste.

En effektiv hjælp mod transportsyge er nu tilgængelig med akupressurbåndet Sea-Band. Sea-Band fås til børn og voksne og er en naturlig løsning der generelt virker mod kvalme - allerede efter få minutter.

## Graviditetskvalme er især et problem de første måneder..!

- men der findes en naturlig løsning uden medikamenter og bekymringer.

Med Sea-Band akupressurbånd kan du afhjælpe kvalme helt eller delvis. Det virker for de fleste og bør derfor være det første du prøver for at afhjælpe graviditetskvalme.

## Sådan virker Sea-Band..!

Et svagt vedvarende tryk på akupressurpunktet P6, under hvert håndled, aktiverer kroppens eget forsvar mod kvalme, og efter få minutter er kvalmen væk eller reduceret. Sea-Band virker efter samme princip som akupunktur, bare uden nåle.


Virkingen forklares med, at kemiske budbringere i nervesystemet kan være årsagen til den fysiologiske reaktion.

Sea-Band er klinisk testet med dokumenteret effekt. Derfor refunderer Sea-band Danmark købet, direkte til kunden, hvis kunden ikke bliver tilfreds.



Video

## Sådan placerer du SEA-BAND korrekt

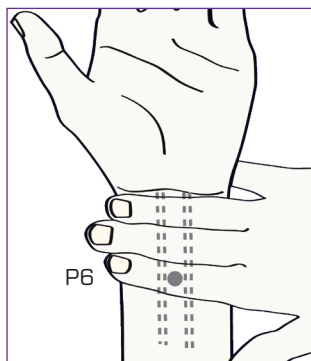

Det er vigtigt at SEA-BAND placeres korrekt, så akupressurknappen trykker på akupressur-punktet P6.

Læg dine tre midterste fingre på undersiden af håndleddet som vist på tegningen.

Punktet ligger nu lige under din pegefinger mellem de to sener.

Gentag fremgangsmåden på det andet håndled.

Virkingen kan forstærkes ved at masere let på akupressurknappen nogle sekunder.



## Fakta om SEA-BAND

Enkel metode der hurtigt afhjælper køresyge, søsyge, graviditetskvalme og medicinsk kvalme. (CE-mærket, MDA-registreret).

Eneste løsning mod graviditetskvalme uden medikamenter og bekymringer.

Medicinfri naturligløsning uden risiko.

Kliniske undersøgelser dokumenterer virkingen.



## En bruger siger: Det virker...

Begge mine børn og jeg har altid "døjjet" med køresyge. Læste om SEA-BAND og købte et sæt med det samme - og det virker perfekt...! Er virkelig glad for at have opdaget SEA-BAND, da jeg altid bliver rigtig syg, både af at køre i bil, bus og tog. Kan da nævne, at bare en tur i bybussen gør mig så syg, at jeg ligger resten af dagen, og kan virkelig ingenting.

Begge mine børn, havde det på præcis samme måde - så det er virkelig "guld" at finde noget som hjælper.

Mvh Merete Besser - Kolding