



EQUINICS

voor een gezond en fit paard

GEBRUIKS HANDLEIDING

EQUINICS

Overdrevsvej 9

4340 Tølløse -DK

+45 28188577

info@equinics.eu

nl.equinics.eu





FIRTECH PRO

Bediening van het FIR-Tech Pro-apparaat

- Sluit het FIR-Tech Pro-apparaat aan op de batterij.
- Zet het apparaat aan door de knop 3 seconden in te drukken.
- De lampjesreeks geeft aan dat het FIR Tech Pro-apparaat klaar is voor gebruik.
- Je kunt kiezen tussen het hoogste, middelste en laagste temperatuurniveau door op de door een druk op de knop bediende schakelaar te drukken. Het niveau kan op elk moment tijdens de werking worden gewijzigd.
- Het apparaat wordt met de hand in- en uitgeschakeld.

Kleuren en warmteniveau

Rood: Hoogste niveau / High

Blauw: Gemiddeld niveau / Medium

Groen: Laagste niveau / Low

Wil je wisselen van kleur/niveau druk je kort op de aan/uit knop. De pad start altijd opnieuw in stand rood bij een nieuwe sessie.

In- of uitschakelen: druk 3 seconden op de knop

Aanbevolen gebruik

- als voorbereiding op de training als 'pre-warming-up': gebruik High (Rood) 15-20 minuten
- als spier- en weefselontspanning na inspanning: gebruik Medium (Blauw) max 30 minuten - evt 2 x daags adls
- wellness en onderhoud: gebruik Low (Groen) tot max 40 minuten



FIRTECH PRO

Opladen van de batterij

- De batterij moet volledig zijn opgeladen voordat je het apparaat voor het eerst gebruikt - en als de batterij bijna leeg is.
- Eenmaal aangesloten op de lader, zal het lampje op de lader groen branden.
- Het groene lampje wordt rood wanneer de batterij volledig is opgeladen.
- Als het opladen klaar is, haal je de oplader uit het stopcontact en koppel je hem los van de batterij.
- Het opladen kan langer duren als de batterij koud is en/of de omgevingstemperatuur laag is.
- De levensduur van de batterij wordt bepaald door de keuze van het verwarmingsniveau en ook door de omgevingstemperatuur.
- Als de batterij leeg is, schakelt het apparaat uit.
- Om optimale resultaten te bereiken, moet je ervoor zorgen dat de batterij volledig is opgeladen voor elke toepassing.
- Laad de batterij op en bewaar deze bij kamertemperatuur
- Gebruik alleen de originele batterij en lader (12V Batterij 2600mAh en 12V lader voor de Pro Rugwarmer en het Hondenkussen). Het gebruik van andere apparaten zal het product, de batterij en/of het oplaadapparaat beschadigen.
- Bij gebruik van andere apparaten vervalt de garantie onmiddellijk
- Garantie op batterijen is beperkt tot één jaar
- Laad, gebruik en bewaar het apparaat bij een omgevingstemperatuur van 5 tot 40 graden Celsius en een relatieve luchtvochtigheid van 25% tot maximaal 85%.